

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 内視鏡下灌流・吸引器 70465000

エンドフロー

【警告】

- ・ 爆発のおそれのある場所では使用しないこと。
- ・ スクリーン上に表示される圧力と同等の値が得られるよう、当該製品と患者の高さが等しくなるように設置すること。
- ・ 当該製品と併用するチューブに関し、滅菌包装にダメージがある場合は、使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】


<構成および外観>

- ① 加圧加温チャンバ
- ② シールプラグ用ハウジング
- ③ 自動式開閉ドア
- ④ タッチスクリーンコントロールパネル
- ⑤ 吸引ポンプ検出スイッチ
- ⑥ 蠕動吸引ポンプ
- ⑦ ラベル
- ⑧ 電源コネクタ
- ⑨ 等電位接地端子
- ⑩ エアコネクタ
- ⑪ フットスイッチコネクタ
- ⑫ メンテナンス用 USB コネクタ
- ⑬ (※⑤・⑥はダブルチャンバのみ)

<シングルチャンバタイプ>



<ダブルチャンバタイプ>

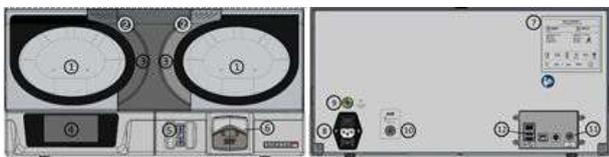

【使用目的又は効果】

当該装置は体腔又は管腔の内視鏡による観察を容易にするため生理食塩水を体内に流入させ灌流・吸引(洗浄効果)する装置である。

【使用方法等】

<灌流>

1. 灌流セットのクランプを閉じる。保護キャップを外し、スパイクを生理食塩水の袋に取り付ける。
2. シールプラグをホルダに取り付ける。
3. アプリケーションが正常に検知されたら OK を押し確認

する。

4. 画面中の圧力単位を選択する。
5. ドアをカチッという音がするまで閉める。
ドアは自動でロックされ、生理食塩水の袋が加圧される。


<吸引>

1. キーリングシステムコネクタをハウジングに留める。
2. パイプのフレキシブル部分をポンプヘッドに配置しカバーを閉める。
3. タッチスクリーンの左上のポンプアイコンを押し速度を選択する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・ 使用前に当該装置を点検してください。
- ・ 併用するチューブセットと各部品に損傷がないことを確認し、無菌包装が輸送中に破損していないかを点検してください。
- ・ 破損が認められた場合は使用せず、弊社に連絡してください。
- ・ スクリーン上に表示される圧力と同等の値が得られるよう、当該製品と患者の高さが等しくなるように設置してください。

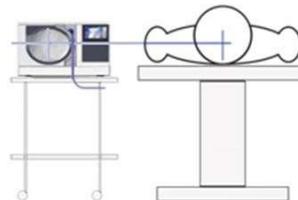

【保管方法及び有効期間等】

<貯蔵・保管方法>

- **・ 高温・多湿・直射日光を避け 6 ~ 70℃の間で保管してください。
- * 当該装置の耐用年数は 5年です。

【主要文献及び文献請求先】

エダップテクノメド株式会社

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

エダップテクノメド株式会社

<製造業者>

Rocamed France

取扱説明書を必ず参照すること