

＊ ＊ 2015 年 7 月 (第 5 版)
＊ 2015 年 4 月 (第 4 版)

届出番号 : 13B1X00133000027

歯科材料 (09) 歯科用研削材料
一般医療機器 歯面研磨材 JMDN 70904000
プロフィーペースト Pro

＊ ＊ 【形状・構造及び原理等】

1. 外観図



＜チューブタイプ＞



＜カップタイプ＞

2. 性状: ペースト状
3. 成分: グリセリン、リン酸二水化ナトリウム、水、他
4. 種類

色	研磨効率 (RDA)	粒度 (μm)
ブルー	250	125
グリーン	170	70
レッド	120	20
イエロー	40	2
パープル	197-50	100-7

【使用目的又は効果】

ペースト状の半固形状の研磨材で、歯科衛生士、歯科医師等が歯面の清掃及び研磨に用いる。

【使用方法等】

1. 本製品を用途により使用する分だけ容器に取り出す。
2. 予防治療ブラシ、歯磨カップ等に少量ずつ付け、歯科用駆動装置及びハンドピース等を用いて低速回転にて使用する。

＊ ＊ 【使用上の注意】

1. カップタイプの製品は患者毎の使い切りである為、他の患者に使用しないこと。
2. 本製品は研磨材なので使い過ぎに注意すること。
3. 本製品を使用する際、飛び散る恐れがあるので、目の損傷を防ぐ為に保護眼鏡等を使用すること。
4. 本製品が万が一目に入った時は、ただちに大量の流水で洗い流した後、眼科医の診断を受けること。

＊ ＊ 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・常温常湿で保管すること。
- ・直射日光が当たる場所には保管しないこと。

2. 有効期間

- ・製造の日から、3年間とする。
- ・使用期限は、容器に記載。

例) 2015-05 → 2015 年 5 月 31 日



＊ ＊ 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社吉田製作所

お問い合わせ先

TEL : 03-3631-2204 (海外事業部)

FAX : 03-3635-1060 (海外事業部)

外国製造業者: シーシーエス ヘルスケア社

【CCS Healthcare AB】スウェーデン

販売業者

クロスフィールド株式会社

TEL : 03-5625-3306

FAX : 03-3635-1060

文書番号 ZZ 添 073-5