

機械器具 21 内臓機能検査用器具

一般医療機器 心電計ケーブル及びリード JMDN 35562010

心電計用 ECG ケーブルセット (GE)

(トランクケーブル 10 リード)

【禁忌・禁止】

併用医療機器

磁気共鳴画像診断装置(MRI)環境下では使用しないこと。
詳細については【使用上の注意】相互作用の項を参照すること。

【形状・構造及び原理等】

形状



製品の外観

構造・構成ユニット

1. 本製品は心電計ケーブル、及びリード線から構成される。

カタログ番号	品名
2104722-001	IEC トランクケーブル 10 リード

2. 使用環境条件

周囲温度: -40~70℃

相対湿度: 10~95%

作動・動作原理

本製品は ECG リード、及び ECG 電極を共に用いて、被検者の心電図信号を主として導出する。
診療所、病院において、心電図を計測し不整脈、虚血性心疾患、心室肥大等の診断の補助に使用する。

【使用目的又は効果】

使用目的

被検者の心電図信号を心電計(ECG)に伝達する装置をいう。本製品は、あるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付ける。

【使用方法等】

使用方法

- ECG ケーブルのリード接続部の電極接続部の端子に心電図電極を装着する。端子の色に注意し、該当する電極の位置に合わせて装着する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 当社指定以外の装置と組み合わせて使用しないこと。

相互作用

併用禁忌(併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
MRI 装置	磁気共鳴画像診断装置(MRI)環境下では使用しないこと	誘導起電力による局所的な発熱で被験者が火傷を負うおそれ

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

周囲温度: -40~70℃

相対湿度: 10~95%

使用期間

1年[設計元データによる]

但し、これは推奨された環境で使用された場合で、使用状況により差異が生じることがある。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

1. 目視による点検

(1) 外観の確認

- 製品の外観に異常がないことを確認すること。
- 損傷や摩耗がないこと。

(2) 清浄性の確認

- 清浄な状態であることを確認すること。
- 本製品使用後は酒精綿で清拭して保管すること。

2. 機能の確認

(1) 製品の正常状態の確認

- 正常状態・正常動作を確認すること。
- 異音、異臭がないことを確認すること。

(2) 安全機能の確認

- 全てのケーブルやコネクタが安全にセットされているか確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

住所: 〒191-8503 東京都日野市旭が丘 4-7-127

お問合せ先: 消耗品受注センター

電話: 0120-187-855

FAX: 042-582-6923

製造業者: シェンチェン ラウンチ エレクトリカル
コリミティッド

(Shenzhen Launch Electrical Co., Ltd.)

国名: 中華人民共和国

社内部品番号: 5826226