

機械器具 21 内臓機能検査用器具
 一般医療機器 心電計ケーブル及びリード JMDN 35562010
心電計用 ECG ケーブルセット (GE)
 (バリューケーブル 10 リード)

【禁忌・禁止】**併用医療機器**

磁気共鳴画像診断装置(MRI)環境下では使用しないこと。
 詳細については【使用上の注意】相互作用の項を参照すること。

【形状・構造及び原理等】**形状**

2104726-001



2104727-001



製品の外観

構造・構成ユニット

1. 本製品は心電計ケーブル、及びリード線から構成される。

カタログ番号	製品概要
2104726-001	バナナプラグ式 IEC バリューケーブル 10 リード
2104727-001	バナナプラグ式 AHA バリューケーブル 10 リード

2. 使用環境条件

周囲温度： -40～70℃
 相対湿度： 10～95%

作動・動作原理


ECG 電極、ECG リード、ECG ケーブルを用いて、不整脈、虚血性心疾患、心室肥大の診断の補助に使用する心電図を計測するために、患者の心電図信号を導出する。

【使用目的又は効果】**使用目的**

患者の心電図信号を心電計(ECG)に伝達する装置をいう。本製品は、あるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付ける。

【使用方法等】**使用方法**

1. 当社製心電計に ECG ケーブルを取り付けるには、コネクタ位置を確認し、しっかりと確実に接続する。
2. ECG ケーブルのリード接続部の電極接続部の端子に心電図電極を装着する。
 端子の色に注意し、該当する電極の位置に合わせて装着する。

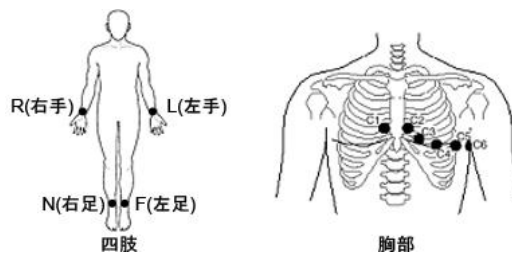

電極装着位置

【使用上の注意】**重要な基本的注意**

- ・ 当社指定以外の装置と組み合わせて使用しないこと。

相互作用**併用禁忌(併用しないこと)**

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
MRI 装置	磁気共鳴画像診断装置(MRI)環境下では使用しないこと	誘導起電力による局所的な発熱で被験者が火傷を負うおそれ

【保管方法及び有効期間等】**保管方法**

周囲温度： -40～70℃
 相対湿度： 10～95%(結露なきこと)

使用期間

1 年[設計元データによる]
 但し、これは推奨された環境で使用された場合で、使用状況により差異が生じることがある。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

1. 目視による点検
 - (1) 外観の確認
 - ・製品の外観に異常がないことを確認すること。
 - ・損傷や摩耗がないこと。
 - (2) 清浄性の確認
 - ・清浄な状態であることを確認すること。
 - ・本製品使用後は酒精綿で清拭して保管すること。
2. 機能の確認
 - (1) 製品の正常状態の確認
 - ・正常状態・正常動作を確認すること。
 - ・異音、異臭がないことを確認すること。
 - (2) 安全機能の確認
 - ・全てのケーブルやコネクタが安全にセットされているか確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

住所： 〒191-8503 東京都日野市旭が丘 4-7-127

お問い合わせ先： 消耗品受注センター
電話： 0120-187-855
FAX： 042-582-6923

製造業者： シェンチェン ラウンチ エレクトリカル
コリミティッド
(Shenzhen Launch Electrical Co., Ltd.)

国名： 中華人民共和国

社内部品番号： 5826239