

機械器具 21 内臓機能検査用器具
一般医療機器 心電計ケーブル及びリード JMDN 35562010

ECG ケーブルコネクタ (GE)

(ワイドマウスアダプタクリップ)

【禁忌・禁止】

併用医療機器

磁気共鳴画像診断装置(MRI)環境下では使用しないこと。
詳細については【使用上の注意】相互作用の項を参照すること。

【形状・構造及び原理等】

形状



製品の外観

・本製品は電極接続部、及びバナナプラグ接続部からなるECG(心電図)測定用のコネクタである。

カタログ番号	品名
2104729-001	アダプタクリップ、ワイドマウスクリップ、14個

作動・動作原理

本製品は心電計等の ECG 測定用コネクタである。
本製品と共に ECG リードワイヤーセット、及び ECG 電極を用いて患者の心電図信号を主として心電計に伝達する。
診療所、病院において心電図を計測し不整脈、虚血性心疾患、心室肥大等の診断の補助に使用する。

【使用目的又は効果】

使用目的

患者の心電図信号を心電計(ECG)に伝達する装置をいう。
本製品はあるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付ける。

【使用方法等】

使用方法

- 電極を貼る部分を剪毛後、患者皮膚を清拭し乾燥させる。
- リード線のバナナプラグを、バナナプラグ接続部に装着する。
- 患者の胸部の正しい位置に電極を貼り、バナナプラグの数字並びにアルファベットに注意して、該当する電極の位置に合わせて接続する。
スナップ電極については、本品底面の凹みに電極の突起をはめ、タブ電極については本品のクリップ部分ではさむ。
- 心電図の計測が終了したら、アダプタを電極から取り外す。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・本製品を液体に触れさせないこと。

[クリップが錆びるなどの損傷のおそれがあるため]

相互作用

併用禁忌(併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
MRI 装置	磁気共鳴画像診断装置(MRI)環境下では使用しないこと	誘導起電力による局所的な発熱で被験者が火傷を負うおそれ

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

周囲温度： -40～70℃
相対湿度： 10～95%(結露なきこと)

使用期間

1年[設計元データによる]
但し、これは推奨された環境で使用された場合で、使用状況により差異が生じることがある。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- 目視による点検
 - 外観の確認
 - ・製品の外観に異常がないことを確認すること。
 - ・損傷や摩耗がないこと。
 - 清浄性の確認
 - ・清浄な状態であることを確認すること。
 - ・オイルや侵襲性の強い薬液・溶剤を使用しないこと。
 - ・清潔な布、又はガーゼを以下の適切な洗浄溶液に浸し、すべての露出面を拭くこと。
10%の次亜鉛素酸ナトリウム(漂白剤)水溶液
 - ・清潔な布、又はガーゼを滅菌、又は蒸留水に浸し、すべての露出面を拭くこと。
 - ・すべての露出面を清潔な乾いた布、又はガーゼパッドで拭いて乾かすこと。
 - ・代替の物質や方法を用いると、製品に損傷を加える可能性があるため使用しないこと。
- 機能の確認
 - ・正常状態・正常動作を確認すること。
- 安全機能の確認
 - ・全てのケーブルやコネクタが安全にセットされているか確認すること。

取扱説明書を必ずご参照ください。

5826010

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

住所： 〒191-8503 東京都日野市旭が丘 4-7-127

お問い合わせ先： 消耗品受注センター

電話： 0120-187-855

FAX： 042-582-6923

製造業者： シェンチェン ラウンチ エレクトリカル
コリミティッド

(Shenzhen Launch Electrical Co., Ltd.)

国名： 中華人民共和国

社内部品番号： 5826010

取扱説明書を必ずご参照ください。