

スティフネック セレクト

再使用禁止

【禁忌・禁止】


- 再使用禁止
- 患者に装着したままサイズを調節しないこと。

2. サイズの合わないものは使用しないこと。大き過ぎると患者の頸椎が過度に伸展されることがあり、小さ過ぎるとしっかり固定できません。

【形状・構造及び原理等】

<各部の名称>

写真は成人用

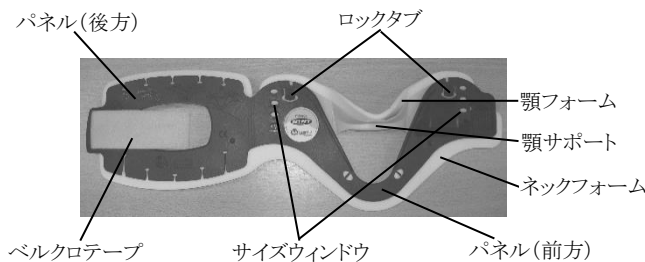

<寸法>

パネル

成人用: 564mm × 175mm (許容差±5%)

小児用: 480mm × 140mm (許容差±5%)

<体に接触する部分の原材料>

ネックフォーム: ポリエチレン

顎フォーム: ポリエチレン

【使用目的又は効果】

救急現場において頸椎損傷が疑われる患者の頸部を素早く固定し、搬送時の損傷拡大を防止します。

【使用方法等】

詳細については、取扱説明書をご参照下さい。

1. 一人が患者の頭部を正中中間位（ニュートラルポジション）で保持し、もう一人が肩から顎までの長さを指の本数で計測します。なお、患者の頭部は装着している間も常に両手で保持し続けて下さい。
2. 計測した長さに基づき、適切なサイズウィンドウを選択します。選択した位置に顎サポートを調節し、左右のロックタブを押して固定します。
3. 装着しやすいように、予めパネルを変形させます。
4. 顎サポートを患者の下顎に当てます。
 - (1) 座位・立位の場合
患者の前胸壁を滑らすようにして、顎サポートを下顎に乗せます。サイズが合わない場合は、取り外してサイズを合わせてから当て直して下さい。
 - (2) 仰臥位の場合
パネル(後方)を首の後ろに滑り込ませてから、顎サポートを下顎に当てて下さい。
5. パネル(後方)を後頭部に巻き付けて、ベルクロテープをしっかりと留めます。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 脊椎の損傷が疑われる場合は、頸部固定だけでなく脊椎全体の固定を行うこと。

取扱説明書を必ずご参照下さい。