

## Uコネクターロングチューブ

再使用禁止

### 【警告】


1. 本品はJ-VAC\* ドレナージシステムのブレイクシリコンドレイン（以下、ドレイン）及びサクシヨンリザーバー（以下、リザーバー）としっかりと接続し、リザーバー作動時には、必ず吸引が行なわれていることを確認すること。  
[閉鎖型吸引ドレナージシステムは常に吸引が維持されていることが必要であり、接続が不十分であるとエアリーク等を生じる可能性があるため。]
2. 本品と先の尖った刃のある器具とを接触させないこと。または鈍器との取扱いは十分に注意すること。  
[本品のチューブ部分は中空構造であり、鋭利なものに触れたり、ミルキングローラー等での圧搾や過度の圧迫によって、切れたり裂けたりする可能性があるため。]
3. 本品を縫合したり切込みを入れたりしないこと。  
[本品の破損を引き起こす恐れがあるため。]

### 【禁忌・禁止】

1. 本品を使用目的以外には使用しないこと。
- ※2. 再使用、再滅菌禁止。
3. 本品は、J-VAC\* ドレナージシステム以外の医療機器と併用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

本品は、チューブとその両端に附属するUコネクターおよびアダプターからなる。本品のUコネクターはJ-VAC\* ドレナージシステム（医療機器承認番号：20200BZY00540000）のドレインと、またアダプターはJ-VAC\* ドレナージシステムのリザーバーとそれぞれ接続できるよう設計されている。

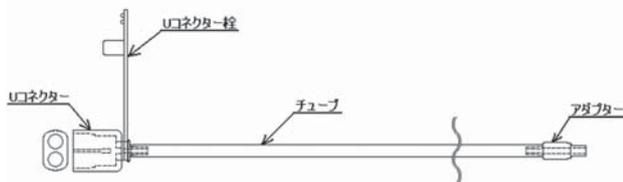

材質

1. チューブ、Uコネクター、アダプター：ポリ塩化ビニル樹脂

※※2. Uコネクター栓：スチレン系熱可塑性エラストマー

### 【使用目的、効能又は効果】

本品は、J-VAC\* ドレナージシステム（医療機器承認番号：20200BZY00540000）のドレインとリザーバー間を延長するために接続し、排液するために使用する柔軟性のあるプラスチック製のチューブである。

### 【品目仕様等】

1. 製品機能  
チューブはつまり等なく液（精製水等）を流す。
2. 接続強度  
本品の各接続部位の接続強度：49N以上

接続部位	接続強度
Uコネクターとチューブ	49N以上
アダプターとチューブ	49N以上

3. 無菌性保証水準：10<sup>6</sup>

### 【操作方法又は使用方法等】

1. 留置したドレインアダプターと本品のUコネクターを接続する。
2. Uコネクターには1本または2本のドレインが接続可能である。接続するドレインが1本の場合は、ドレインが接続されていない方のUコネクターの穴にUコネクター栓をしっかりと差し込む。
3. リザーバーのYコネクターに本品のアダプターを接続する。
4. 閉鎖後、リザーバー底部のフラップを音がするまで静かに上方に折り曲げて、吸引の開始を確認する。

### 【使用上の注意】

#### 1. 重要な基本的注意

- 1) 開封前に包装に破れ、汚れがないことを確認してから使用すること。
- 2) 汚染に十分注意して包装内から取り出すこと。
- 3) 本品に傷、ヒビ、変形、破損、汚れを確認した場合は使用しないこと。
- 4) 接続するUコネクター、Uコネクター栓、アダプターは抜けないようにしっかりと接続すること。
- 5) ドレイン及びリザーバーを接続し吸引を開始したとき、接続部からの液漏れが生じた場合、若しくは接続部が外れた場合は、直ちに使用を中止すること。
- 6) 本品はJ-VAC\* ドレナージシステムのドレインとリザーバーの間に接続して使用すること。
- 7) 本品は1回限りの使用とし、開封後1度使ったものを再使用しないこと。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵方法・保管方法  
高温、多湿、直射日光及び水ぬれを避けて室温で保管すること。
2. 使用の期限
  - 1) 使用期限は製品の包装に表示されている。（自己認証（当社データ）による。）
  - 2) 使用期限を過ぎたもの及び開封して使用しなかったものは廃棄し使用しないこと。

### 【包装】

1箱 10個入り

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：ジョンソン・エンド・ジョンソン 株式会社

〒101-0065 東京都千代田区西神田3丁目5番2号

TEL：03-4411-7902

緊急連絡先：上記電話番号に連絡のこと。

製造業者：株式会社カナエ

\* 商標

