

機械器具 (51) 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ (JMDNコード：16779000)

Uコネクターロングチューブ

再使用禁止

【警告】


1. 本品は適合するドレイン及びリザーバー (【使用方法等】欄、併用する機器参照) としっかりと接続し、リザーバー作動時には、必ず吸引が行なわれていることを確認すること。[閉鎖型吸引ドレナージシステムは常に吸引が維持されていることが必要であり、接続が不十分であるとエアリーク等を生じる可能性があるため。]
2. 本品を鋭利な器具、鈍器で本品を取り扱ったり、接触させたりしないこと。[本品のチューブ部分は中空構造であり、鋭利なものに触れたり、ミルキングローラー等での圧搾や過度の圧迫によって、切れたり裂けたりする可能性があるため。]
3. 本品を縫合したり切りこみを入れたりしないこと。[本品の破損を引き起こす恐れがあるため。]

【禁忌・禁止】

1. 再使用、再滅菌禁止。

【形状・構造及び原理等】

- ** 本品は、チューブとその両端に附属するUコネクターおよびアダプターからなる。本品のUコネクターは「J-VAC® ドレナージシステム」(承認番号：20200BZY00540000) のブレイク®シリコンドレイン又は「ブレイク®シリコンドレイン」(認証番号：218ADBZX00039000) と、またアダプターは「J-VAC® ドレナージシステム」のサクシヨンリザーバー又は「J-VAC® サクシヨンリザーバー」(届出番号：13B1X00204ME0009) とそれぞれ接続できるよう設計されている。

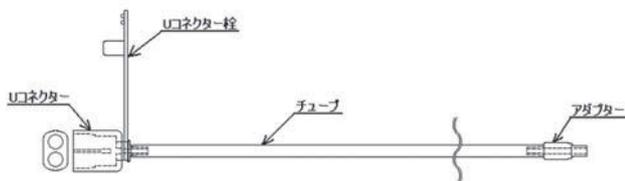

材質

1. チューブ、Uコネクター、アダプター：ポリ塩化ビニル樹脂
2. Uコネクター栓：スチレン系熱可塑性エラストマー

【使用目的又は効果】

- ** 本品は、「J-VAC® ドレナージシステム」(承認番号：20200BZY00540000) のブレイク®シリコンドレイン又は「ブレイク®シリコンドレイン」(認証番号：218ADBZX00039000) と、「J-VAC® ドレナージシステム」のサクシヨンリザーバー又は「J-VAC® サクシヨンリザーバー」(届出番号：13B1X00204ME0009) 間を延長するために接続し、排液するために使用する柔軟性のあるプラスチック製のチューブである。

【使用方法等】

併用する機器

- ** ・ブレイク®シリコンドレイン
販売名：J-VAC® ドレナージ システム
(承認番号：20200BZY00540000)
又は
販売名：ブレイク®シリコンドレイン
(認証番号：218ADBZX00039000)

・サクシヨンリザーバー

販売名：J-VAC® ドレナージ システム
(承認番号：20200BZY00540000)
又は
販売名：J-VAC® サクシヨンリザーバー
(届出番号：13B1X00204ME0009)

1. 留置したドレインアダプターと本品のUコネクターを接続する。
2. Uコネクターには1本または2本のドレインが接続可能である。接続するドレインが1本の場合は、ドレインが接続されていない方のUコネクターの穴にUコネクター栓をしっかりと差し込む。
3. リザーバーのYコネクターに本品のアダプターを接続する。
4. 閉創後、リザーバー底部のフラップを音がするまで静かに上方に折り曲げて、吸引の開始を確認する。

<使用方法等に関する使用上の注意>

- * 1. 接続するUコネクター、Uコネクター栓、アダプターは抜けないようにしっかりと接続すること。
- * 2. ドレイン及びリザーバーを接続し吸引を開始したとき、接続部からの液漏れが生じた場合、若しくは接続部が外れた場合は、直ちに使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
高温、多湿、直射日光及び水ぬれを避けて室温で保管すること。
2. 有効期間
使用の期限は滅菌後3年までである[自己認証による](製品の包装に表示されている)。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- 製造販売業者：
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
* 電話：03-4411-7905

製造業者：

株式会社カナエ