

エスアイエイド

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】


1. 種類・規格

種 類	製品寸法	ラウンドカット
3号	75mm×75mm	有
5号	100mm×100mm	有
7号	100mm×200mm	有
10号	200mm×300mm	無
11号	300mm×550mm	無

2. 形状・構造

本品は創傷、熱傷等の被覆保護及び滲出液の吸収を目的とした創傷被覆保護材である。ゲル層は粘着性を有し、本品の操作性及び貼付中の患部密着性を向上させる。

<模式図>

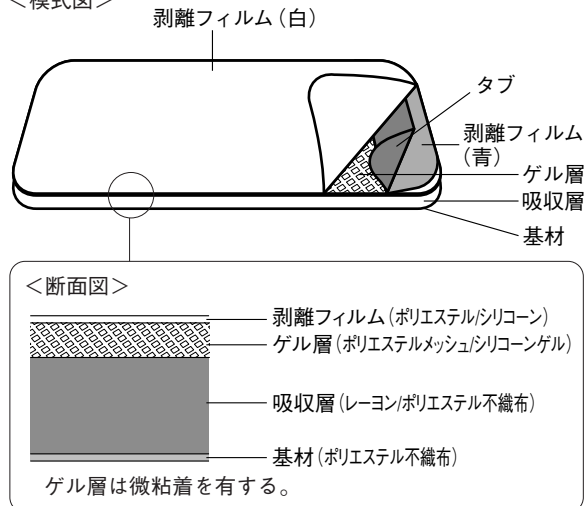

3. 原理

本品は、吸収層とゲル層で構成されており、創傷、熱傷等に貼付することにより被覆保護する。また滲出液、血液等は網目状のゲル層を通過し吸収される。

【品目仕様等】

1. 吸水性

創傷からの滲出液等の吸収機能を有する。

2. 無菌性

無菌性保証水準（SAL）：10⁻⁶

【使用目的、効能又は効果】

創傷、熱傷等の被覆保護及び滲出液の吸収

【操作方法又は使用方法等】

1. 貼付前

- 1) 本品貼付部を清拭、洗浄し、必要に応じて消毒を行います。
- 2) 創周囲を十分乾燥させます。
- 3) 創を十分に覆うことができる、適切なサイズを選択します。

2. 貼付

- 1) 本品の剥離フィルム（白）、剥離フィルム（青）のタブを持ち、貼付面が手が触れないように剥離フィルムを剥がし、創部に貼付します。
- 2) 滲出液が多い場合は、本品または滅菌済みの吸収用ガーゼを重ねても使用できます。
- 3) 粘着テープ、包帯等の適当な手段で本品を固定します。

－注意－

本品は防水機能を有さない。シャワー、入浴をする場合には防水テープ等で本品を固定する。

3. 交換

- 1) 滲出液の量と創の状態を考慮し、必要に応じて交換します。
- 2) 皮膚を押さえながら本品をゆっくりと剥がします。
- 3) 本品が創傷面に固着しているときは、蒸留水または生理食塩水で固着した部分を湿らせ柔らかくしてから剥がします。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品使用中に発赤、びらん、そう痒等の皮膚障害と思われる症状が現れた場合は、本品の使用を中止し、適切な処置を行うこと。
- 2) 創面に臨床的感染、又はそのおそれがある場合は、頻繁に観察し、適切な処置を行うこと。また、全身状態が悪い場合は特に注意して使用すること。[症状を悪化させるおそれがある。]

2. 不具合・有害事象

一般的な創傷被覆・保護材の使用における「不具合・有害事象」

- ・創の感染症状
- ・創傷及び周囲の皮膚障害（表皮剥離、浸軟、浮腫、水疱、発赤、びらん、そう痒、アレルギー、接触性皮膚炎）
- ・固着
- ・壊死組織の増加
- ・疼痛

3. その他の注意

- 1) 滅菌包装が汚損又は破損している場合には使用しないこと。
- 2) 滅菌包装を開封したら直ちに使用すること。
- *3) 植皮部に使用する場合は、注意深く愛護的に除去すること。[本品除去時に移植皮膚が剥がれるおそれがある。]

【貯蔵・保管方法及び使用期限等】

1. 貯蔵保管方法

水濡れ、直射日光、及び高温多湿を避け、室温で保管すること。

2. 使用期限

パッケージに表示（自己認証データによる）

【包装】

種 類	入 数
3号	50枚
5号	50枚
7号	30枚
10号	10枚
11号	5枚

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

1. 製造販売業者

アルケア株式会社
東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階

2. 連絡先

アルケア株式会社
〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階
お客様相談室： ☎ 0120-770175