

機械器具 29 電気手術器  
 一般医療機器 電気手術器用ケーブル及びスイッチ 70657000  
**マイクロスピード フットスイッチ**

**\*【形状・構造及び原理等】**

## 1. 形状



GD662：マイクロスピード EC 用

GD662M：マイクロスピード ユニ用



GD668：マイクロスピード ユニ用



GD671：マイクロスピード ユニ用

## 2. 原理

電動式骨手術器械に接続し、本品のペダルを踏むことでモーターを作動させる。また、モーターの回転スピードはペダルの押し下げられる距離で制御する。

**【使用目的又は効果】**

電動式骨手術器械と、これらに接続し制御する装置との間にて信号等を伝達し、電源を供給し、これにより両者の接続を延長するために用いられるケーブル、スイッチ及びアダプタ等をいう。

**\*\*【使用方法等】**

本品をコントロールユニットに接続し、ペダルを踏み込むことによってモーターの回転スピードを制御する。  
 付属のボタンを押すことでイリゲーションポンプのオン・オフ、正逆回転を切り替える。

**使用方法等に関連する使用上の注意**

- 本器は洗浄・滅菌は出来ない。
- 使用前に必ず本器の状態と機能を確認すること。
- ビー・ブラウンエースクラップ製品のみと組み合わせて使用すること。
- 爆発の危険性のあるエリアでの使用は避けること。
- 持ち上げる際はハンドルを掴んで行うこと。ペダルを掴んで持ち上げると破損する可能性がある。
- 汚れた場合は清拭すること。
- フットスイッチコードの着脱は正しく行い、断線させないようにすること。

**\*\*【保管方法及び有効期間等】**

\* 水濡れ、高温、多湿、日光の当たる場所を避けて保管すること。

**\*\*【保守・点検に係る事項】****使用者による保守点検**

- コントロールユニットと接続し、各機能において正常に器械が作動することを確認すること。
- 使用後は清拭すること。
- 2年に一度、メーカーによるオーバーホールを受けること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

問い合わせ窓口：マーケティング部 TEL (03) 3814-2522

製造元： エースクラップ社、ドイツ

Aesculap AG