


機械器具 29 電気手術器

一般医療機器 電気手術器用ケーブル及びスイッチ 70657000

ELAN 4 エレクトロフットスイッチ**【形状・構造及び原理等】**

1. 形状

GA808

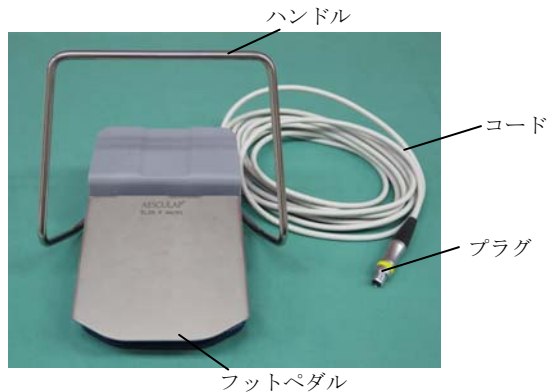

2. 原理

手術用電気機器として使用される自社専用医療機器に接続し、フットペダルを踏み込むことで制御する装置の信号等を伝達し、電源を供給する。

【使用目的又は効果】

手術用電気機器として使用される医療機器と、これらに接続し制御する装置との間にて信号等を伝達し、電源を供給し、これにより両者の接続を延長するために用いられる。

【使用方法等】

➤ 本品は、ビー・ブラウンエスクラップ社製品と組み合わせて使用すること。

1. 使用前の準備

- 1) 自社専用電気機器（以下、コントロールユニットという）（本品に含まない）と本品を準備する。
- 2) コントロールユニットの正面パネルの専用ソケットに本品のコードを接続する。
- 3) コントロールユニットの電源を入れ、モーターケーブル（本品に含まない）を接続する。
- 4) モーターケーブルに任意のモーターハンドピース（本品に含まない）を、モーターハンドピースにツール（本品に含まない）を接続する。

2. 使用方法

- 1) 本品の操作にてコントロールユニットを作動させる。

3. 使用後の処置

- 1) コントロールユニット及び本品の接続を OFF 状態にし、モーターが動かない状態になっていることを確認する。
- 2) 本品をコントロールユニットから取り外す。

使用方法等に関連する使用上の注意

<使用前>

- 使用前に必ず本品の状態と機能を確認すること。

<使用中>

- 爆発の危険性のあるエリアでの使用は避けること。
- 持ち上げる際はハンドルを掴んで行うこと。ペダルを掴んで持ち上げると破損する場合がある。

<使用後>

- 汚れた場合は清拭すること。
- フットスイッチコードのコントロールユニットからの着脱はブラグを保持して行い、コードを断線させないようにすること。

【使用上の注意】

不具合・有害事象

その他の不具合

- コードの断線
- 破損
- 通電不良

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

水のかからないところで、高温、多湿、日光の当たる場所を避けて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検

- 手術使用前に本体と接続し、各機能において正常に本品が作動することを確認すること。
- 使用後は清拭すること。

業者による点検

- 1年に一度、メーカーによるオーバーホールを受けること。

洗浄・消毒（注意事項）

- 洗浄剤、消毒液はステンレススチール、プラスチック、シリコン等に影響の無いものを使用すること。

ペダルの着脱

- ペダルを起こす。
- ペダルを横にスライドさせてヒンジ部のガイドボルトから外す。
- ペダルを上を外す。
- 清拭後は、逆の手順でペダルをセットする。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：ビー・ブラウンエスクラップ株式会社

問い合わせ窓口：マーケティング部 TEL (03) 3814-2522

製造元： エスクラップ社、ドイツ

Aesculap AG