

機械器具 29 電気手術器

一般医療機器 電気手術器用ケーブル及びスイッチ 70657000

C a i m a n シーリングユニット用フットスイッチ**【形状・構造及び原理等】**

1. 形状

GN201



2. 原理

手術用電気機器として使用される医療機器と、これらに接続し制御する装置との間にて信号等を伝達する。

【使用目的又は効果】

手術用電気機器として使用される医療機器と、これらに接続し制御する装置との間にて信号等を伝達し、電源を供給し、これにより両者の接続を延長するために用いられる。

【使用方法等】

➤ 本品は、ビー・ブラウンエースクラップ社製品と組み合わせて使用すること。

1. 使用前の準備

- 1) 自社専用電気機器（シーリングユニット）（本品に含まない）と本品を準備する。
- 2) シーリングユニットの電源を入れる。
- 3) シーリングユニットの正面パネルの専用ソケットに本品のコードを接続する。
- 4) シーリングユニットに自社専用デバイス（シーリングデバイス）（本品に含まない）を接続する。

2. 使用方法

- 1) 本品もしくはシーリングデバイスの操作により、シーリングユニットを作動させる。

3. 使用後の処置

- 1) 本品をシーリングユニットから取り外す。
- 2) シーリングユニットの添付文書に従い、シーリングユニットの電源をオフにする。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 使用前

- 使用前に必ず本品の状態と機能を確認すること。

2. 使用中

- 本品を引火性の高いガスや爆発性のガス（酸素、麻酔ガス、可燃性物質等）の近くで使用しないこと。
- 持ち上げる際はハンドルを掴んで行うこと。ペダルを掴んで持ち上げると破損する場合がある。

3. 使用後

- 使用後は清拭すること。
- 本品のコードをシーリングユニットから着脱する際は、プラグを保持して行き、コードを断線させないようにすること。

【使用上の注意】**不具合・有害事象**

以下の不具合が発現する可能性がある。

[その他の不具合]

- コードの断線
- 破損
- 通電不良
- 不適切な取り扱いによる破損、分解

【保管方法及び有効期間等】**保管方法**

水のかからないところで、高温、多湿、日光の当たる場所を避けて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検

- 手術使用前に本体と接続し、各機能において正常に本品が作動することを確認すること。

2. 業者による点検

- 1年に一度、メーカーによるオーバーホールを受けること。

3. 洗浄・消毒（注意事項）

- 洗浄剤、消毒液はステンレススチール、プラスチック、シリコン等に影響の無いものを使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

問い合わせ窓口：マーケティング部 TEL (03) 3814-2522

製造元：エースクラップ社、ドイツ

Aesculap AG