

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 薬液調整用器具 70381000
フィルターストロ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

***【形状・構造及び原理等】**

<構造図（代表例）>

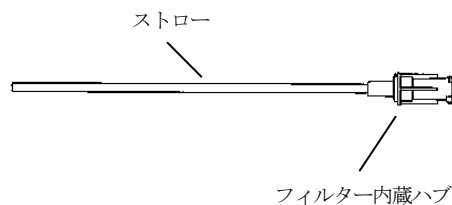

<材質>

- ・ストロー：ポリ塩化ビニル（DEHPフリー）

【使用目的又は効果】

薬液を容器から他の薬液容器に移すために用いる。

【使用方法等】

- ・汚染に十分に注意した上で包装内から取りだし、シリンジの先端に接続する。

***【使用上の注意】**

<不具合・有害事象>

以下の不具合が発現する可能性がある。

[重大な不具合]

- ・製品の変形、破損、ひび割れ等
- ・液漏れ

【保管方法及び有効期間等】**1. 保管方法**

- ・水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて保管すること。

2. 使用期間

- ・使用期限は外箱を参照のこと。〔自己認証による。〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

問い合わせ窓口：マーケティング部 TEL (03) 3814-2704

製造元：ビー・ブラウン メディカル社 アメリカ

B.Braun Medical Inc. USA