

機械器具 74 医薬品注入器  
一般医療機器 薬液調整用器具 70381000  
**マルチアド分注システム**  
(MAC1001)

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**

- ・ 再使用禁止

## 2. 使用期間

使用期限は外箱に記載。〔自己認証による。〕

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：ビー・ブラウンエースクラップ株式会社


問い合わせ窓口：マーケティング部 TEL (03) 3814-2704

製造元：ビー・ブラウン メディカル社 アメリカ

B.Braun Medical Inc. USA

**【形状・構造及び原理等】**

<構造図（代表例）>

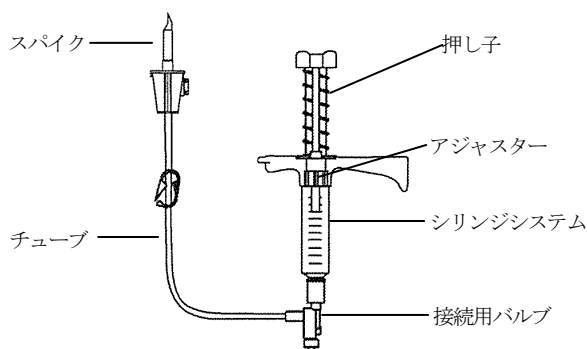

## &lt;材質&gt;

- ・ チューブ：ポリ塩化ビニル

**【使用目的又は効果】**

薬液を容器から他の薬液容器に移すために用いる。

**【使用方法等】**

1. 汚染に十分注意した上で滅菌包装内から取り出す。
2. シリンジシステムの先端のキャップをとり、接続用バルブとしっかりと接続をする。
3. チューブの先のスパイクを薬液ボトルにしっかりと差し込む。
4. シリンジシステムを垂直にしながら、押し子进行操作しエアを抜く。
5. 押し子の横のアジャスター进行操作し、吸引量の設定をする。
6. 接続用バルブへ金属針等を接続し、移動する側の薬剤容器へ接続する。
7. 押し子进行操作し、薬液を移動する。

**【使用上の注意】**

<不具合・有害事象>

以下の不具合が発現する可能性がある。

[重大な不具合]

- ・ 製品の変形、破損、ひび割れ等
- ・ スパイクの折れや曲げ
- ・ 液漏れ

**【保管方法及び有効期間等】**

## 1. 保管方法

- ・ 水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて保管すること。