

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 薬液調整用器具 70381000
ディスペンシングピン
(DP-3500L)


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

<構造図（代表例）>

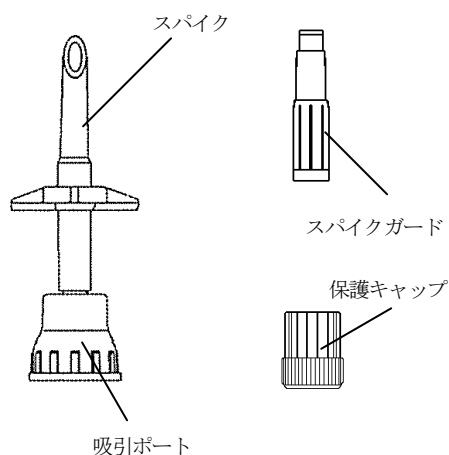

<材質>

- ・ 本体：ABS 樹脂

【使用目的又は効果】

薬液を容器から他の薬液容器に移すために使用する。

【使用方法等】

1. 汚染に十分注意した上で包装内から本品を取りだし、本品のスパイクガードを取り外します。
2. スパイク部を輸液バックもしくはプラスチックボトルのゴム栓部に穿刺します。
3. 吸引ポートの保護キャップをとり、接続部の汚染に注意しながら、清潔なシリンジを吸引ポートに接続します。
4. 薬液の容器を逆さまにして、必要量の薬液を吸引します。
5. シリンジを取り外します。シリンジを取り外すと自動的に吸引ポートのバルブが閉じます。
6. 消毒用アルコールなどで吸引ポート部を消毒して下さい。
7. 使用後は、滅菌済みの新しい保護キャップを吸引ポート部に接続します。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 吸引ポートの内側は指などで絶対に触らないこと。
2. 本デバイスは、複数の輸液バックまたはプラスチックボトルでの使用を避け、輸液バック、プラスチックボトル毎に、新品を使用すること。
3. 24 時間以内でのデバイス交換を推奨する。
4. 金属針等を使用して吸引ポートに接続し薬液を吸引しないこと。
5. 本品を患者へ接続されている輸液ラインに、直接接続して使用しないこと。

【使用上の注意】

<不具合・有害事象>

以下の不具合が発現する可能性がある。

[重大な不具合]

- ・ 製品の変形、破損、ひび割れ等
- ・ 液漏れ

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
 - ・ 水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて保管すること。
2. 使用期間
 - ・ 使用期限は外箱に記載。〔自己認証による。〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：ビー・ブラウンエースクラップ株式会社
問い合わせ窓口：マーケティング部 TEL (03) 3814-2704
製造元：ビー・ブラウン メディカル社 アメリカ
B.Braun Medical Inc.