

脊椎用 ピンセット

【禁忌・禁止】

- 1)本品を曲げたり、切削等の二次的加工(改造)を絶対にしないで下さい。〔破損等の原因となります。〕
- 2)本品を清掃する際には、必ず中性洗剤をご使用下さい。〔酸性、又はアルカリ性の洗剤は、本品を腐蝕させるおそれがあります。〕
- 3)使用時に必要以上の力を加えないで下さい。〔破損の原因となります。〕


【形状・構造及び原理等】

1. 材質:

ステンレス鋼

2. 形状又は構造

カタログNo.: 3180 脊椎用 ピンセット:全長 19 cm

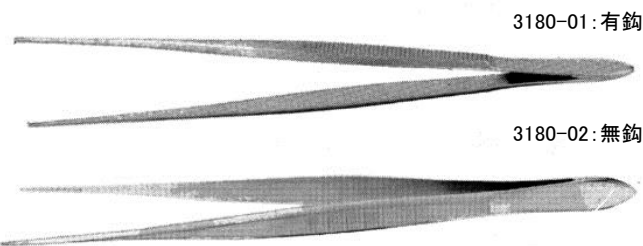

3. 原理

本品は、保持する物体を閉じて挟む2枚の刃を持つ。有鉤、無鉤の2種類が用意されている。

【使用目的又は効果】

軟部組織の把持操作に用いる。脊椎手術用として、深部への到達を容易にするため、全長が長く、さらに先端部の弾性強度を高めている。

【使用方法等】

先端部分にて軟部組織を把持操作する。

本品は未滅菌のため使用に際しては必ず洗浄し、下記の条件又は医療機関により確認、検証された滅菌条件において滅菌を行って下さい。

滅菌方法:高圧蒸気滅菌

滅菌条件:温度 121℃以上、時間 30 分

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 1) 使用用途に応じた形状のものを選定し、軟部組織の把持以外の目的で使用しないで下さい。また、折損や曲がりなどの原因になるので、使用時に必要以上の力を加えないで下さい。
- 2) 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等を、直ちに洗浄、除去して下さい。
- 3) 塩素系及びヨウ素系の消毒液、腐蝕の原因になるので、できるだけ使用を避け、それらが付着した場合は直ちに洗浄して下さい。

＜不具合・有害事象＞

本器の使用により、以下のような不具合・有害事象がおこる可能性があります。

ります。

- 1) 本品の適切な洗浄、滅菌を行わなかったために起こる感染。
- 2) 必要以上の力を加えたことによる、器具の変形や破損。破損した器具の破片が術野に残留するなど。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- 1) 保管にあたっては、洗浄後、腐蝕を防ぐために必ず乾燥して下さい。
- 2) 滅菌済みのものを保管するにあたっては、再汚染を防ぐために清潔な場所に保管するとともに、有効保管期間の管理をして下さい。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織片などの汚れを除去し、感染防止のために洗浄して下さい。汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適切な濃度で使用して下さい。
- 2) 洗浄装置(超音波洗浄器、ウォッシャー ディスインフェクター等)で洗浄する際には、刃物が接触して先端を破損することがないように注意して下さい。
- 3) 洗剤の残留がないよう、十分にすすぎをして下さい。仕上げすすぎには、浄化水(ろ過、蒸留、脱イオン化水)を用いることを推奨します。
- 4) 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥して下さい。
- 5) 洗浄後、汚れ、キズ、サビ、曲がりがないか、また先端部のズレや変形など異常がないか、点検・確認して下さい。異常を認めた場合には、直ちに修理調整を行って下さい。
- 6) 強アルカリ性、または強酸性の洗剤や消毒液は、器具を腐蝕させるおそれがあるので、絶対に使用を避けて下さい。中性洗剤の使用を推奨します。また、金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は、器具の表面が損傷するおそれがあるので、汚れ除去及び洗浄の際には使用しないで下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社 根本商会