


【禁忌・禁止】

1. 患者の皮膚等の敏感な方は、本品を使用することを避けること。[本品の材質により、アレルギー、皮膚炎を誘発する場合があります。]
2. 単回使用タイプは、再使用禁止です。

【形状、構造及び原理】

本品は単回使用タイプ（再使用禁止）と再使用可能タイプがある。

【寸法】

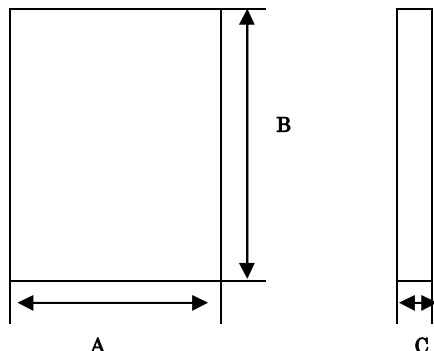

単回使用タイプ（再使用禁止）

型番：

単位：cm


種類	A	B	C
MTCB403	30	30	0.3
MTCB405	30	30	0.5
MTCB410	30	30	1.0
MTCB415	30	30	1.5
MTCB420	30	30	2.0
MTCB430	30	30	3.0
MTCB440	30	30	4.0
MTCB405CE	30	30	0.5
MTCB410CE	30	30	1.0
MTCB403CE	30	30	0.3
MTCB440CE	30	30	4.0

再使用可能タイプ

型番：

単位：cm

種類	A	B	C
MTCB403S	30	30	0.3
MTCB405S	30	30	0.5
MTCB410S	30	30	1.0
MTCB415S	30	30	1.5
MTCB420S	30	30	2.0
MTCB430S	30	30	3.0
MTCB455S	15	15	0.5
MTCB450S	15	15	1.0
MTCB465S	15	15	1.5
MTCB470S	15	15	2.0
MTCB404010S	40	40	1.0
MTCB305005S	30	50	0.5
MTCB305010S	30	50	1.0
MTCB404005S	40	40	0.5
MTVIP169PK	—	—	—

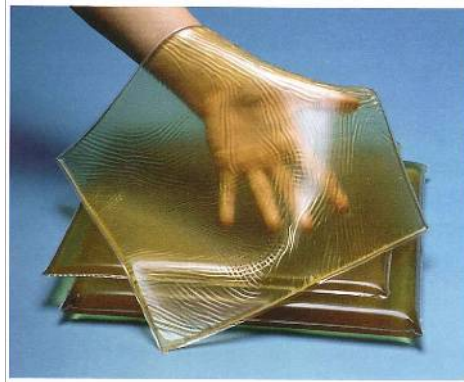

仕様

組織等価物質ゲル

性質：固体

密度：1.03g/mL

* 【使用目的又は効果】

本品は患者の皮膚表面近くの標的部位に対する放射線治療時に、本品の組織等価物質ゲルを用いたビルドアップ効果により最大照射線量（dmax）を皮膚表面近くに到達させることで、周囲の正常組織を過剰な線量照射（または不必要な放射線）から防護することを可能とします。

* 【使用方法等】

本品を使用する前に、同封されている外国製造業者の取扱説明書（リファレンスガイド）をよくお読み下さい。

1. 本品を置く場所を決定し、照射する範囲に本品を置く。
2. 患者の皮膚に向けて本品を整列させる。
3. 再使用可能タイプは、患者に使用する前に下記のいずれかの洗浄液を使用して洗浄する。
 - ・中性洗剤と水の洗浄剤
 - ・漂白剤と水（1：10の希釈）の洗浄剤
 - ・医療施設内で推奨されるアルコール系洗浄剤

【使用上の注意】

【使用注意】

1. 患者を治療する前に、治療角度及び患者の体力の状態全てを確認して下さい。

【重要な基本的注意】

1. 本品を蒸気滅菌しないこと。
2. 使用しない場合は、再度、洗浄を行うこと。
3. 本品の使用中は次の事項に注意すること。
 - ① 本品全般及び患者に異常のないことを絶えず監視すること。
 - ② 本品及び患者に異常が発見された場合は、患者に安全な状態で本品の使用を止める等、適切な措置を講ずること。

* 【保管方法及び有効機関等】

本品の保管場所については次の事項に注意すること。

- ① 水のかからないこと。
- ② 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、黄分を含んだ空気等により悪影響の生ずる恐れがないこと。
- ③ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

【取扱い上の注意】

1. 本品を廃棄する時は「廃棄物処理に関する法律」に従い処理して下さい。
本品に血液、体液等が付着している可能性がある場合は、「感染性廃棄物」として廃棄することを推奨いたします。又は、本品に血

液、体液等が付着の可能性が無く、患者へご使用された場合は、「医療廃棄物」として廃棄することを推奨いたします。

2. 次の事項を、お守り下さい。

①医療機器を譲渡販売する場合は、譲渡販売前に必ず弊社へ連絡を御願いたします。

これは、弊社に連絡を頂けない場合、弊社から譲渡販売先に、当該医療機器の品質情報のお知らせ、及び、回収、不具合等を含む安全性情報のご提供が出来ない場合が御座いますので、譲渡販売前に必ず弊社へ連絡を御願いたします。

②そして、当該医療機器の譲渡販売先には、医師の在籍が必要になります。

③医師以外の者へ、譲渡販売することを避けて頂きたく、また、譲渡販売の為に、医師以外の者に広告、売買勧誘等も避けて頂きたく御願申し上げます。

【保守・点検に係る事項】

1. 暫く使用しなかった本品を使用する時は、必ず使用前に点検してください。

3. 本品の再使用可能タイプです。患者に使用する前に下記のいずれかの洗浄液を使用して洗浄すること。

- ・中性洗剤と水の洗浄剤
- ・漂白剤と水（1：10の希釈）の洗浄剤
- ・医療施設内で推奨されるアルコール系洗浄剤

* **【製造業者又は製造販売業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者

東洋メディック株式会社

〒162-0813 東京都新宿区東五軒町 2-13

電話：03-3268-0021

FAX：03-3268-0264

製造業者：CIVCO Medical Solutions.

シブコ メディカル ソリューションズ (アメリカ)