

器 (11) 放射線障害防護用器具
一般医療機器 放射線防護用掛布 (38357000)

ボラス材 MEDTEC


【禁忌・禁止】

1. 患者の皮膚等の敏感な方は、本品を使用することを避けること。[本品の材質によりアレルギー、皮膚炎を誘発する場合があります。]
2. 単回使用タイプは、再使用禁止です。

*【形状・構造及び原理】

本品には、天然ゴムラテックス成分は含まれておりません。
本品は単回使用タイプ (異なる患者での再使用禁止) と再使用可能タイプがある。

【寸法】

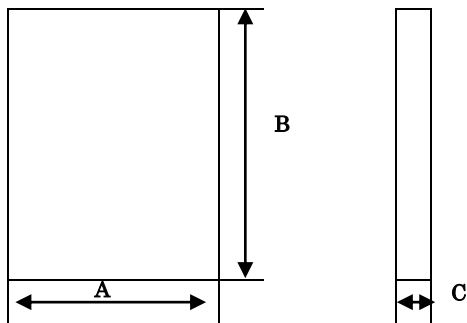


① 単回使用タイプ (異なる患者での再使用禁止) 単位: cm

型番	A	B	C
32052	30	30	0.5
32102	30	30	1.0
32152	30	30	1.5
32202	30	30	2.0
MTCB403	30	30	0.3
MTCB405	30	30	0.5
MTCB410	30	30	1.0
MTCB415	30	30	1.5
MTCB420	30	30	2.0
MTCB405CE	30	30	0.5
MTCB410CE	30	30	1.0
MTCB403CE	30	30	0.3

② 再使用可能タイプ 単位: cm

型番	A	B	C
MTCB405S	30	30	0.5
MTCB410S	30	30	1.0
MTCB455S	15	15	0.5
MTCB450S	15	15	1.0
MTCB404005S	40	40	0.5
MTCB404010S	40	40	1.0
MTCB403S	30	30	0.3
MTCB415S	30	30	1.5
MTCB420S	30	30	2.0
MTCB430S	30	30	3.0
MTCB465S	15	15	1.5
MTCB470S	15	15	2.0
MTVIP169PK	—	—	—
MTCB305005S	30	30	0.5
MTCB305010S	30	50	1.0
31033030	30	30	0.3
31052	30	30	0.5
31102	30	30	1.0
31152	30	30	1.5
31202	30	30	2.0
31051	15	15	0.5
31101	15	15	1.0
31151	15	15	1.5
31104040	40	40	1.0
31053050	30	50	0.5

型番	A	B	C
31103050	30	50	1.0
31054040	40	40	0.5

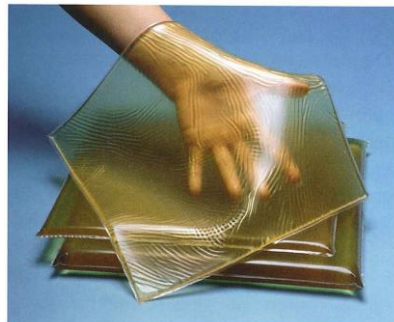

仕様
組織等価物質ゲル
性質: 固体
密度: 1.03g/mL

【使用目的又は効果】

本品は患者の皮膚表面近くの標的部位に対する放射線治療時に、本品の組織等価物質ゲルを用いたビルドアップ効果により最大照射線量 (dmax) を皮膚表面近くに到達させることで、周囲の正常組織を過剰な線量照射 (または不必要な放射線) から防護することを可能とします。

【使用方法等】

本品を使用する前に、同封されている外国製造業者の取扱説明書 (リファレンスガイド) をよくお読み下さい。

1. 本品を置く場所を決定し、照射する範囲に本品を置く。
2. 患者の皮膚に向けて本品を整理させる。

*【使用上の注意】

【使用注意】

1. 患者を治療する前に、治療角度及び患者の体力の状態全てを確認して下さい。

*【重要な基本的注意】

1. 単回使用タイプは、複数の患者に対し再使用することはできない。
1患者での使用が終了した場合は廃棄すること。
2. 本品 (ボラス材 MEDTEC) についてはMR 適合性に関する試験を実施していない。
3. 本品を蒸気滅菌しないこと。
4. 使用しない場合は、再度、洗浄を行うこと。
5. 本品の使用中は次の事項に注意すること。
① 本品全般及び患者に異常のないことを絶えず監視すること。
② 本品及び患者に異常が発見された場合は、患者に安全な状態で本品の使用を止める等、適切な措置を講ずること。
6. 本品に明らかに損傷が見られる場合は、本品の使用を中止すること。
また、再使用可能タイプが汚れており、清掃などをしてこれ以上きれいにならない場合は、使用を中止すること。(但し、本品の耐用年数は、本品の使用方法によって非常に影響されます。また、本品の保管方法等に関しても、当添付文書及び製造業者のリファレンスマニュアル(取扱説明書)に従って使用すること。)

【保管方法及び有効期間等】

本品の保管場所については次の事項に注意すること。

1. 水のかからないこと。
2. 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、黄分を含んだ空気等により悪影響の生ずる恐れがないこと。
3. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 暫く使用しなかった本品を使用する時は、必ず使用前に点検してください。
2. 清掃
再使用可能タイプは、毎回使用する毎、清潔で柔らかい布又はワイフ等に、殺菌消毒剤 (塩化ベンザルコニウムアルコール、消毒用ア

ルコール等)を湿らせて、本品の表面を拭き清掃をしてください。
(ご使用される洗浄剤及び殺菌剤の使用説明書等に記載された方法に従って下さい。)

患者の体液等が本品に付着された恐れが場合は、清潔で柔らかい布又はワイフ等に、タンパク質分解酵素が含まれた洗浄剤を湿らせて、体液等の付着部分を拭き清掃をしてください。

但し、化学薬品(アンモニア等が含まれる薬品、石油系薬品(トルエン、ラッカ等)が含まれる薬剤、洗浄剤及び殺菌剤等)は使用しないこと。

3. 殺菌：本品は滅菌処理をしないこと。

※ 【製造業者又は製造販売業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

東洋メディック株式会社

電話：03-6825-3003

製造業者：

Medtec LLC dba CIVCO Radiotherapy

メドテック エルエルシー ディビーエイ

シブコ ラジオセラピー (アメリカ)