



ヴィッカーズ シザーズ

【禁忌・禁止】

- ・本製品を曲げ、切削、打刻(刻印)等の二次的加工(改造)をすることは、折損等の原因となるので絶対に行わないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 外観図, 構成

本体: ステンレス鋼



2802-B-2004	Universal Scissors Straight
2802-B-2012	Fine Scissors Straight
2802-B-2020	Fine Scissors Curved
2802-B-2039	Long Scissors Straight
2802-B-2047	Long Scissors Curved

【使用目的又は効果】

手術における術野の切断に使用する。

** 【使用方法等】

上刃と下刃の間に患部・組織を挟み、手持ち部を上下から押し合わせ刃を交差させて切除する。

【使用上の注意】

1. 使用前には必ず洗浄・滅菌(保守・点検に係る事項参照)をすること。
2. 使用目的(手術・処置等の医療行為)以外の目的で使用しないこと。
3. 使用後は付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないように、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
4. 術後は必ず洗浄・滅菌(オートクレーブ等)を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ** 1. 保管にあたっては、保管期間の長短に関わらず乾燥すること。
- ** 2. 滅菌済のものを保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管するとともに、有効保管期間の管理をすること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く付着している血液、体液、組織等の汚物を除去し、職業感染防止のために洗浄・乾燥すること。
2. 汚物除去に用いる洗浄液は適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
3. 洗浄装置(超音波洗浄装置、ウォッシャーディスインフェクタ等)で洗浄するときには、先端同士が接触しあって損傷することがないように注意すること。
4. 洗浄液の残留がないよう十分にすすぐこと。すすぎには浄化水(滅菌蒸留水等)を用いることを推奨する。
5. 洗浄後は必ず乾燥すること。
6. 使用(滅菌)前に、汚れ、傷、曲がり、損傷、可動部の動き等に異常がないか確認すること。
7. 金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は器具の表面が損傷するので汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業社:

株式会社キーラー・アンド・ワイナー

TEL:03-3815-7787

2. 製造会社:

- * Ashton Surgical and Ophthalmic Ltd.
(アシュトン社: 英国)

取扱説明書を必ずご参照下さい。