

ヴィッカーズ鑷子



【警告】

- ・本製品を落下させるなどして故障した場合には勝手に分解せずに、すみやかに修理を依頼すること。
- ・改造しないこと。

【禁忌・禁止】

- ・本製品を曲げ、切削、打刻(刻印)等の二次的加工(改造)をすることは、折損等の原因となるので絶対に行わないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状、構造

本体：ステンレス鋼



商 品 名	全 長	先 端 形 状
ユニバーサルリング 鑷子	145 mm	
ファインリング 鑷子	155 mm	
ユニバーサルV字形 鑷子	145 mm	
ロングリング 鑷子 (曲)	205 mm	
ロングリング 鑷子 (直)	205 mm	
ファインV字形 鑷子	155 mm	
ファインプレーン 鑷子	155 mm	

2. 品目仕様等

目視試験 把持部先端が噛み合うか、大きいキズがないか

【使用目的又は効果】

主な用途として組織もしくは治療材料を把持するために用いられる。

【使用方法等】

1. ペンを握る要領で持つ。
2. 手持部分を押しすと、処置部が把持される。離すと、把持部が緩む。

滅菌方法：オートクレーブ、EOG、低温プラズマイずれも可能(時間、温度は院内規定に従うこと。)

【使用上の注意】

1. 使用前に必ず洗浄・滅菌(保守・点検に係る事項参照)をすること。
2. 使用目的(手術・処置等の医療行為)以外の目的で使用しないこと。
3. 使用後は付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
4. 術後は必ず洗浄・滅菌(オートクレーブ等)を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

特別な設定はなし。

【取扱い上の注意】

鉤部分形状保持のため、故意に落下させないこと。
使用後は滅菌のこと

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く付着している血液、体液、組織等の汚物を除去し、職業感染防止のために洗浄・乾燥すること。
2. 汚物除去に用いる洗浄液は適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。
3. 洗浄装置(超音波洗浄装置、ウォッシャーディスインフェクター等)で洗浄するときには、先端同士が接触しあって損傷することがないように注意すること。
4. 洗浄液の残留がないよう十分にすすぐこと。すすぎには浄化水(滅菌蒸留水等)を用いることを推奨する。
5. 洗浄後は必ず乾燥すること。
6. 使用(滅菌)前に、汚れ、傷、曲がり、損傷、可動部の動き等に異常がないか確認すること。
7. 金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は器具の表面が損傷するので汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者
株式会社キラー・アンド・ワイナー
TEL:03-3815-7787

* 製造業者
Ashton Surgical and Ophthalmic Ltd
(アシュトン社: 英国)