

器01 手術台及び治療台  
一般医療機器 手術台アクセサリ (70469000)


## 側部支持器（側部パッド）

### 【警告】

患者の任意の体位を確保するためにアクセサリで支持するときは常に患者の状態を監視すること。[長時間の体位は神経麻痺や褥瘡の原因となることがあります]


### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 外観

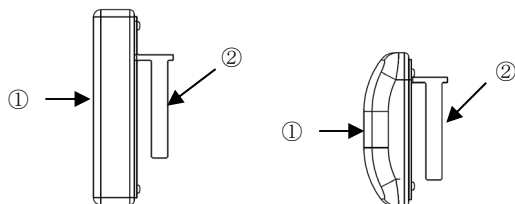

レクタングルフラット

スクエアラウンド

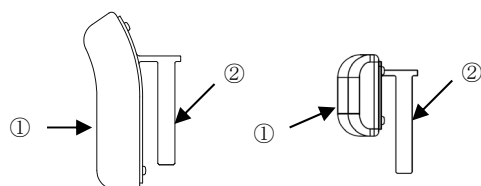

若杉

ミニスクエアラウンド

- ① パッド  
② 取り付け軸

| 商品コード     | 商品名              |
|-----------|------------------|
| 08-080-60 | 側部パッド レクタングルフラット |
| 08-080-61 | 側部パッド スクエアラウンド   |
| 08-080-62 | 側部パッド 若杉         |
| 08-080-63 | 側部パッド ミニスクエアラウンド |

#### 2. 患者体重（目安）

135 kg 以下

#### 3. 原材料

- ①：樹脂  
②：ステンレス鋼

### 【使用目的又は効果】


手術台に付属するアクセサリ。側臥位のポジションを確保する目的で、患者を支持する器具。

### ＊【使用方法等】

#### 1. 側部支持器用パッドの取り付け

- 1-1 側部支持器のパッド取り付け部に、本品の取り付け軸（②）を取り付けます。

側部パッドの取り付け軸がパッド取り付け部から見えないようにします。（完全に収まるようにします）

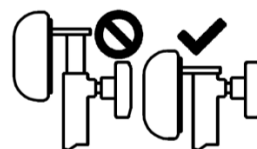

NG：左図 OK：右図

- 1-2 側部指示器のノブ（パッド固定用）で本品を固定します。

#### 2. 対応可能な側部支持器

使用可能な側部支持器（届出番号：13B1X00306G11182）は次表のとおりである。

| 商品コード     | 商品名                  |
|-----------|----------------------|
| 08-080-30 | 若杉氏側部支持器Ⅱ 本体         |
| 08-080-31 | フレキシブル側部支持器 本体       |
| 08-080-32 | エクステンダブル側部支持器ショート 本体 |
| 08-080-33 | エクステンダブル側部支持器ロング 本体  |

### 【使用上の注意】

#### 1. 重要な基本的注意

- 1-1 本品と側部支持器が固定されていることを確認してください。  
1-2 指定された側部支持器以外には使用しないでください。  
1-3 衛生のため、患者が本製品に触れる部分には必ず滅菌済ドレープを使用してください。  
1-4 手術台を動作するときは他のアクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 1. 保管方法

本品は高温・高湿を避け、温度や湿度が極端に変化しない場所に保管してください。

#### 2. 耐用期間

指定した保守点検及び適切な保管をした場合：2年（自己認証）

注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

### 【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

#### 1. 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」、「正常に機能すること」を確認してください。

#### 2. 清掃・消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭してください。

### 3. 故障時のお願い

本品が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

#### ＜業者による保守点検事項＞

本品を安全に使用するために、弊社及び弊社が認めた業者による定期点検を実施してください。それ以外の業者による保守点検は、有害事象の発生、性能・機能の低下を招くおそれがあります。定期点検をご希望される場合は、ご購入店又は弊社にお問い合わせください。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

ミズホ株式会社

TEL 03-3815-3097

製造業者

ミズホ株式会社 五泉工場

#### 保証期間に係る事項

本品は納品/設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。