


類別：機械器具（01）手術台及び治療台
一般医療機器 一般的名称：手術台アクセサリ JMDNコード：70469000

販売名：カセット挿入ホルダー


【禁忌・禁止】

トレーを挿入した状態で手術台を作動させないこと。
[トレーが落下して破損するおそれがあります。]


【形状・構造及び原理等】

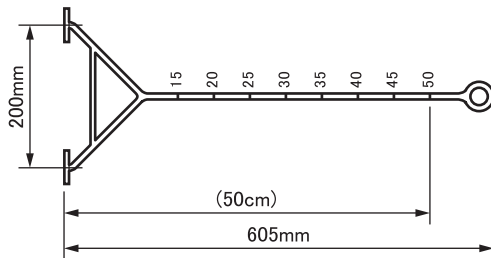

ホルダー

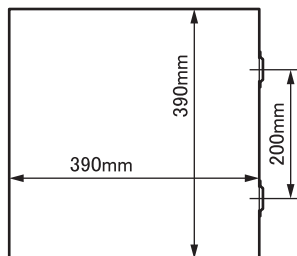


08-093-00: 大角用

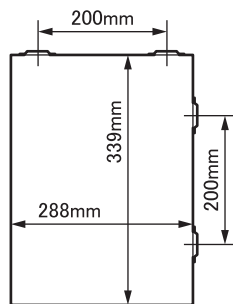


08-092-00: 四ッ切用


トレー

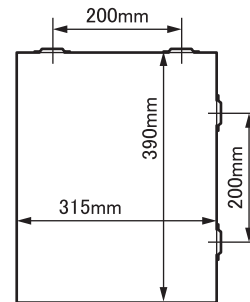

08-091-00: 大陸用

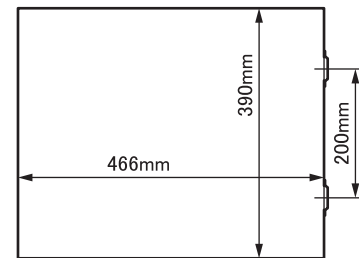


08-094-00: 半切用

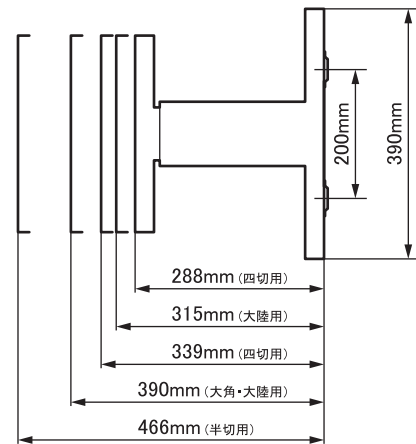

08-095-00: マルチタイプ

トレー

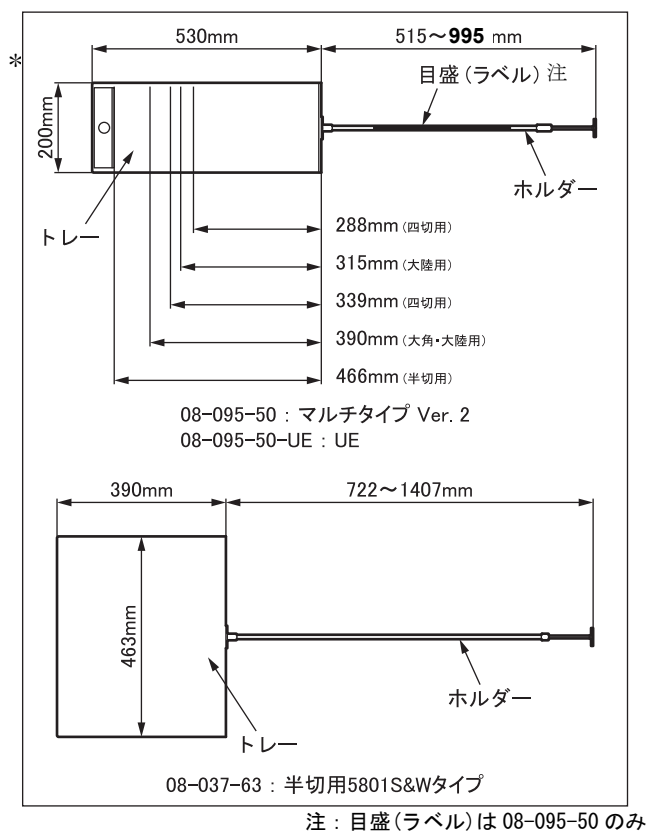

1. 質量

- ① ホルダー : 0.3 kg
- ② トレー
 - 大陸用 : 1.1 kg 四切用 : 0.9 kg
 - 大角用 : 1.4 kg 半切用 : 1.6 kg
 - マルチタイプ : 1.5 kg
- ③ トレー&ホルダー
 - マルチタイプ Ver. 2・UE : 2.0 kg
 - 半切用 5801 S & Wタイプ : 2.1 kg

*2. 材質

ホルダー : ステンレス鋼棒
 トレー : ステンレス鋼板、
アルミニウム合金板(マルチタイプ Ver. 2・UE)


商品コード	商品名
08-037-63	カセット挿入ホルダー (半切用) 5801 S & Wタイプ
08-091-00	カセット挿入ホルダー (大陸用)
08-092-00	カセット挿入ホルダー (四切用)
08-093-00	カセット挿入ホルダー (大角用)
08-094-00	カセット挿入ホルダー (半切用)
08-095-00	カセット挿入ホルダーマルチタイプ
08-095-50	カセット挿入ホルダーマルチタイプ Ver. 2
08-095-50-UE	カセット挿入ホルダー (UE)

* 【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリ。X線撮影用のカセットをトレーにのせて、手術台に取り付けたカセット格納枠の間に挿入するための機器。

*【使用方法等】

カセットの挿入

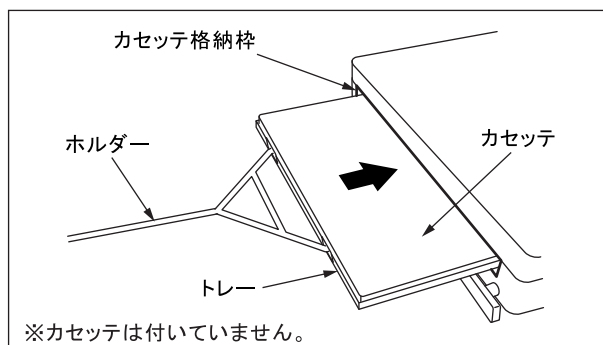

1. カセットをトレーに乗せます。
2. ホルダーをトレーのフックに取り付けます。
3. 手術台のカセット格納枠の下に挿入します。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

トレーを挿入した状態で手術台を作動させないこと。[トレーが落下して破損のおそれがあります。]

*【保管方法及び有効期間等】

*1. 保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

*2. 耐用期間

適切な保守点検及び適切な保管をした場合 : 7年 (注)

[自己認証による]

注 耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

【保守・点検に係る事項】

*＜使用者による保守点検事項＞

*1. 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

*2. 清掃・消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭してください。

*3. 故障時のお願い

本装置が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示し、ご購入店又は弊社に連絡してください。

*＜業者による保守点検事項＞

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3097

製造業者 : ミズホ株式会社千葉工場

【保証期間に係る事項】

本品は納品/設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。