

類別: 機械器具 (01) 手術台及び治療台

一般医療機器 一般的名称: 手術台アクセサリ JMDNコード: 70469000




販売名: 頭部延長ボード




【警告】

患者の任意の体位を確保するためにアクセサリで支持するときは常に患者の状態を監視すること。[長時間の体位は神経麻痺や褥瘡の原因となります。]

【禁忌・禁止】

1. 他社製手術台では使用しないこと。[他社製手術台での使用可能は確認していません。]
2. 【使用方法等】 2. 使用可能な手術台に示す機種以外では使用しないこと。[他機種での使用可能は確認していません。]

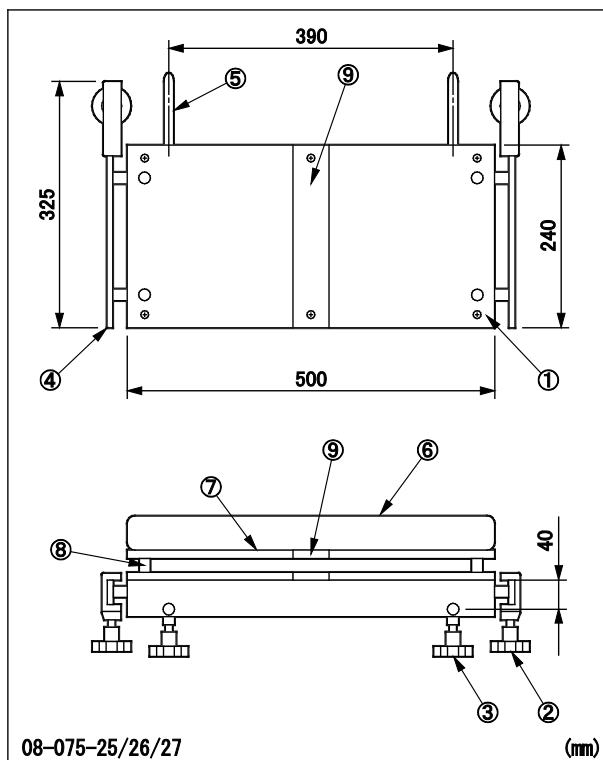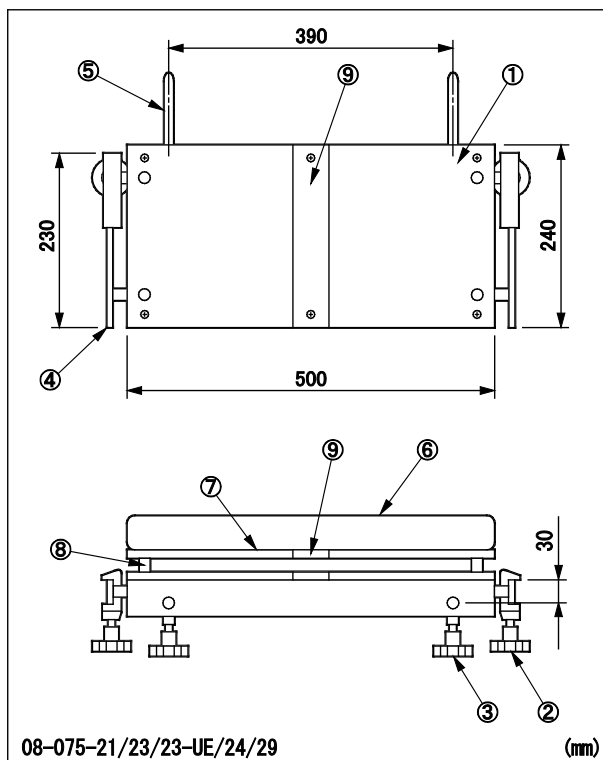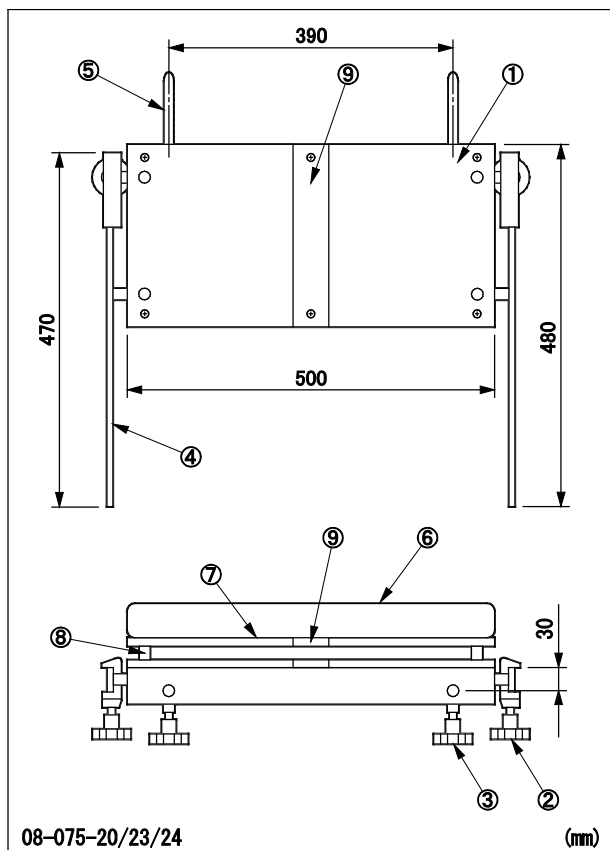【形状・構造及び原理等】
**** 1. 外観図**

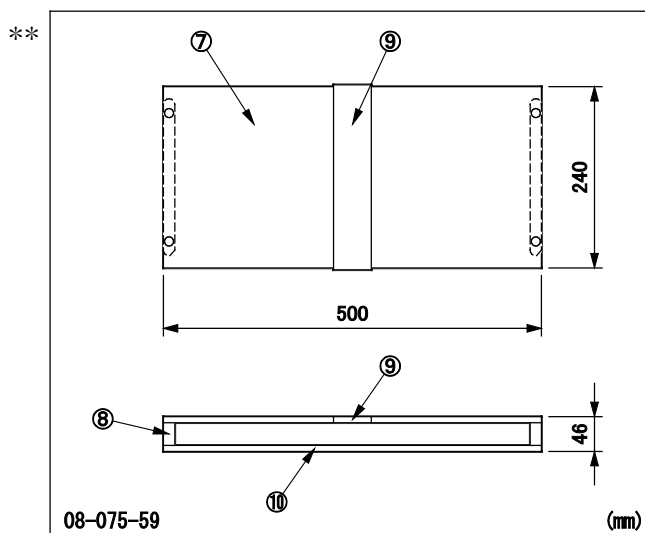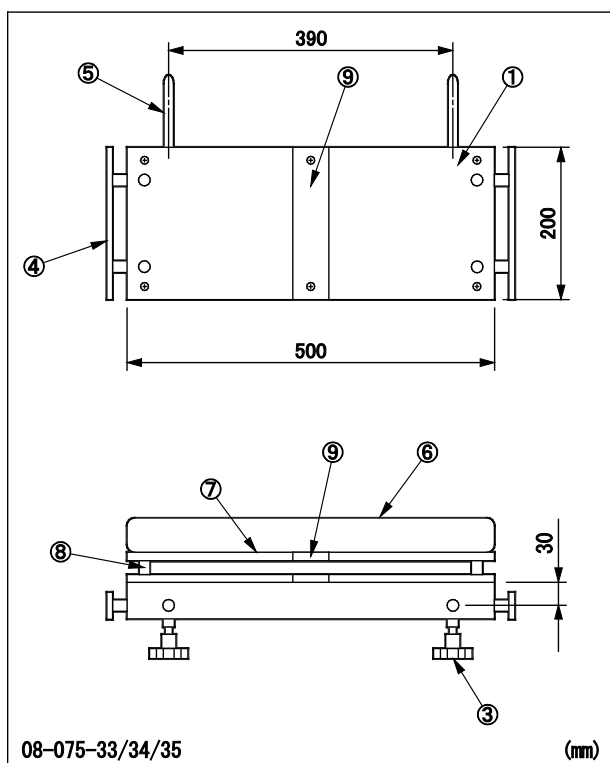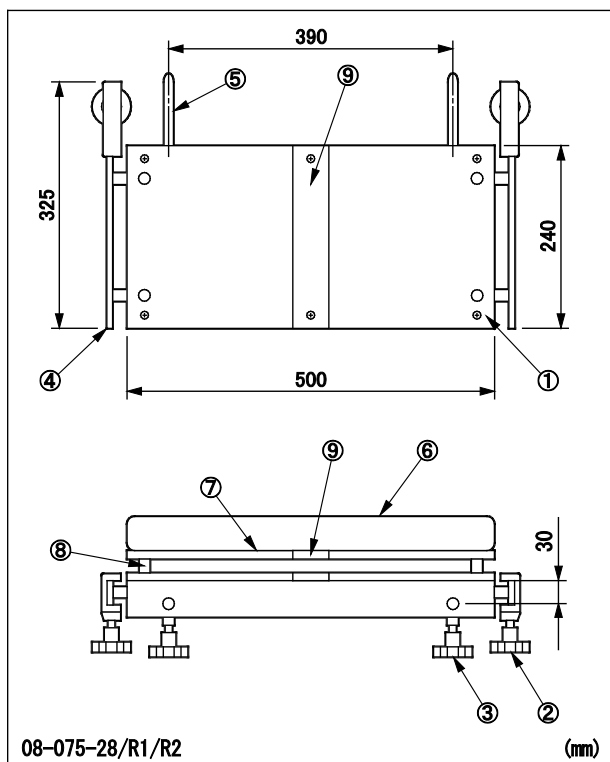


商品コード	商品名	構成	質量
08-075-20	頭部延長ボード 240 mm レール長	①②③ ④⑤	7.5 kg
08-075-21	頭部延長ボード 240 mm レール短	①②③ ④⑤	6.5 kg
** 08-075-23	頭部延長ボード 240 mm カセット格納枠 注 1	⑦⑧⑨	1.3 kg
** 08-075-23-UE	頭部延長ボード 240 mm カセット格納枠 (UE) 注 2	⑦⑧⑨	1.3 kg
08-075-24	頭部延長ボード 240 mm MP0 マットレス 70 mm	⑥	0.6 kg
08-075-25	頭部延長ボード 240 mm 5700 用 本体	①②③ ④⑤	7.0 kg
08-075-26	EX マットレス 頭部延長 ボード/背板ショート (5700 シリーズ用)	⑥	0.6 kg
** 08-075-27	カセット格納枠 頭部延長 ボード/背板ショート (5700 シリーズ用)	⑦⑧⑨	1.3 kg
08-075-28	頭部延長ボード 240 mm 5701 用 本体	①②③ ④⑤	7.0 kg
08-075-28-R1	頭部延長ボード 3602、6702 用 (R1) 注 3	①②③ ④⑤	7.0 kg
08-075-28-R2	頭部延長ボード 3602、6702 用 (R2) 注 4	①②③ ④⑤	7.0 kg
08-075-29	頭部延長ボード 240 mm ミス・ホリゾンタルマットレス 70 mm	⑥	0.6 kg
08-075-33	頭部延長ボード 200 mm 8300 用 本体	①③④ ⑤	4.8 kg
08-075-34	頭部延長ボード 200 mm 8300 用マットレス	⑥	0.5 kg
** 08-075-35	頭部延長ボード 200 mm 8300 用カセット格納枠	⑦⑧⑨	1.1 kg
** 08-075-59	頭部延長ボード 240 mm カセット格納枠 TYPE N	⑦⑧⑨ ⑩	3.0 kg
08-057-36	ソフトパッド 頭部延長ボ ード 240 mm用 70 mm 厚	⑥	0.8 kg
* 08-057-50	頭部延長ボード 240mm MOP マットレス 100 mm厚	⑥	0.6kg

注 1 : 高さ 37 mm

注 2 : 高さ 46 mm

注 3・注 4 : 取付け可能な手術台サイトレール寸法が異なる


2. 材質

- ① 延長ボード : 熱硬化性樹脂積層板
 - ② 固定ハンドル : ステンレス鋼棒
 - ③ 延長ボード固定ハンドル : ステンレス鋼棒
 - ④ サイドレール : ステンレス鋼棒
 - ⑤ 差込軸 : ステンレス鋼棒
 - ⑥ マット : ウレタン
 - ** ⑦ カセット格納枠ボード : 熱硬化性樹脂積層板
 - ** ⑧ 支柱 : ステンレス鋼棒
: ポリカーボネート (TYPE N)
 - ** ⑨ 取付用テープ : ナイロン
 - ** ⑩ テーブル板 (TYPE N) : 熱硬化性樹脂積層板
- 注: 番号は 1. 外観図の番号に対応

【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリ。手術台の背板に取り付けてテーブルトップの長さを延長。

【使用方法等】

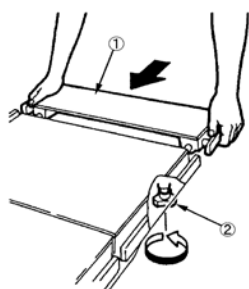

1. 頭部延長ボードの取り付け方

- 1-1 手術台の背板差込孔に頭部延長ボード①の差込軸を差し込みます。
- 1-2 固定ハンドル②を締めて固定します。

2. 使用可能な手術台

製造販売届出番号等	販売名
13B1X00306N00006	MOT-5601SRM 電動油圧手術台
13B1X00306N00007	MOT-5601SRMB 電動油圧手術台
13B1X00306N00009	MOS-1300 電動油圧整形牽引透視手術台
13B1X00306N00010	MOS-1300B 電動油圧整形牽引透視手術台
13B1X00306N00023	MOT-8300 分離式電動手術台
13B1X00306N10057	MOT-5700 電動油圧手術台
13B1X00306N10144	電動油圧手術台 MOT-5701
13B1X00306N10208	電動油圧手術台 MOT-3602
13B1X00306N10212	電動油圧手術台 MOT-6702

【使用上の注意】

1. 警告

締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり、動いたりして患者に障害が起きるおそれがあります。

2. 重要な基本的注意

手術台を作動するときは他の手術台アクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。

** 3. 相互作用

*

〔併用注意〕

分離式手術台での使用では、分離／装着は必ず頭部延長ボードを取り外して行ってください。取付けた状態では、分離／装着ができません。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

2. 耐用期間

適切な保守点検及び適切な保管をした場合: 7年 (注) [自己認証による]

注: 耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品 (マットレスを含む) の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

【保守・点検に係る事項】

<使用者による保守点検事項>

1. 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

2. 清掃・消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭してください。

3. 故障時のお願い

本装置が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

<業者による保守点検事項>

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3097

製造業者: ミズホ株式会社 千葉工場

【保証期間に係る事項】

本品は納品/設置してから 1 年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。