

器01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ (70469000)

頭部延長ボード

※※

【警告】

＜使用方法＞

患者の任意の体位を確保するためにアクセサリで支持するときは常に患者の状態を監視すること。[長時間の体位保持は神経麻痺や褥瘡の原因になります。]

※※




【禁忌・禁止】






＜使用方法＞



他社製手術台では使用しないこと。[他社製手術台での使用可能を確認していません。]

※ 【形状・構造及び原理等】

* 1. 外観図

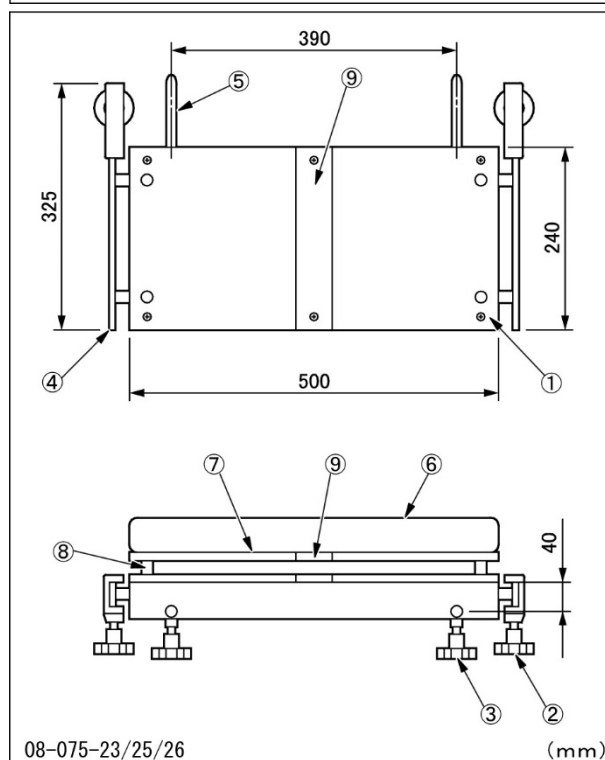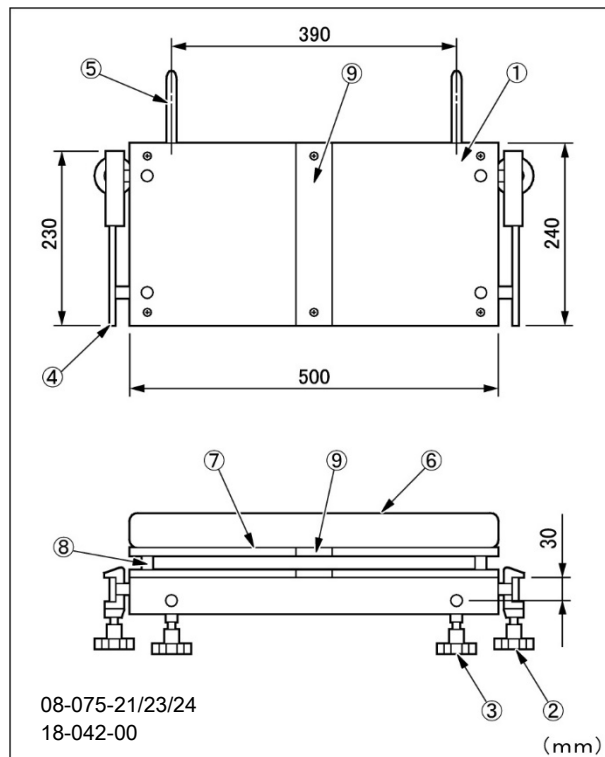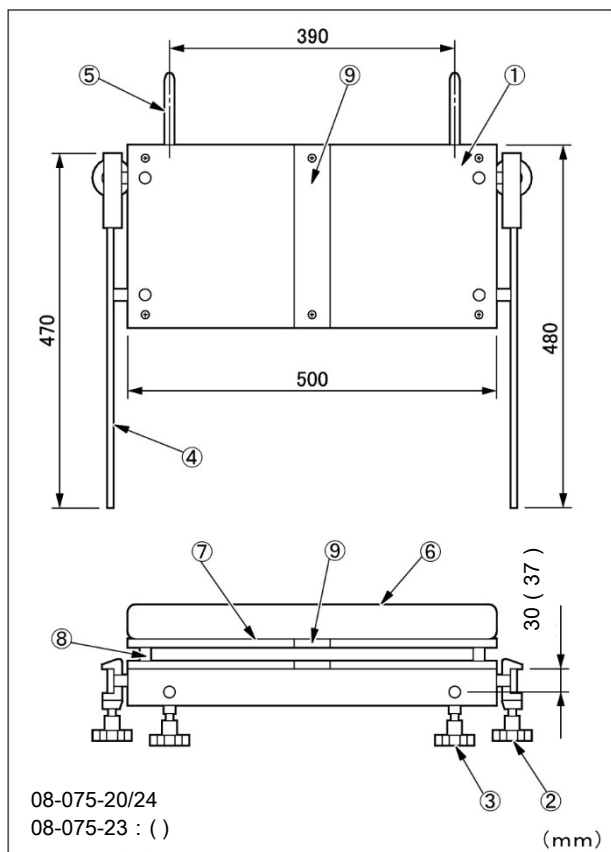

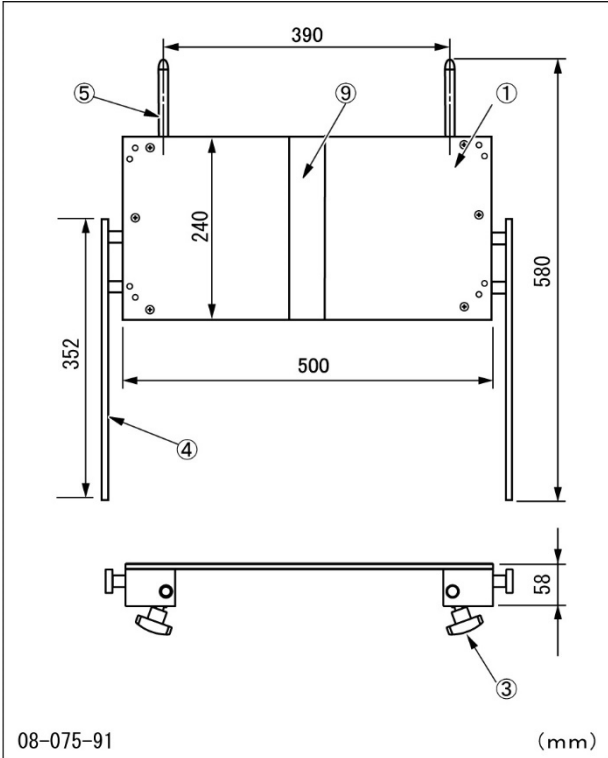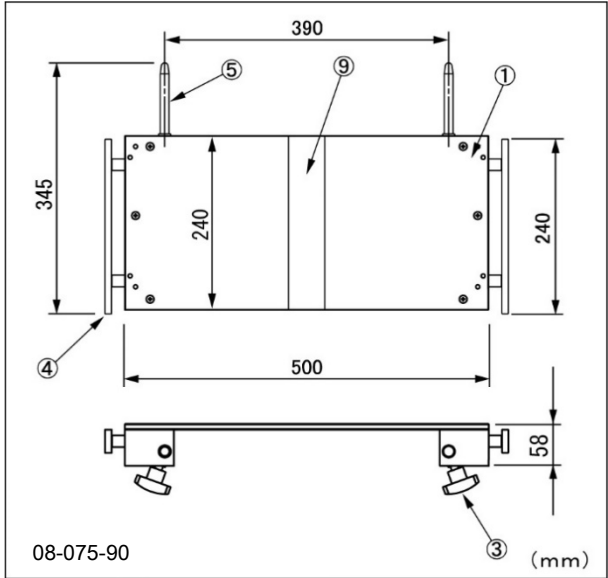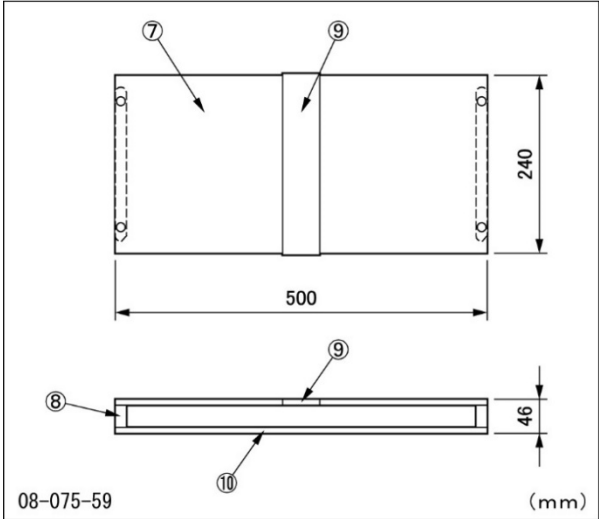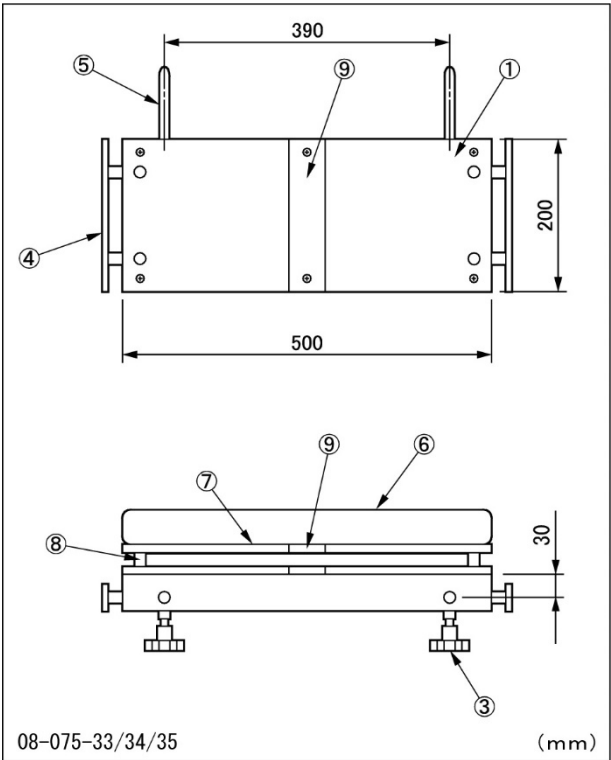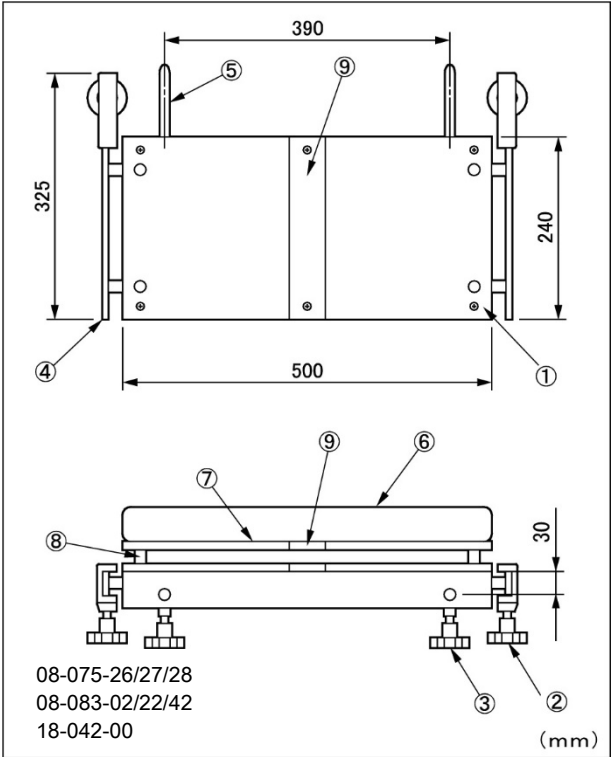

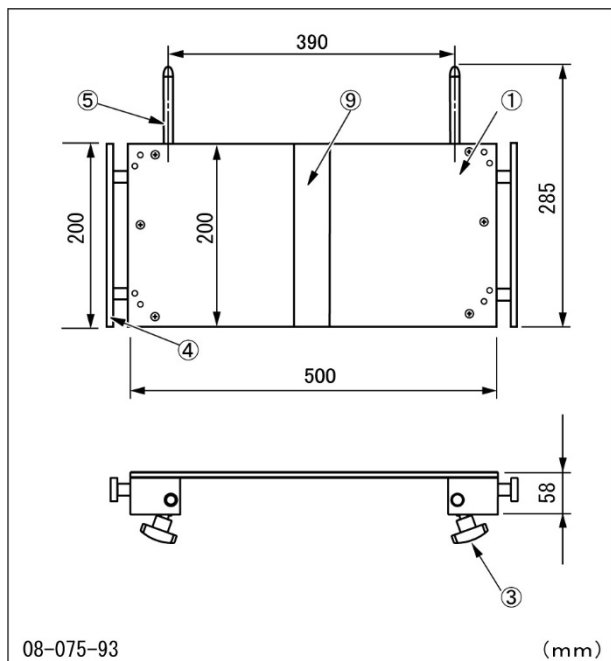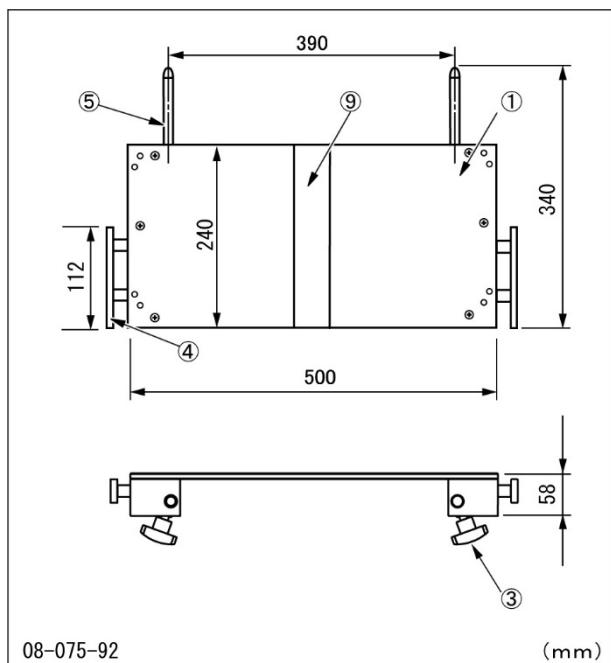

商品コード	商品名	構成	質量
08-057-36	ソフトパッド 頭部延長ボード 240mm用 70mm厚	⑥	0.8 kg
08-057-50	頭部延長ボード 240mm MOP マットレス 100mm厚	⑥	0.6kg
08-075-20	頭部延長ボード 240mm レール長	①②③ ④⑤⑨	7.5 kg
08-075-21	頭部延長ボード 240mm レール短	①②③ ④⑤⑨	6.5 kg
08-075-23	頭部延長ボード 240mm カセット格納枠	⑦⑧⑨	1.3 kg
08-075-24	頭部延長ボード 240mm MPO マットレス 70mm	⑥	0.6 kg
08-075-25	頭部延長ボード 240mm 5700 用 本体	①②③ ④⑤⑨	7.0 kg

08-075-26	EX マットレス 頭部延長ボード/背板ショート (5700 シリーズ用)	⑥	0.6 kg
08-075-27	カセット格納枠 頭部延長ボード/背板ショート (5700 シリーズ用)	⑦⑧⑨	1.3 kg
08-075-28	頭部延長ボード 240mm 本体	①②③ ④⑤⑨	7.0 kg
18-042-00	ミズホオリジナルマットレス 頭板 タイプA	⑥	0.6 kg
08-075-33	頭部延長ボード 200mm 8300 用 本体	①③④ ⑤	4.8 kg
08-075-34	頭部延長ボード 200mm 8300 用マットレス	⑥	0.5 kg
08-075-35	頭部延長ボード 200mm 8300 用カセット格納枠	⑦⑧⑨	1.1 kg
08-075-59	頭部延長ボード 240mm カセット格納枠 TYPE N	⑦⑧⑨ ⑩	3.0 kg
08-075-90	頭部延長ボードⅡ 240mm 本体	①③④ ⑤⑨	4.2kg
08-075-91	頭部延長ボードⅡ 240mm レール長	①③④ ⑤⑨	4.8kg
08-075-92	頭部延長ボードⅡ 240mm レール短	①③④ ⑤⑨	3.6kg
08-075-93	頭部延長ボードⅡ 200mm 8300 用 本体	①③④ ⑤⑨	4.8 kg
08-083-02	固定式カセット格納枠 頭部延長ボード 240mm用	⑦⑧⑨	1.5 kg
08-083-22	デジタルカセット格納枠 頭部延長ボード 240mm用	⑦⑧⑨	1.5 kg
08-083-42	固定式・デジタル兼用 ベーク板 頭部延長ボード 240mm 用	⑩	1.3 kg

2. 原材料


- | | | |
|---|----------------|---------------------|
| ① | 延長ボード | : 熱硬化性樹脂積層板 |
| ② | 固定ハンドル | : 炭素鋼棒/ナイロン |
| ③ | 延長ボード固定ハンドル | : 炭素鋼棒/ナイロン |
| ④ | サイドレール | : ステンレス鋼棒 |
| ⑤ | 差込軸 | : ステンレス鋼棒 |
| ⑥ | マットレス | : ウレタンフォーム |
| ⑦ | カセット格納枠ボード | : 熱硬化性樹脂積層板 |
| ⑧ | 支柱 | : ステンレス鋼棒 |
| | | : ポリカーボネート (TYPE N) |
| ⑨ | 面ファスナー | : ナイロン |
| ⑩ | テーブル板 (TYPE N) | : 熱硬化性樹脂積層板 |
- 注: 番号は1. 外観図の番号に対応

【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリ。手術台の背板に取り付けてテーブルトップの長さを延長。

** 【使用方法等】

*

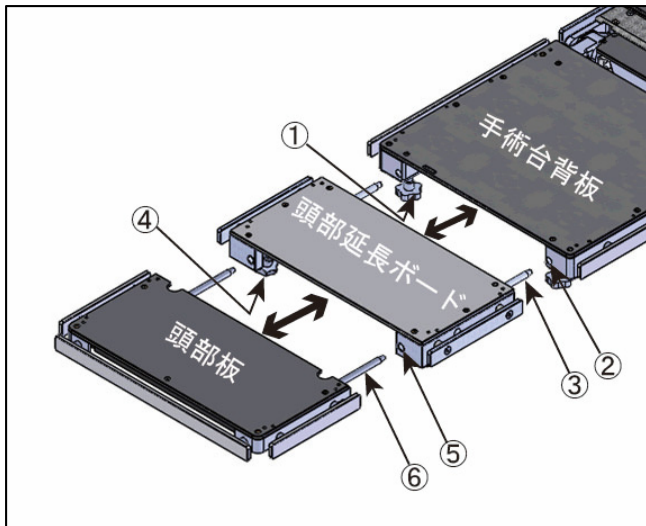

1. 頭部延長ボードの取り付け方（使用前）

- 1-1. 手術台背板の固定ハンドル①をゆるめて、頭部板を取り外します。
- 1-2. 頭部延長ボードの差込軸③を手術台背板の差込孔②に差し込みます。
- 1-3. 頭部延長ボードが手術台背板に完全に差し込まれていることを確認します。
- 1-4. 手術台背板の固定ハンドル①を締めて固定します。

2. 頭部板の取り付け方（使用前）

- 必要な場合、手術台から取り外した頭部板を頭部延長ボードに取り付けます。
- 2-1. 頭部延長ボードの固定ハンドル④をゆるめます。
 - 2-2. 頭部板の差込軸⑥を頭部延長ボードの差込孔⑤に差し込みます。
 - 2-3. 頭部板が頭部延長ボードに完全に差し込まれていることを確認します。
 - 2-4. 頭部延長ボードの固定ハンドル④を締めて固定します。

3. 頭部板の取り外し方（使用后）

- 頭部板を取り付けた場合は、頭部板を先に取り外します。
- 3-1. 頭部延長ボードの固定ハンドル④をゆるめます。
 - 3-2. 頭部板を手前に引いて、頭部延長ボードから取り外します。

4. 頭部延長ボードの取り外し方（使用后）

- 4-1. 手術台背板の固定ハンドル①をゆるめます。
- 4-2. 頭部延長ボードを手前に引いて、手術台背板から取り外します。

5. 使用可能な手術台

弊社製手術台

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

2. 耐用期間

適切な保守点検及び適切な保管をした場合：7年（注）

[自己認証による]

注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品（マットレスを含む）の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

** 【保守・点検に係る事項】

<使用者による保守点検事項>

1. 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

2. 清掃・消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れを水で拭き取り、消毒液を浸したガーゼ等で清拭してください。手順の詳細及び使用可能な消毒液については、手術台の取扱説明書をご参照ください。

3. 故障時のお願い

本装置が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

<業者による保守点検事項>

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社 千葉工場

保証期間に係る事項

本品は納品/設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。

** 【使用上の注意】

*

重要な基本的注意

- ① 頭部延長ボード及び装着するアクセサリが完全に差し込まれていることを必ず確認してください。完全に差し込まれていない状態では機器が外れたり、動いたりして患者に障害が起きるおそれがあります。
- ② 締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり、動いたりして患者に障害が起きるおそれがあります。
- ③ 衛生のため、患者が手術台に触れる部分には必ず滅菌済ドレープを使用してください。
- ④ 手術台を作動するときは他のアクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。
- ⑤ 頭部延長ボード及び頭部板を取り付けた状態で手術台の縦転頭下がり又は背板下がりを作動するときは、床面への接触に注意してください。