

器01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ (70469000)


下肢牽引用Vアタッチメント

【警告】

患者の任意の体位を確保するためにアクセサリで支持するときは常に患者の状態を監視すること。【長時間の体位は神経麻痺や褥瘡の原因となることがあります。】


【禁忌・禁止】

- 【形状・構造及び原理等】2. に示す使用可能な手術台以外では使用しないこと。[取付部分の構造及びサイドレール寸法が異なるため装着できません。]
- 中点位置での使用が指示されているスライド機能内蔵の手術台は、中点位置以外では使用しないこと。
[不安定な状態となり転倒することがあります。]

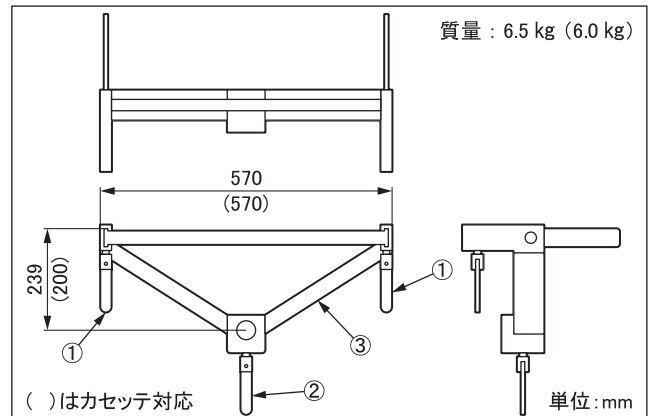

【形状・構造及び原理等】

*1. 外観図

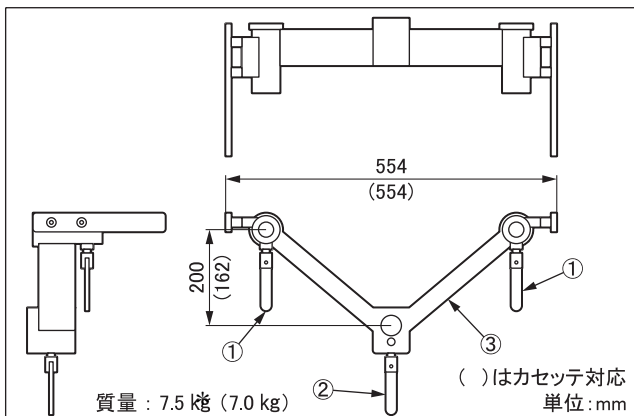

**

商品コード	商品名
08-115-30	下肢牽引用V字アタッチメント SRMB、5701 用
08-115-31	下肢牽引用V字アタッチメント SRMB、5701 用 (カセット対応)
08-115-30-R1	下肢牽引用V字アタッチメント SRMB、5701 用 (R1)
08-115-31-R1	下肢牽引用V字アタッチメント SRMB、5701 用 (カセット対応) (R1)
08-115-30-R2	下肢牽引用V字アタッチメント SRMB、5701 用 (R2)
08-115-31-R2	下肢牽引用V字アタッチメント SRMB、5701 用 (カセット対応) (R2)


注: 取付け可能な手術台のサイドレール寸法

08-115-30/08-115-31	9×32
08-115-30-R1/08-115-31-R1	9.4×28.6
08-115-30-R2/08-115-31-R2	10×25

商品コード	商品名
08-115-23	下肢牽引用V字アタッチメント 5801 用
08-115-23-R1	下肢牽引用V字アタッチメント (R1)
08-115-23-R2	下肢牽引用V字アタッチメント (R2)
08-115-24	下肢牽引用V字アタッチメント 5801 用 (カセット対応)
08-115-24-R1	下肢牽引用V字アタッチメント カセット対応 (R1)
08-115-24-R2	下肢牽引用V字アタッチメント カセット対応 (R2)

注: 取付け可能な手術台のサイドレール寸法

08-115-23/08-115-24	9×32
08-115-23-R1/08-115-24-R1	9.4×28.6
08-115-23-R2/08-115-24-R2	10×25

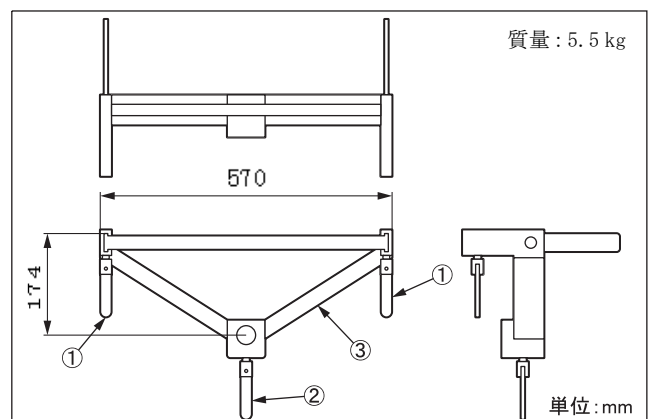

取扱説明書を必ずご参照ください。

商品コード	商品名
08-115-69	下肢牽引用V字アタッチメント 5701 カセット (こども仕様)

＊ 2. 材質

- ① ハンドルA：ステンレス鋼棒
 ② ハンドルB：ステンレス鋼棒
 ③ V字アタッチメント：ステンレス鋼棒

注：番号は1. 外観図の番号に対応

＊ 3. 使用可能な手術台（適応機種）

商品名	適応機種（販売名）
下肢牽引用V字アタッチメント 5801 用	MOT-5801S 電動油圧手術台
	電動油圧手術台 MOT-5801S Ver. 2
	電動油圧手術台 MOT-3602
	電動油圧手術台 MOT-3502
下肢牽引用V字アタッチメント 5801 用（カセット対応）	MOT-5801S 電動油圧手術台
	電動油圧手術台 MOT-5801S Ver. 2
	電動油圧手術台 MOT-3602
	電動油圧手術台 MOT-3502
下肢牽引用V字アタッチメント (R1) 注1 下肢牽引用V字アタッチメント (R2) 注2	電動油圧手術台 3602 Ultra Slide
	電動油圧手術台 3502 EZ Slide
	電動油圧手術台 MOT-3602X
	電動油圧手術台 MOT-3502X
下肢牽引用V字アタッチメント カセット対応 (R1) 注1 下肢牽引用V字アタッチメント カセット対応 (R2) 注2	電動油圧手術台 3602 UltraSlide
	電動油圧手術台 3502 EZ Slide
	電動油圧手術台 MOT-3602X
	電動油圧手術台 MOT-3502X

注1：使用可能な手術台の商品コード
 (18-100-70/18-131-70/18-100-21/18-131-21)

注2：使用可能な手術台の商品コード
 (18-100-80/18-131-80/18-100-30/18-131-30)

商品名	適応機種（販売名）
下肢牽引用V字アタッチメント S RMB、5701 用	MOT-5601SRM 電動油圧手術台
	MOT-5601SRMB 電動油圧手術台
	MOT-5601SRMB 電動油圧手術台
	MOT-5601SRMB 電動油圧手術台
	MOT-5801W 電動油圧手術台
	MOT-5601SRMK 電動油圧手術台
	MOT-5601KDB 電動油圧手術台
	MOT-5700 電動油圧手術台
	電動油圧手術台 MOT-5701
下肢牽引用V字アタッチメント S RMB、5701 用 (カセット対応)	電動油圧手術台 MOT-5602SRMB
	MOT-5601SRM 電動油圧手術台
	MOT-5601SRMB 電動油圧手術台
	MOT-5601SRMB 電動油圧手術台
	MOT-5650T 電動油圧手術台
	MOT-5601KDB 電動油圧手術台
	MOT-5700 電動油圧手術台
	MOT-5801W 電動油圧手術台
	MOT-5601SRMK 電動油圧手術台
	電動油圧手術台 MOT-5701
	電動油圧手術台 MOT-5602SRMB

商品名	適応機種（販売名）
下肢牽引用V字アタッチメント S RMB、5701 用 (R1) 注3 下肢牽引用V字アタッチメント S RMB、5701 用 (R2) 注4	電動油圧手術台 MOT-5602BW
	電動油圧手術台 MOT-5701
下肢牽引用V字アタッチメント S RMB、5701 用 (カセット対応) (R1) 注3 下肢牽引用V字アタッチメント S RMB、5701 用 (カセット対応) (R2) 注4	電動油圧手術台 MOT-5602BW
	電動油圧手術台 MOT-5701
下肢牽引用V字アタッチメント 5701 カセット (こども仕様)	電動油圧手術台 MOT-5701

注3：使用可能な手術台の商品コード
 (18-450-70/18-110-23)

注4：使用可能な手術台の商品コード
 (18-450-30)


＊【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリ。下肢牽引装置を取付けるための器具。

＊【使用方法等】

機器の詳細な操作方法是取扱説明書をご参照ください。

下肢牽引用V字アタッチメント 5801 用
 下肢牽引用V字アタッチメント (R1)
 下肢牽引用V字アタッチメント (R2)

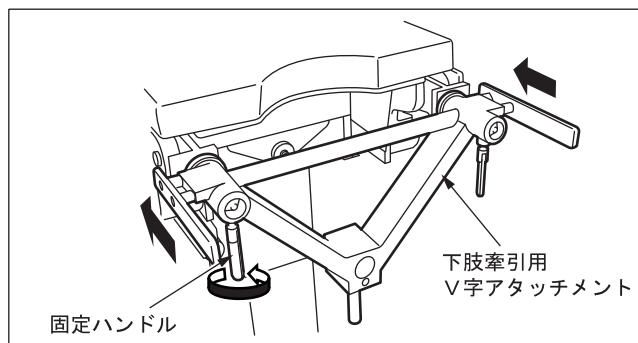


1. 手術台の脚板を外します。
2. 手術台の脚板取付けピンにV字アタッチメントを取り付けます。
3. 付属の固定ハンドルを回して固定します。

下肢牽引用V字アタッチメント SRMB、5701 用

＊ 下肢牽引用V字アタッチメント SRMB、5701 用 (R1)

＊ 下肢牽引用V字アタッチメント SRMB、5701 用 (R2)

＊ 下肢牽引用V字アタッチメント 5701 カセット (こども仕様)

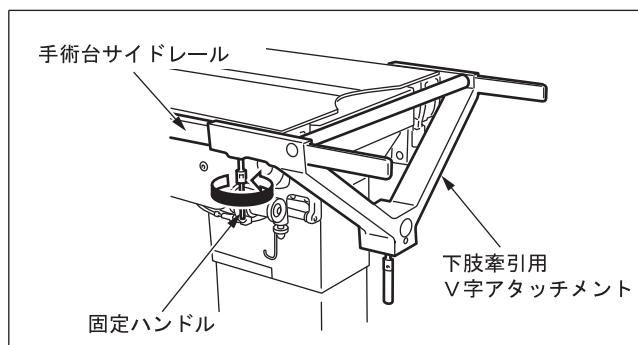

取扱説明書を必ずご参照ください。

1. 手術台の脚板を外します。
2. 手術台サイドレールにV字アタッチメントを取り付けます。
3. 付属の固定ハンドルを回して固定します。

【使用上の注意】

* 1. 警告

- ① 手術台への取付けは脚板取付けピン又はサイドレールに完全に差し込まれていることを確認してから固定してください。完全に差し込まれていない状態では器機が外れたり、動いたりして、患者に障害が起きるおそれがあります。
- ② 締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では器機が外れたり、動いたりして患者に障害が起きるおそれがあります。

* 2. 重要な基本的注意

手術台を作動するときは他のアクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。

*【保管方法及び有効期間等】

* 1. 保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

2. 耐用期間

適切な保守点検及び適切な保管をした場合：7年（注）

[自己認証による]

注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

【保守・点検に係る事項】

* <使用者による保守点検事項>

1. 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

2. 清掃・消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭してください。

3. 故障時のお願い

本装置が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

* <業者による保守点検事項>

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社千葉工場

*【保証期間に係る事項】

本品は納品/設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。

取扱説明書を必ずご参照ください。