


下肢牽引用Vアタッチメント (下肢牽引用V字アタッチメントⅡ)

* **【警告】**
<使用方法>
患者の任意の体位を確保するためにアクセサリで支持するときは常に患者の状態を監視すること。[長時間の体位保持は神経麻痺や褥瘡の原因となることがあります。]

* **【禁忌・禁止】**
<使用方法>
1. 他社製手術台では使用しないこと。[他社製手術台での使用可能は確認していません。]
2. 中点位置での使用が指示されているスライド機能内蔵の手術台は、中点位置以外では使用しないこと。[不安定な状態となり転倒することがあります。]

* **【形状・構造及び原理等】**

1. 外観図

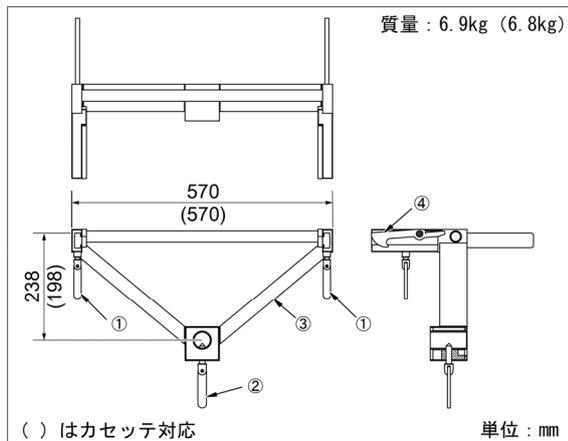

商品コード	商品名
08-115-80	下肢牽引用V字アタッチメントⅡ
08-115-81	下肢牽引用V字アタッチメント カセット対応Ⅱ

2. 原材料

- ① 固定ハンドル：ステンレス鋼
 - ② アーム固定ハンドル：ステンレス鋼
 - ③ V字アタッチメント：ステンレス鋼
 - ④ 安全用フック：ステンレス鋼
- 注：番号は1. 外観図の番号に対応

【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリ。下肢牽引装置を取り付けるための器具。


* **【使用方法等】**

1. 使用方法

詳細な使用方法は取扱説明書の操作方法に関する記載をご参照ください。


<取り付け方>

- 1-1 手術台の脚板を取り外します。
- 1-2 手術台サイドレールにV字アタッチメントを取り付け、V字アタッチメントが手術台サイドレールにあたるまで完全に差し込みます。
- 1-3 左右の固定ハンドルを回して固定します。

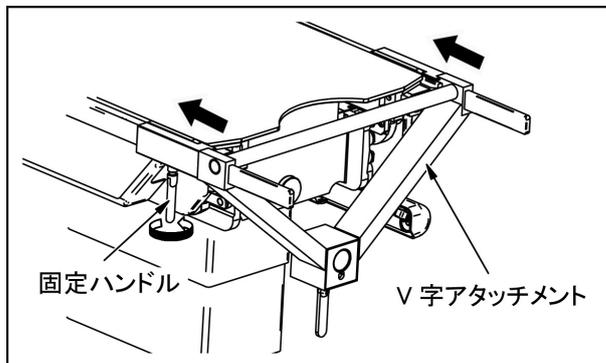

<取り外し方>

- 2-1 左右の固定ハンドルを回して固定を緩めます (下図①)。
- 2-2 左右の安全用フックを指で押し (下図②) 手術台からV字アタッチメントを取り外してください (下図③)。
- 2-3 手術台の脚板を取り付けます。

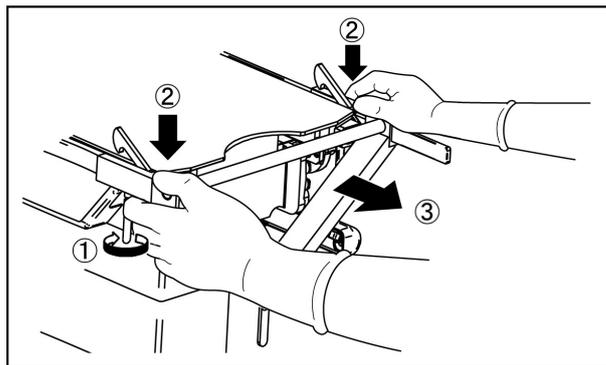

2. 使用可能な手術台
弊社製手術台

取扱説明書を必ずご参照ください。

＊【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ① 手術台への取付けはサイドレールに完全に差し込まれていることを確認してから固定してください。完全に差し込まれていない状態では本製品が外れたり、動いたりして、患者に危害が起きるおそれがあります。
- ② 手術台サイドレールへの取付け時に本製品の安全用フックが手術台にかかっていることを確認してください。安全用フックが手術台にかかっていない場合、フック機能が不十分になります。
- ③ 固定ハンドルが必ず固定されていることを確認してください。ゆるんだ状態では本製品が外れたり、動いたりして患者に危害が起きるおそれがあります。
- ④ 手術台を作動するときは他のアクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。

＊【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

2. 耐用期間

適切な保守点検及び適切な保管をした場合：7年（注）

[自己認証（弊社データ）による]

注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

＊【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

1. 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

2. 清掃・消毒

糸くずの出ない清潔な布に適量の消毒液をつけ、本製品の表面を消毒してください。手順の詳細は、取扱説明書の清掃と消毒に関する記載をご参照ください。

3. 故障時のお願い

本装置が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

＜業者による保守点検事項＞

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社千葉工場

保証期間に係る事項

本品は納品/設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。

取扱説明書を必ずご参照ください。