

類別:機械器具(01)手術台及び治療台
一般医療機器 一般的名称:手術台アクセサリ JMDNコード:70469000

販売名:腕台

【警告】


患者の任意の体位を確保するためにアクセサリで支持するときは常に患者の状態を監視すること。[長時間の体位は神経麻痺や褥瘡の原因となります。]

【禁忌・禁止】

他社製手術台では使用しないこと。[他社製手術台での使用可能は確認していません。]

【形状・構造及び原理等】

1. 外観図

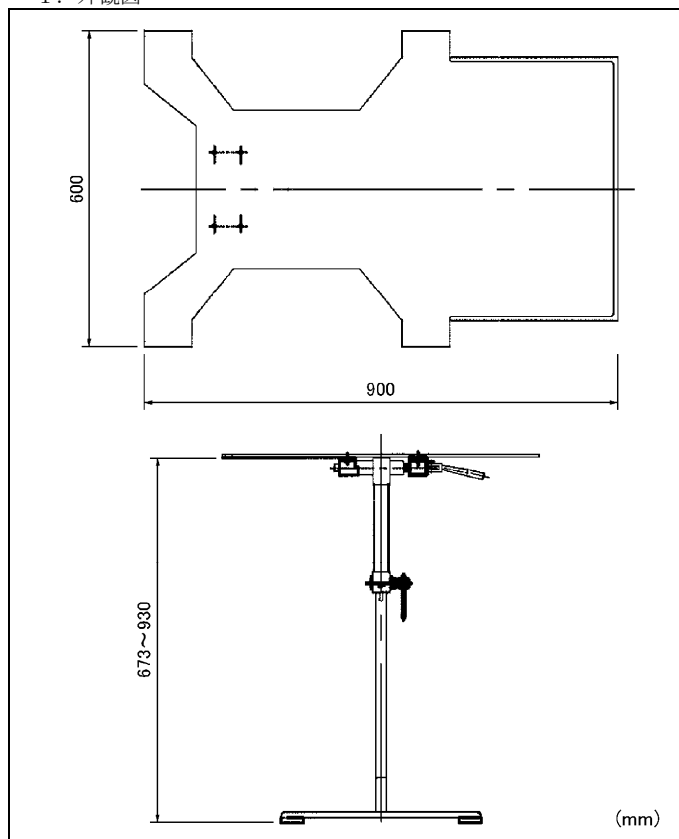

製品コード	種類
03-001-73	腕台 ジュラルミン製
03-001-74	腕台 アクリル板製

2. 質量

10 kg

3. 材質


No. (注)	構成部品	原材料名
①	受台	アルミニウム合金板 (ジュラルミン製) 熱硬化性樹脂積層板 (アクリル板製)
②	折りたたみレバー	ステンレス鋼品
③	固定ハンドル	ステンレス鋼棒
④	支柱	ステンレス鋼棒

注:番号は【使用方法等】の番号に対応

【使用目的又は効果】


手術台に付属するアクセサリであり、患者の腕を支持するための器具。

【使用方法等】

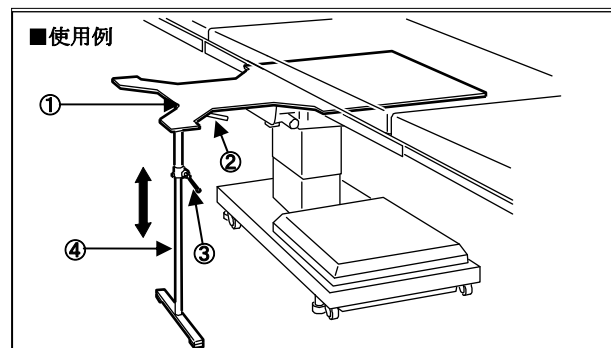

- ①受台 ③固定ハンドル
②折りたたみレバー ④支柱

- 手術台のテーブル板とマットの間に受台を①を差し込む。
- 固定ハンドル③で高さを調節する。

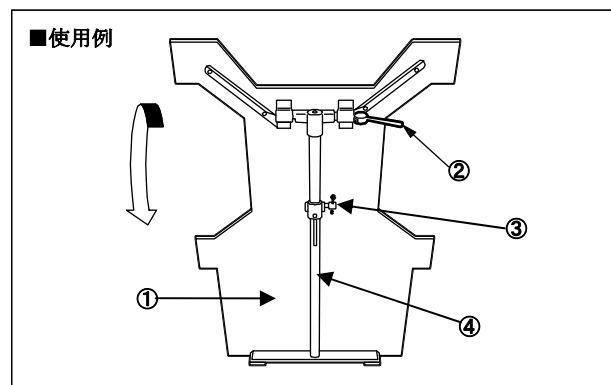

- 収納時は折りたたみレバー②で支柱④を倒す。

【使用上の注意】

1. 警告

締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり、動いたりして患者に障害が起きるおそれがあります。

2. 重要な基本的注意

手術台を作動するときは他の手術台アクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。

3. 相互作用

〔併用注意〕

分離式手術台での使用では、分離／装着は必ず腰部延長ボードを取り外して行ってください。取付けた状態では、分離／装着ができません。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

2. 耐用期間

適切な保守点検及び適切な保管をした場合：7年（注）〔自己認証による〕

注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

1. 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

2. 清掃・消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭してください。

3. 故障時のお願い

本装置が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

＜業者による保守点検事項＞

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社 千葉工場

【保証期間に係る事項】

本品は納品/設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。