

類別：機械器具（01）手術台及び治療台  
一般医療機器 一般名称：手術台アクセサリ JMDNコード：70469000

販売名：小児用背板アタッチメント

**【警告】**


- \* 1. 患者の任意の体位を確保するために手術台アクセサリで支持するときは常に患者の状態を監視すること。[長時間の体位は神経麻痺や褥瘡の原因となります。]
- \* 2. 加重、衝撃を与えないこと。[手術台との振動により“跳ね返り現象”を起こすおそれがあります。また“跳ね返り現象”により誤って血管等を傷つけるおそれがあります。]

**【禁忌・禁止】**

- \* 1. 【形状・構造及び原理等】の項目3. に示す許容荷重を超えた使用をしないこと。[破損するおそれがあります。]
- \* 2. 【使用方法等】2. 使用可能な手術台に示す機種以外では使用しないこと。[他機種での使用可能は確認していません。]

**【形状・構造及び原理等】**

\*1. **外觀図**

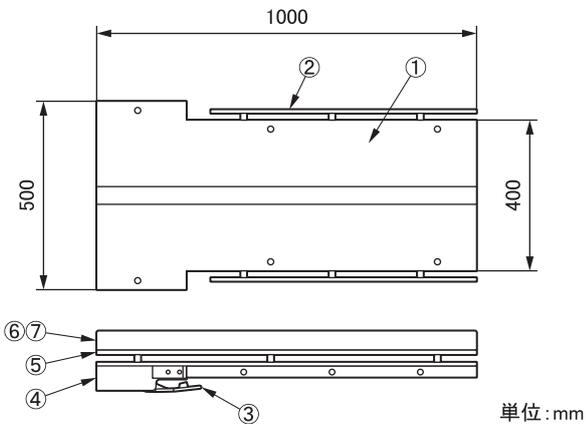

商品コード	商品名
08-057-47	小児用背板アタッチメントMOPマットレス 100mm厚
08-068-31	小児用背板アタッチメント(ピン取付タイプ) 本体のみ
08-068-32	小児用背板アタッチメント用マットレス
08-068-33	小児用背板アタッチメント用カセット枠

\*2. **質量**

本体 20kg / カセット枠 2kg / マットレス1. 8kg

\*3. **許容荷重**

50kg

**4. 材質**

- ① ボード：熱硬化性樹脂積層板
- ② サイドレール：冷間圧延ステンレス鋼帯
- ③ 着脱レバー：機械構造用炭素鋼
- ④ 差込孔：アルミニウム合金棒
- \*⑤ カセット枠：熱硬化性樹脂積層板
- \*⑥ マットレス：発泡ウレタンフォーム
- \*⑦ マットレス(MOP)：低反発ウレタンフォーム
- \* 注：番号は1. 外觀図の番号に対応

\*【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリ。小児患者を支持するための器具。

\*【使用方法等】



マットレスを取り付けた状態

\*1. **取り付け方**

- 1-1 手術台の頭部板および背板を取り外します。
- 1-2 手術台の背板取付ピンを水平にした状態で、小児用アタッチメントを差し込みます。
- 1-3 小児用アタッチメントを手前に引いて、手術台に完全に差し込まれていることを確認します。
- 1-4 必要に応じてカセット枠を取り付けます。
- 1-5 専用のマットレスを取付けます。

\*2. **使用可能な手術台**

販売名：MOT-5601KDB電動油圧手術台

製造販売届出番号：13B1X00306N10056

販売名：MOT-5700電動油圧手術台

製造販売届出番号：13B1X00306N10057

販売名：電動油圧手術台MOT-5701

製造販売届出番号：13B1X00306N10144

**【使用上の注意】**

\*1. **警告**

締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり、動いたりして患者に障害が起きるおそれがあります。

\*2. **重要な基本的注意**

手術台を作動するときは他の併用機器やテーブルトップとの接触・干渉に注意するしてください。

\*【**保管方法及び有効期間等**】

\* 1. **保管方法**

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

\* 2. **耐用期間**

適切な保守点検及び適切な保管をした場合：7年（注）

[自己認証による]

注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品(マットレスを含む)の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

【**保守・点検に係る事項**】

\* < **使用者による保守点検事項** >

1. **使用前・使用後の点検**

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

2. **清掃・消毒**

血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭してください。

3. **故障時のお願い**

本装置が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

\* < **業者による保守点検事項** >

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

\*【**製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等**】

製造販売業者：ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社千葉工場

\*【**保証期間に係る事項**】

本品は納品/設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。