

器01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ (70469000)



小児用ギプス巻き装置

＊ **【警告】**
患者の任意の体位を確保するためにアクセサリで支持するときは常に患者の状態を監視すること。[長時間の体位は神経麻痺や褥瘡の原因になります。]

＊ **【禁忌・禁止】**
1. 他社製手術台では使用しないこと。[他社製手術台での使用可能は確認していません。]
＊ 2. **【使用方法等】** 2. 使用可能な手術台・手術台アクセサリに示す機種以外では使用しないこと。[他機種での使用可能は確認していません。]

【形状・構造及び原理等】

＊ 1. 外観図

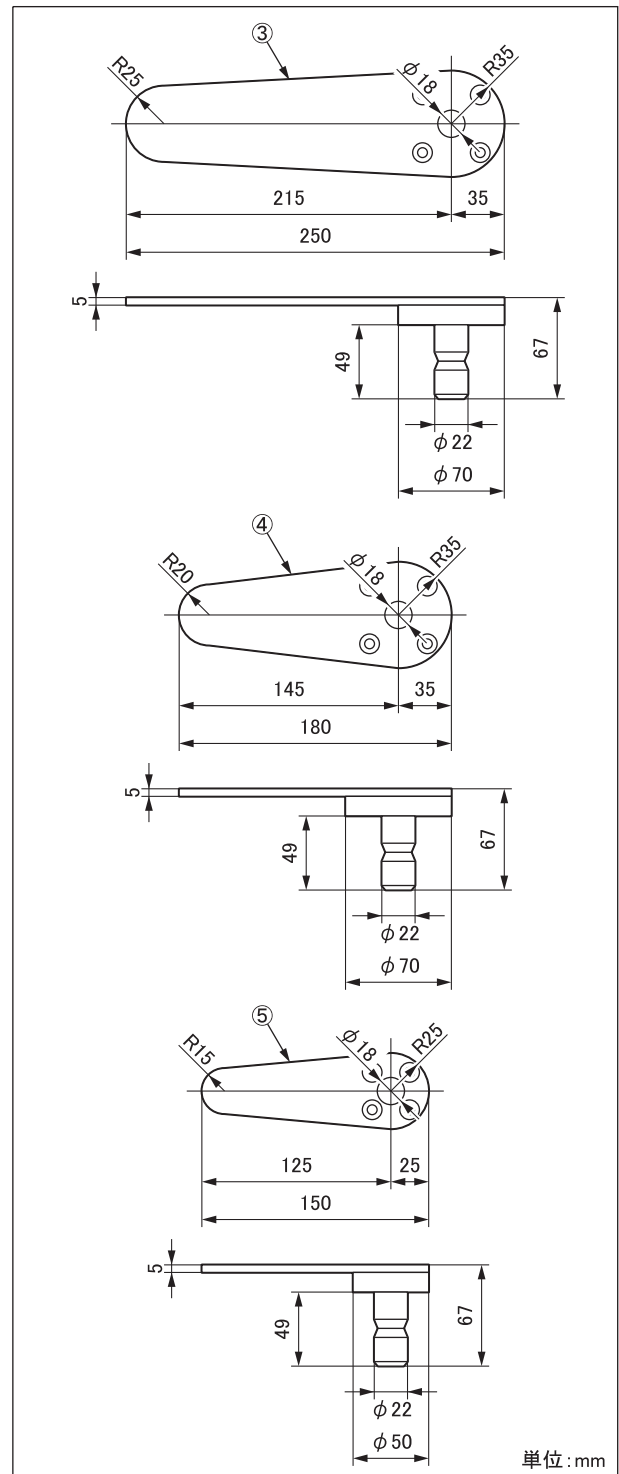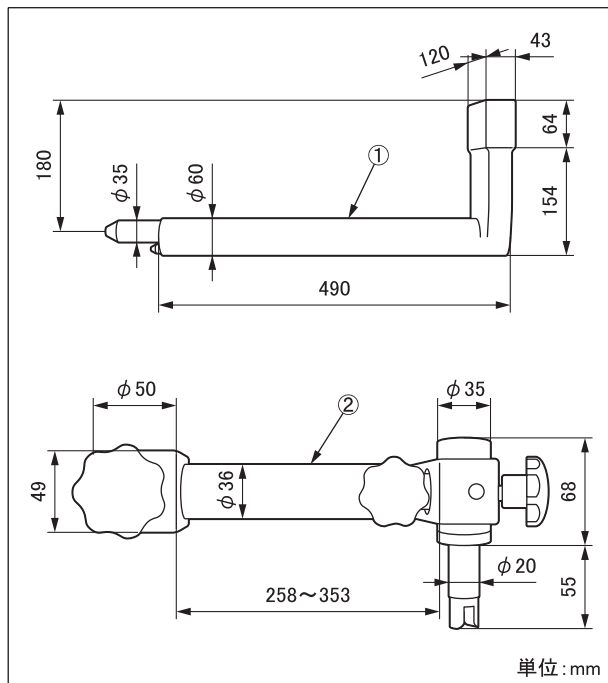

No.	商品コード	商品名	質量
①	08-115-50	小児用ギブス巻台	5.6 kg
②	08-115-51	小児用伸縮性回転ベッケン（本体のみ）	2.5 kg
③	08-115-52	小児用伸縮性回転ベッケン用ベッケン板大（250mm）	1.0 kg
④	08-115-53	小児用伸縮性回転ベッケン用ベッケン板中（180mm）	0.8 kg
⑤	08-115-54	小児用伸縮性回転ベッケン用ベッケン板小（150mm）	0.6 kg

2. 材質

ギブス巻台・伸縮性回転ベッケン（本体のみ）・伸縮性回転ベッケン用ベッケン板： ステンレス鋼
ハンドル類： 合成樹脂

* 3. 可動範囲（小児用伸縮性回転ベッケン（本体のみ））

アーム回転角度：最大360°
アーム伸縮量：最大95mm
ベッケン板回転角度：最大360°


* 【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリ。小児の骨折手術でギブスを巻く時に患者を支持するための器具。

* 【使用方法等】

* 1. 使用方法

- 1-1 手術台の脚板を取り外します。
- 1-2 小児用ギブス巻台の差込部分を手術台の差込孔に装着して、手術台の固定ハンドルを締めます。
- 1-3 手術方法に合わせて、小児用伸縮性回転ベッケン（本体のみ）・小児用伸縮性回転ベッケン用ベッケン板及び必要な手術台アクセサリを取り付けます。
- 1-4 患者を載せてポジションを設定します。

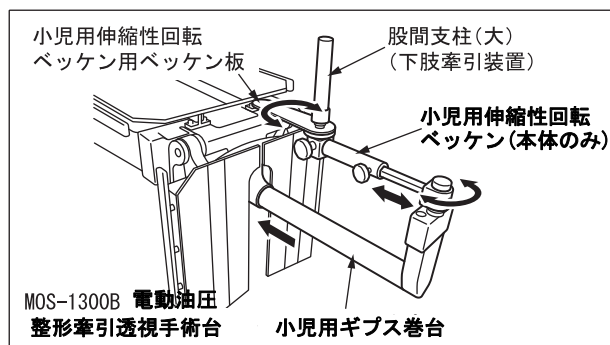

* 2. 使用可能な手術台及び手術台アクセサリ

販売名：MOS-1300 電動油圧整形牽引透視手術台

製造販売届出番号：13B1X00306N00009

販売名：MOS-1300B 電動油圧整形牽引透視手術台

製造販売届出番号：13B1X00306N00010

販売名：下肢牽引装置

製造販売届出番号：13B1X00306N10032

【使用上の注意】

* 1. 警告

締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり、動いたりして患者に障害が起きるおそれがあります。

2. 重要な基本的注意

手術台を作動するときは他の手術台アクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。

* 【保管方法及び有効期間等】

* 1. 保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

* 2. 耐用期間

適切な保守点検及び適切な保管をした場合：7年（注）

〔自己認証による〕

注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

【保守・点検に係る事項】

* <使用者による保守点検事項>

1. 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

2. 清掃・消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭してください。

3. 故障時のお願い

本装置が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

* <業者による保守点検事項>

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社千葉工場

【保証期間に係る事項】

本品は納品/設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。