

## 上肢台用固定バンド



### 【警告】

患者の任意の体位を確保するためにアクセサリで支持するときは、常に患者の状態を監視すること。【長時間の体位は神経麻痺や褥瘡の原因となります。】

### 【禁忌・禁止】

患者にバンドを無理に締め付けないこと。【患者に障害が起きることがあります。】

### 【形状・構造及び原理等】

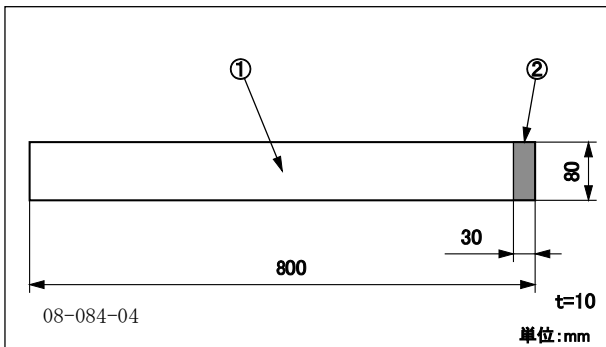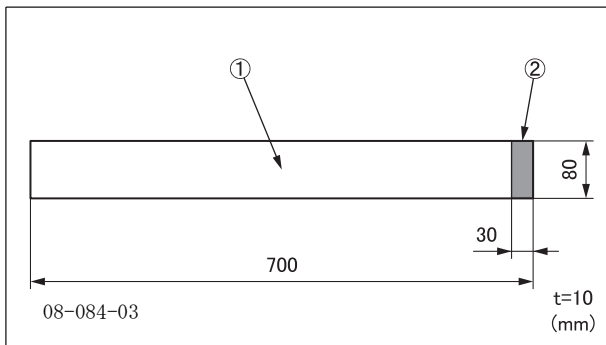


商品コード	商品名	本体質量
08-084-03	上肢台用固定バンド(1本)	0.2 kg
08-084-04	上肢台用固定バンド+10cmタイプ	0.2 kg

材質 ①ベルト: フレンチパイル ②貼付部: ベルクロファスナー

### \*\*【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリ。患者の上肢を上肢台に固定するための着脱式のバンド。

### \*\*【使用方法等】

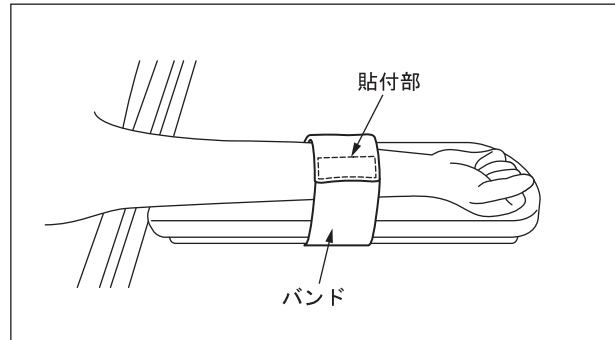

1. 患者の上肢を上肢台に乗せます。
2. 必要な位置にバンドを取り付けます。
3. バンド端の貼付部をバンド面に貼りつけて、患者の上肢を固定します。

### 【使用上の注意】

#### \*\*1. 警告

締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり、動いたりして患者に障害が起きるおそれがあります。

#### 2. 重要な基本的注意

手術台を作動するときには他の手術台アクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。

### \*\*【保管方法及び有効期間等】

#### 1. 保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

#### 2. 耐用期間

適切な保管をした場合: 7年(※)[自己認証による]

※耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該商品の交換が必要です。

### 【保守・点検に係る事項】

#### \*\*<使用者による保守点検事項>

#### 1. 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

#### \*\*2. 清掃・消毒

バンドの汚れは家庭用中性洗剤等を使用して手洗い・自然乾燥すること。洗濯により縮みや色あせが発生する場合があります。

#### \*\*3. 故障時のお願い

本装置が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

**\*\*<業者による保守点検事項>**

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

**\*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社 千葉工場

**\*\*【保証期間に係る事項】**

本品は納品/設置してから 1 年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。