

類別：機械器具（01）手術台及び治療台

一般医療機器 一般の名称：手術台アクセサリ JMDNコード：70469000

販売名：ウルトラ保護キット


## 再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

1. 他社アクセサリでは使用しないこと。[他社製アクセサリでの使用は確認していません。]
2. 本品は Disposable 製品であり、再使用しないこと。[感染の原因となります。]

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 外観図

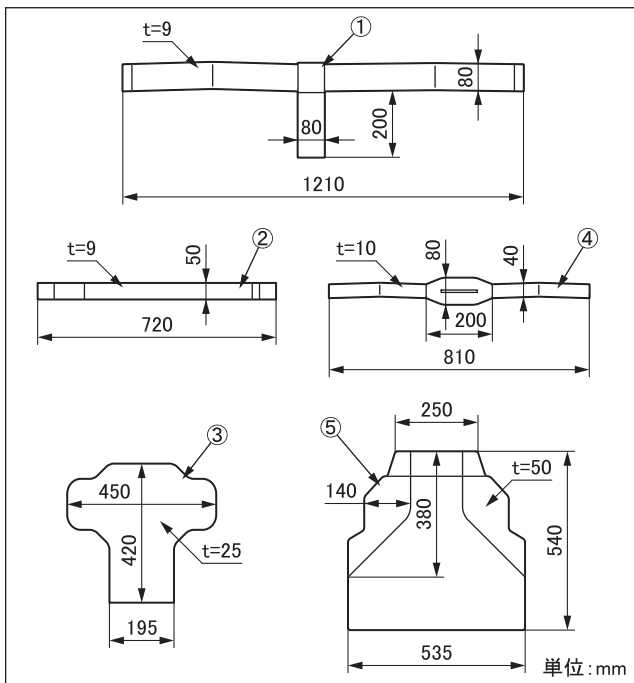

| 商品コード     | 商品名                  |
|-----------|----------------------|
| 02-143-86 | ウルトラ保護キット（5348） 3 個入 |

#### 2. 質量

- ① アーム固定ストラップ：50 g
- ② 前頭部ストラップ：13 g
- ③ ヘッドパッド：90 g
- ④ 頸部ストラップ：17 g
- ⑤ バックパッド：200 g

注：番号は1. 外観図の番号に対応

#### 3. 材質

- ① アーム固定ストラップ：ウレタン・ナイロン樹脂
- ② 前頭部ストラップ：ウレタン・ナイロン樹脂
- ③ ヘッドパッド：ウレタンフォーム
- ④ 頸部ストラップ：ウレタン・ナイロン樹脂
- ⑤ バックパッド：ウレタンフォーム

注：番号は1. 外観図の番号に対応

### 【使用目的、効能又は効果】

手術台に付属するアクセサリ。ウルトラショルダーポジショナー又はウルトラショルダーポジショナーBに取り付ける、患者を保護するための、単回使用の保護キット。

### 【品目仕様等】

#### 1. 外観


目視検査にて表面に機能を損なうような欠陥又は汚染物を認めないこと。

#### 2. 取り付け可能な手術台アクセサリ

販売名：ウルトラショルダーポジショナー  
製造販売届出番号：13B1X00306Y10015

販売名：ウルトラショルダーポジショナーB  
製造販売届出番号：13B1X00306Y10016

### 【操作方法又は使用方法等】

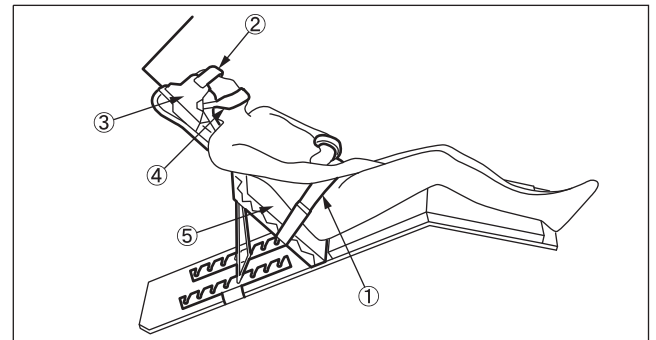

1. 手術台のサイドレールにウルトラショルダーポジショナー又はウルトラショルダーポジショナーBを取り付けます。
2. ウルトラショルダーポジショナー又はウルトラショルダーポジショナーBに①アーム固定ストラップ・②前頭部ストラップ・③ヘッドパッド・④頸部ストラップ及び⑤バックパッドを取り付けて患者を乗せます。

### 【使用上の注意】

#### 重要な基本的注意

手術台を作動するときは他のアクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意して下さい。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管して下さい。

### 【保守・点検に係る事項】

#### <使用者による保守点検事項>

使用前に「破損箇所がないこと」を確認して下さい。

### 【包装】

3 個 1 包装

**【保証期間に係る事項】**

本品は納品してから1年間を保証期間として無償交換いたします。  
但し天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は  
除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

製造販売業者：ミズホ株式会社  
〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目30番13号  
TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社千葉工場