

器01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ (70469000)

ミズホオリジナルマットレス

**


【警告】

患者の任意の体位を確保するために手術台アクセサリで支持するときは、常に患者の状態を監視すること。【長時間の体位保持は神経麻痺や褥瘡の原因になります。】

【禁忌・禁止】

1. 他社製手術台では使用しないこと。[他社製手術台での使用可能を確認していません。]
2. マットレスを消毒液に長時間浸さないこと。[劣化の原因になります。]

<ミズホオリジナルマット MOS-1101NEB 用>

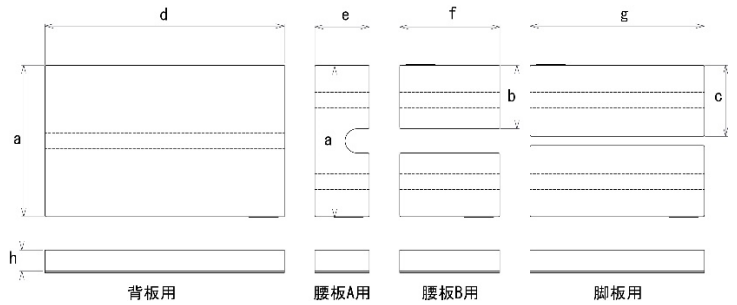

質量：3 kg

単位：mm


**

*

【形状・構造及び原理等】

1. 形状及び寸法

<ミズホオリジナルマットレス(腹臥位用)>

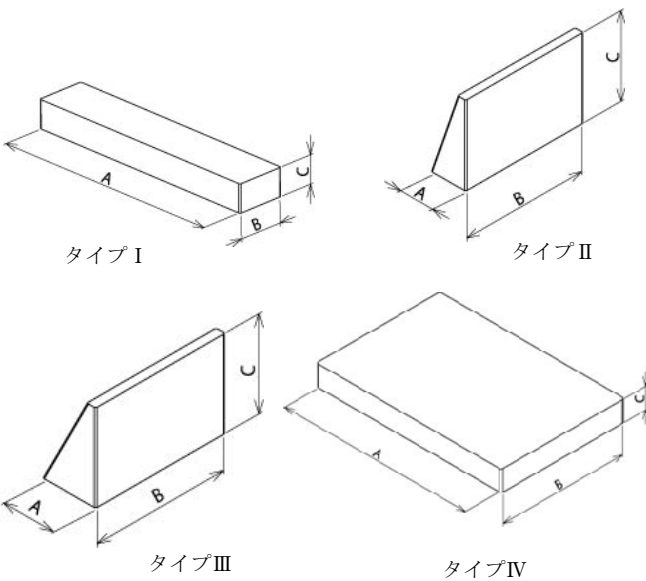


単位：mm

商品コード	商品名	タイプ	A	B	C	質量(kg)
08-055-99	ミズホオリジナルマットレス(腹臥位用)	I	800	160	90	0.60
		II	130	440	294	0.54
		III	180	440	294	0.72
		IV	450	300	50	0.36

構成 タイプ I：2 ケ、タイプ II：1 ケ、タイプ III：1 ケ、タイプ IV：1 ケ

<ミズホオリジナルマットレス (5701 用 腰脚一体型)>

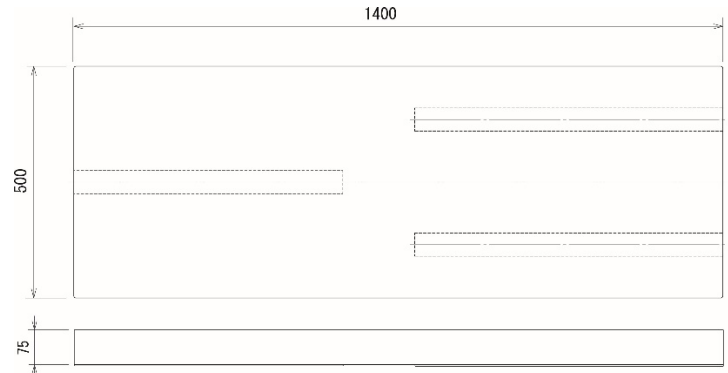


質量：2.3kg

単位：mm

商品コード	商品名
08-055-16	ミズホオリジナルマットレス(5701 用 腰脚一体型)

〈ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス〉

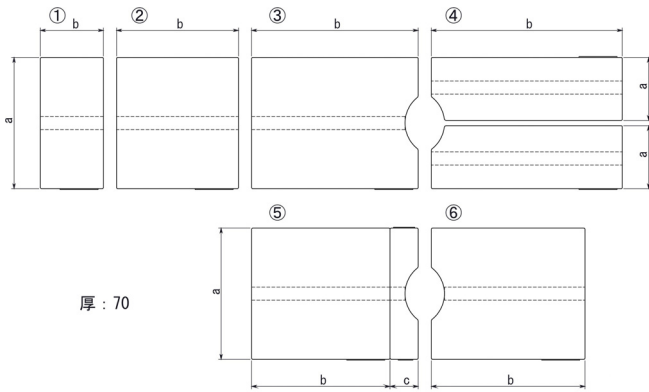

商品コード	商品名
<u>18-042-01</u>	<u>ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス</u> <u>頭板 タイプA</u>
<u>18-042-11</u>	<u>ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス</u> <u>背板 タイプA</u>
<u>18-042-22</u>	<u>ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス</u> <u>腰板 タイプA</u>
<u>18-042-23</u>	<u>ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス</u> <u>腰板 タイプB</u>
<u>18-042-42</u>	<u>ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス</u> <u>背板・腰板 タイプA</u>
<u>18-042-43</u>	<u>ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス</u> <u>背板・腰板 タイプB</u>
<u>18-042-61</u>	<u>ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス</u> <u>シングル脚板 タイプA</u>
<u>18-042-52</u>	<u>ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス</u> <u>ダブル脚板 タイプA</u>
<u>18-042-53</u>	<u>ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス</u> <u>ダブル脚板 タイプB</u>

商品コード	No.	a (mm)	b (mm)	c (mm)	質量 (kg)
<u>18-042-01</u>	<u>①</u>	<u>500</u>	<u>240</u>	<u>-</u>	<u>0.5</u>
<u>18-042-11</u>	<u>②</u>	<u>500</u>	<u>464</u>	<u>-</u>	<u>0.8</u>
<u>18-042-22</u>	<u>③</u>	<u>500</u>	<u>434</u>	<u>-</u>	<u>1.1</u>
<u>18-042-23</u>	<u>⑤</u>	<u>500</u>	<u>527</u>	<u>107</u>	<u>1.1</u>
<u>18-042-42</u>	<u>③</u>	<u>500</u>	<u>1127</u>	<u>-</u>	<u>2.2</u>
<u>18-042-43</u>	<u>③</u>	<u>500</u>	<u>1127</u>	<u>-</u>	<u>2.2</u>
<u>18-042-61</u>	<u>⑥</u>	<u>500</u>	<u>585</u>	<u>-</u>	<u>1.0</u>
<u>18-042-52</u>	<u>④</u>	<u>240</u>	<u>700</u>	<u>-</u>	<u>0.8</u> (注)
<u>18-042-53</u>	<u>④</u>	<u>240</u>	<u>700</u>	<u>-</u>	<u>0.8</u> (注)

注：左右各1個の質量。

2. 原材料


ポリウレタン
ポリウレタンフォーム
ナイロン

【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリ。体位固定時のサポートに使用する。

＊ ＊【使用方法等】

- 手術台と患者の隙間に設置する。
- 面ファスナーのあるマットレスは、マットレス②をベーク板①の面ファスナーにより固定する。

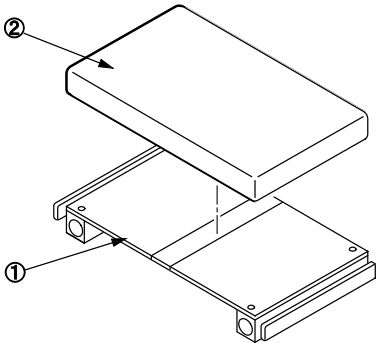

＊ ＊【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ① 衛生のため、患者が本製品に触れる部分には必ず滅菌済ドレープを使用してください。
- ② マットレスを使用する前に異物や汚れが付着していない事を確認してください。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法**
高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。
- 耐用期間**
適切な保守点検及び適切な保管をした場合：7年（注）
〔自己認証による〕
注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、マットレスの著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

- 使用前・使用後の点検**
使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。
- 清掃・消毒**
血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭してください。
- 故障時のお願い**
本装置が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

＜業者による保守点検事項＞

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： ミズホ株式会社
TEL 03(3815)3097
製造業者： ミズホ株式会社千葉工場

【保証期間に係る事項】

本品は納品/設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。