

機械器具 58 整形用機械器具

一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 (JMDN コード: 70757000)

マルチアバットメントアクセサリ

再使用禁止(スクリュードライバーを除く)

【禁忌・禁止】

【使用方法】

- ・再使用禁止(スクリュードライバーを除く)

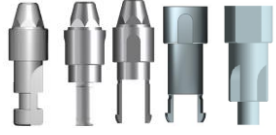
【適用対象(患者)】

以下の患者には使用しないこと。

- ・心臓病、動脈硬化症の病歴がある患者
- ・糖尿病、高血圧の患者
- ・精神的又は身体的疾患により補綴の使用が困難な患者や、手術後に合併症を引き起こす可能性のある患者への使用
- ・妊娠中の患者

【形状・構造及び原理等】

スキャンアダプター  原材料: PEEK	H-スキャンボディ  原材料: PEEK
H-スキャンボディスクリュー  原材料: チタン合金	ピックアップ印象コーピング  原材料: チタン合金
ピックアップ印象コーピング用 ガイドピン  原材料: ステンレス鋼	トランスファー印象コーピング  原材料: チタン合金
トランスファー印象コーピング用 スクリュー  原材料: チタン合金	プラスチックシリンダー  原材料: チタン合金
シリンダースキャンボディ  原材料: チタン合金	シリンダープロテクター  原材料: チタン合金

アナログ 	
ジグシリンダー 	スクリュードライバー 
アナログジグ 	アバットメントキャリア 

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる。

【使用方法等】

1.使用前

以下の条件で高圧蒸気滅菌を行う。

121℃ 20分	スクリュードライバー(再滅菌条件は同じ)
132℃ 15分	スキャンアダプター、H-スキャンボディ、H-スキャンボディスクリュー、ピックアップ印象コーピング、ピックアップ印象コーピング用ガイドピン、トランスファー印象コーピング、トランスファー印象コーピング用スクリュー、アバットメントキャリア

以下の製品は滅菌しないこと。

滅菌不可	プラスチックシリンダー、シリンダースキャンボディ、シリンダープロテクター、アナログ、ジグシリンダー、アナログジグ
------	--

2.使用方法

(1)印象採得

(デジタル印象採得の場合)

スキャンアダプター、H-スキャンボディ、H-スキャンボディスクリュー、シリンダースキャンボディ、シリンダープロテクター、ジグシリンダー、スクリードライバーを用いて印象採得を行う。

(印象内に残す場合)

ピックアップ印象コーピングをインプラントまたはアバットメントに装着し、ピックアップ印象コーピング用ガイドピンで固定する。金属間接触が確保されていることを確認し、印象材を用いて印象採得を行う。

(口腔内に残す場合)

トランスファー印象コーピングをインプラントまたはアバットメントに装着し、トランスファー印象コーピング用スクリューで固定する。金属間接触が確保されていることを確認し、印象材を用いて印象採得を行う。

(2)上部構造体の作製

印象採得後、アナログジグを用いアナログを口腔内に移動させ、通法に従って上部構造体を作製する。

ブリッジなどのフレームワークを作製する場合は、プラスチックシリンダーを用いる。

アバットメントを口腔内に移動する場合は、アバットメントキャリアを用いる。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- (1)使用者は、使用する際に本品の外観を確認し、汚れ、腐食、損傷、欠損等の異常がない事を確認すること。
- (2)過剰な外圧はかけないこと。
- (3)使用者は、本品の使用に際し、あらかじめ手技及びその手順について十分に熟知した後使用すること。
- (4)本品は未滅菌製品であるため、滅菌不可の製品を除き、口腔内に適用する前には必ず滅菌すること。
- (5)本品は、歯科医療有資格者以外使用しないこと。
- (6)本品専用のインプラント以外と併用しないこと。

〔妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用〕

本品は新生児・低出生体重児へは対応していないため、使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・室温で保管する。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

〔有効期間〕

外箱の表示に記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

EPJ メディカルサービス株式会社
TEL : 03-5614-2759

〔製造業者〕

DIO コーポレーション
DIO Corporation (大韓民国)