

医療用品 03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN コード:70976000

再使用禁止

検査・検診用ニトリルグローブ パウダーフリー

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、ニトリルゴムを主原料とする、未滅菌、粉無しの、検査・検診用使い捨て手袋である。青色タイプと白色タイプの 2 種類がある。

表面仕上げ: T(指先エンボス付き)

呼び(サイズ): S、M、L、XL

サイズ	S	M	L	XL
全長 [mm]	≥230			
掌幅 [mm]	80	95	110	120

※ASTM D6319 に準拠(掌幅はおよその寸法を記載)

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合に、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

【使用方法等】

取り出し口から本品を取り出し、手に装着する。

【使用上の注意】

(重要な基本的注意)

- アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
- 高濃度の薬品や溶剤には長時間使用しないでください。
- 油類が付いた場合は早めに洗い落としてください。
- 火、熱、熱湯など熱いものに触れさせないでください。
- 爪先、刃物や尖ったものなどで傷をつけないように注意してください。
- この製品は使い捨てのため、使用は 1 回限りとし、使用後は直ちに廃棄してください。

【保管方法及び有効期間等】

(保管方法)

- 水濡れに注意して、直射日光及び高温・多湿を避けて保管してください。開封後は、直射日光や蛍光灯等の紫外線を避けて、エックス線機器等に近づけないでください。

(有効期間)

- 製造より 5 年間[自己認証による。]
- 使用期限は本品の包装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(製造販売業者)

興和株式会社

東京都中央区日本橋本町三丁目 4 番 14 号

TEL (03) 3279-7844

(外国製造業者)

Anhui Intco Medical Products Co., Ltd. (中華人民共和国)