

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯面研磨材 (70904000)

プロキシット

【形状・構造及び原理等】

- [形状] チューブ入りペースト
- [種類] ピンク(低研磨性 / 細 / ファイン)
グリーン(中研磨性 / 中 / ミディアム)
ブルー(高研磨性 / 粗 / コース)
F フリー グリーン(中研磨性 / 中 / ミディアム)
- [原理] ペースト状の研磨材で、ブラシ、歯磨
カップ等を用いて歯面を研磨する。
- [成分] キシリトール、ミント等

【使用目的又は効果】

ペースト状の研磨材で、予防治療ブラシ、歯磨カップ等を用いて歯面を研磨し、歯面の清掃及び研磨に用いる。

【使用方法等】

1. 適量の本品を歯磨カップ等、適切な研磨器上にチューブから押し出す。
2. ハンドピースで歯面全体を丁寧に研磨する。
3. 研磨後、口をすすぐ。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

1. 本品使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、直ちに医師の診断を受けさせること。
2. 本品に対して発疹、皮膚炎等の過敏症のある術者は、手袋等を用いて、直接本品に触れないようにすること。
3. ブルー/コースで研磨した後は、ピンク/ファインで必ず再研磨すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

[貯蔵・保管方法]

1. 直射日光の当たらない場所に保管すること。
2. 外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。
3. 製品に記載の使用期限までに使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売元]

Ivoclar Vivadent株式会社
電話 03-6801-1301 Fax 03-5844-3657
www.ivoclarvivadent.com

[製造元]

Ivoclar Vivadent AG(リヒテンシュタイン侯国)