

機械器具48 注射筒
一般医療機器 汎用注射筒 13929001

VBM SGAシリンジ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

〈併用医療機器〉

- * 1) 本品は、LT/LTS「販売名：VBMラリゲルチューブ（承認番号：21700BZY00012000）」、LTS-D「販売名：VBMラリゲルチューブ・ディスボ（認証番号：227AIBZX00021000）」以外と使用しないこと。

* 【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉

54-04-111-A LT/LTS/LTS-D（サイズ0、1）用 20mLシリンジ
54-04-444-A LT/LTS/LTS-D（サイズ2、2.5、3）用 60mLシリンジ
54-04-555-A LT/LTS/LTS-D（サイズ4、5）用100mLシリンジ



・未滅菌

【使用目的又は効果】

〈使用目的〉


ガスを注射・注入するか引き抜くために用いる器具をいう。プラスチック製で、目盛付の容器及びプランジャから成る。

【使用方法等】

〈空気の注入〉

カフプレッシャージがない場合には、本品で以下の量を目安に空気を注入します。本品には以下の量の位置に各サイズが表示されています。


サイズ0	10mL
サイズ1	20mL
サイズ2	35mL
サイズ2.5	40～45mL
サイズ3	50～60mL
サイズ4	70～80mL
サイズ5	80～90mL

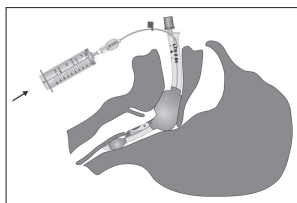

〈空気の脱気〉

本品を使って、カフから空気を完全に抜いてから、チューブを引き抜きます。

注意 ラリゲルチューブを抜管する際は、本品で両方のカフを完全に脱気します。咽頭カフは容量が大きいため抵抗を感じるまで本品で完全に脱気してください。

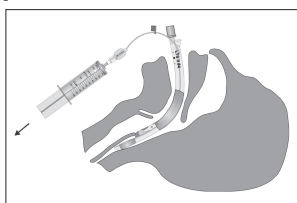

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) 開封後、直ちに使用すること。使用しなかった場合は、再滅菌せずに廃棄すること。

- 2) 空気を注入・脱気する際は、バルブに本品先端をしっかり押し込むこと〔本品の先端が浅い挿入では空気を注入・脱気できないことがあるため〕。万が一、脱気できない事態が発生した場合は、インフレーションラインの切断、又はカフの穿孔により脱気し、注意してチューブを取り除くこと。

〈その他の注意〉

- 1) 本品は訓練を受けた専門の医療従事者のみが使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

本品を保管するときは次の事項に注意すること。

- ・水濡れ、高温多湿および直射日光を避けて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

- * 保管時（運搬時も含む）は、元のパッケージに入れること。

〈有効期間〉

- ・本品の包装に記載されている「有効期間」までに使用すること〔自己認証（当社データ）による〕。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

* 〈製造販売業者〉

smiths medical

スミスメディカル・ジャパン株式会社

<http://www.smiths-medical.com/jp/>

* 〈問合せ先〉

フリーダイヤル 0120-582-855

〈製造業者〉

VBM メディツインテヒニーク GmbH

VBM Medizintechnik GmbH

〈国名〉

ドイツ