



IOLDI202B

*2016年4月（第2版）（新記載要領に基づく改訂）
2015年7月（第1版）

届出番号：13B1X10107000059

機械器具32 医療用吸引器
一般医療機器 吸引器用キャニスタ 34858000

リセプタル排液吸引システム (外付シャットオフバルブ)


再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉

433096111 外付シャットオフバルブ

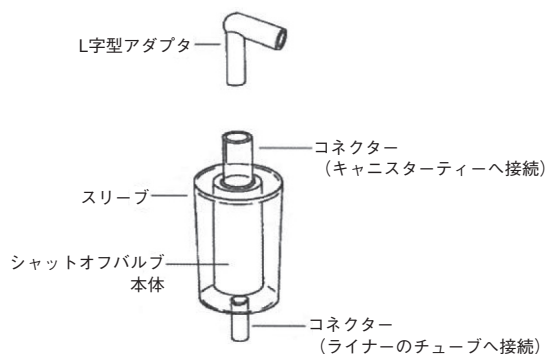

本品はライナーからのオーバーフロー及び院内セントラルバキュームシステムの汚染を防ぐためのバルブである。キャニスターのキャニスターティーとセントラルバキュームシステムの間にセットし、オーバーフロー及び院内のセントラルバキュームシステムへの流出を防止する。

・未滅菌


【使用目的又は効果】

体液回収のため吸引器とともに使用するライナー、キャニスター及びその付属品である。

【使用方法等】

A. シングルキャニスターの場合のセットアップ

1. 使用環境に応じて適したオプションを次の中から選択します。

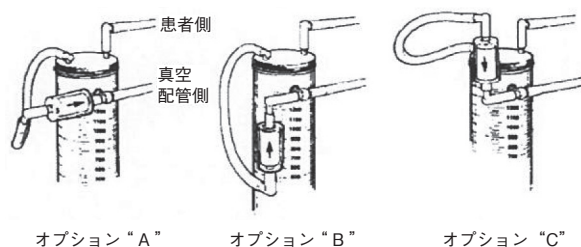


オプション "A"

オプション "B"

オプション "C"

- 外付シャットオフバルブの太い方のコネクタをキャニスターティーに取り付けます。コネクタの外径が異なるため、接続を逆にすることはできません。必要に応じて付属のL字型アダプタを用います。
- ライナーのチューブを外付シャットオフバルブに取り付けます。
- 吸引圧低下を防止するため、接続箇所はしっかりと取り付けます。

B. 連結使用時の場合のセットアップ

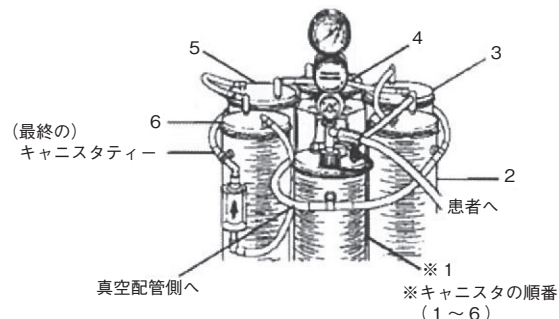

- 連結使用時は、図に示すように、外付シャットオフバルブを最後のキャニスターティーに接続します。
- 最後のライナーのチューブを外付シャットオフバルブに取り付けます。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- バルブ本体内に排液が流入したり変色した場合は、交換すること〔吸引圧が低下するため〕。このような現象が見られない場合も、院内の規程に従い、交換すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- 本品を保管するときは次の事項に注意すること。
- ・水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
 - ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
 - ・保管時（運搬時を含む）は、過度な振動・衝撃等に注意すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

* 〈製造販売業者〉

smiths medical

スミスメディカル・ジャパン株式会社

<http://www.smiths-medical.com/jp/>

* 〈問合せ先〉

フリーダイヤル 0120-582-855

〈製造業者〉

アムシノ メディカル (シャンハイ) コ、エルティディ

AMSINO MEDICAL (SHANGHAI) CO., LTD.

〈国名〉

中華人民共和国