


機械器具32 医療用吸引器
一般医療機器 吸引器用キャニスタ 34858000

リセプタル排液吸引システム (キャニスター)

【形状・構造及び原理等】

** (形状・構造)

134498201 キャニスター1000mL用
434230421 キャニスター1500mL用
434450411 キャニスター2000mL用
435036118 キャニスター3000mL用
443000415 キャニスターティアー

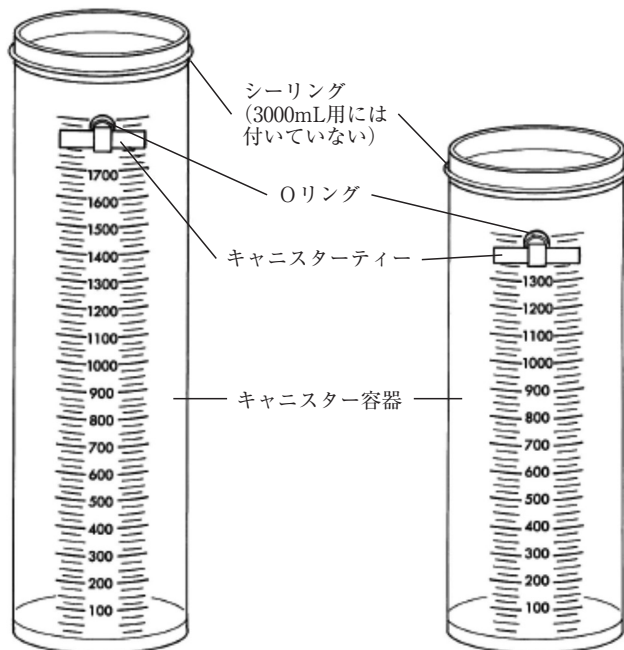

図は2000mLライナー用（左）と1500mLライナー用（右）

ライナーを保持するための目盛付き円筒型容器である。容量は、1000mL、1500mL、2000mL、3000mLの4種類がある。本品は内部にライナーを嵌め合せて、排出液を回収する。
・未滅菌

【使用目的又は効果】

体液の回収のため吸引器とともに使用するライナー、キャニスター及びその付属品である。

【使用方法等】

1. リセプタル排液吸引システムのライナーの添付文書に従って、適切なサイズのライナーやチューブをセットします。
2. おおよその排液量を確認する際は、患者側ポートの吸引を行っている状態で、キャニスターの目盛を参照して測定します。

【使用上の注意】

(重要な基本的注意)

- 1) キャニスターのサイズに合ったリセプタル排液吸引システムのライナーと併用すること。
- 2) キャニスターの内部を乾燥させておくこと [ライナーのはり付きを避けるため]。

【保管方法及び有効期間等】

(保管方法)

本品を保管するときは次の事項に注意すること。
・水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
・保管時（運搬時も含む）は、過度な振動・衝撃等に注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用后、キャニスターを院内の規程に従って、洗浄します。なお、血液、体液等が付着した場合は、滅菌してください。本品は、オートクレーブ（121℃）で処理することができます。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

* (製造販売業者)

smiths medical

スミスメディカル・ジャパン株式会社

<https://www.smiths-medical.com/ja-jp>

(問合せ先)

フリーダイヤル 0120-582-855

(製造業者)

アムシノ メディカル (シヤンハイ) コ、エルティイデイ
Amsino Medical (Shanghai) Co., Ltd.

(国名)

中華人民共和国