



IOLDI204B

*2016年4月（第2版）
2015年7月（第1版）

届出番号：13B1X10107000059


機械器具32 医療用吸引器
一般医療機器 吸引器用キャニスタ 34858000

リセプタル排液吸引システム (アキュメジャー)

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】
〈形状・構造〉
433060411 アキュメジャー

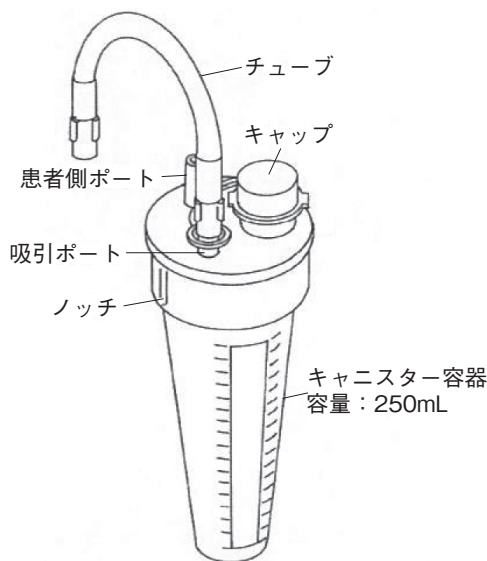

本品は排出液回路に組み込んだ状態で、排出量を計量することができる。
・未滅菌

【使用目的又は効果】
体液回収のため吸引器とともに使用するライナー、キャニスター及びその付属品である。

【使用方法等】

A.アキュメジャーの取り付け

1. アキュメジャーの側面にあるノッチをキャニスターに取り付けたブラケットにあわせ、下方に向かって注意しながら差し込みます。
2. アキュメジャーの吸引ポートに、チューブの片側を接続します。
3. チューブのもう一方をライナー（別売）の患者側ポートに接続します。
4. 患者側チューブをアキュメジャーの患者側ポートに接続します。

B.アキュメジャーからライナーへの排出液の移し替え

1. 吸引を続けたまま、アキュメジャー及びライナー双方の患者側ポートの接続と、排出口のキャップが確実に閉まっていることを確認します。
2. ブラケットからアキュメジャーを取り外します。
3. アキュメジャーをゆっくり上下逆にして、排出液をライナーに移します。
4. アキュメジャーを元の向きに戻し、再びブラケットに取り付けます。

C.アキュメジャーの取り外し

1. アキュメジャーの患者側ポートから患者側チューブを取り外します。
2. アキュメジャーのチューブをライナーの患者側ポートから取り外し、アキュメジャーの患者側ポートに接続します。
3. アキュメジャーをブラケットからゆっくりと取り外します。

D.アキュメジャーの廃棄

汚染に注意し、院内の規程に従って、次のいずれかの方法で廃棄します。

1. アキュメジャーをそのまま廃棄します。
2. キャップを取り外し、アキュメジャーを傾けて内容物を空にし、アキュメジャーを廃棄します。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) リセプタル排液吸引システムのライナーに接続して使用すること。
- 2) オートクレーブにかけないこと [変形する恐れがあるため]。

〈不具合・有害事象〉

本品の使用に際して、以下のような不具合が発生する可能性がある。

- *1) その他の不具合
 - ・本体の破損

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- 本品を保管するときは次の事項に注意すること。
- ・水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
 - ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
 - ・保管時（運搬時も含む）は、過度な振動・衝撃等に注意すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*〈製造販売業者〉

smiths medical

スミスメディカル・ジャパン株式会社

<http://www.smiths-medical.com/jp/>

*〈問合せ先〉

フリーダイヤル 0120-582-855

〈製造業者〉

アムシノ メディカル (シャンハイ) コ、エルティディ

AMSINO MEDICAL (SHANGHAI) CO., LTD.

〈国名〉

中華人民共和国