

機械器具51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 輸液用アクセサリセット 70326001

輸液セット用アクセサリ


再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉

(1) 24-1009-64 NRFitコネクタ用メスキャップ

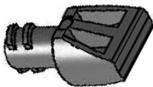

(2) 24-1004-64 NRFitコネクタ用オスキャップ



〈原材料〉

No.	名称	原材料
(1)	NRFitコネクタ用メスキャップ	ABS樹脂
(2)	NRFitコネクタ用オスキャップ	ポリブチレンテレフタレート

〈滅菌方法〉

エチレンオキシドガス滅菌

【使用目的又は効果】

〈使用目的〉

輸液セットなどに用いるアクセサリセットである。キャップ類、コネクタ類、アダプタ類等からなる。

【使用方法等】

1. 本品を包装から取り出します。
2. 汚染に注意し、チューブ端のコネクタ等のロック部に回転させながら装着します。
3. 薬液等が漏れないように注意し、速やかに接続してください。
4. 接続部のゆるみがないか十分確認してから、輸液セット等の使用を開始してください。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) 開封後、直ちに使用すること。使用しなかった場合は、再滅菌せずに廃棄すること。
- 2) アルコールを使用してコネクタを消毒した場合は、完全に乾いてから接続すること。濡れたまま接続すると、滑りにより強く締め付け過ぎ、コネクタが固着あるいはひび割れが発生する可能性がある。ライン交換時の締め直し、過度な締め付け及び増し締め等は、ひび割れの発生を助長する要因となるので注意すること。ひび割れが確認された場合には、直ちに新しいものと交換すること。

〈不具合・有害事象〉

本品の使用に際して、以下のような不具合・有害事象が発生する可能性がある。

- 1) その他の不具合
・破損、液漏れ

〈その他の注意〉

- 1) 本品を使用する場合は無菌操作で行い、細心の注意を払うこと
〔硬膜外腔や、くも膜下腔の感染を防止するため〕。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

本品を保管するときは、次の事項に注意すること。

- ・水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
- ・保管時（運搬時も含む）は、過度な振動・衝撃等に注意すること。

〈有効期間〉

・本品の包装に記載されている「有効期間」までに使用すること〔自己認証（当社データ）による〕。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

smiths medical

スミスメディカル・ジャパン株式会社

<https://www.smiths-medical.com/ja-jp>

〈問合せ先〉

フリーダイヤル 0120-582-855

〈製造業者〉

スミス メディカル チェコリパブリック a.s.

Smiths Medical Czech Republic a.s.

〈国名〉

チェコ共和国