

機械器具 54 医療用捲綿子

一般医療機器 眼アプリケーション (JMDN: 10175000)

メロセルアイスピア

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 眼科手術において適用対象組織を特定してあるものは特定組織以外の組織には絶対に使用しないこと。
2. 本品の改造・調整などの二次加工は壊れの原因になるので絶対にしないこと。
3. 本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。
4. 再使用禁止

* 【形状、構造及び原理等】

細い棒(柄)の片端に三角状の吸水スポンジが取り付けられている。

<形状>

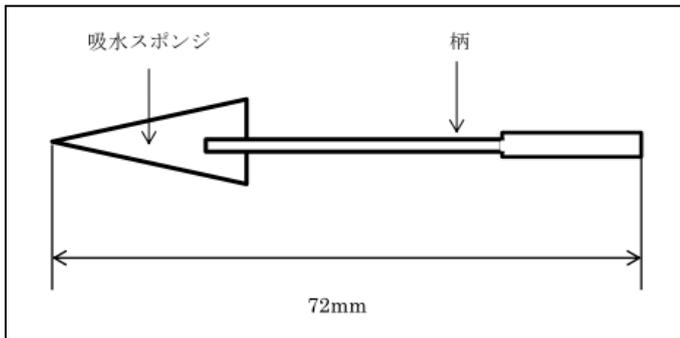

製品番号	商品名	入数
400101	メロセルアイスピア (180本入)	180本 (10本/袋×18)
405101	メロセルアイスピア (50本入り)	50本 (5本/袋×10)

【使用目的、効能又は効果】

眼科手術・処置時、排出物及び薬液等を吸収・除去し、視認性を確保する。

** 【原材料又は構成部品】

吸水部: PVA (ポリビニルアルコール)
柄: ポリプロピレン

【品目仕様】

ISO 10993-1: 2009 に準ずる。

【操作方法又は使用方法等】

柄を持ち、吸水スポンジの先端を適用箇所当てて吸収する。

【使用上の注意】

- (1) 包装・製品に破損や異常が認められる場合は使用しないこと。
- ** (2) 使用前に先端部分に埃、異物等が付着していないことを確認すること。
- (3) 開封後はすぐに使用すること。開封し、使用しなかったものは廃棄すること。
- (4) 使用目的以外の目的で使用しないこと。
- (5) 使用後は医療廃棄物として適切な処理を行うこと。
- * (6) 使用前に滅菌包装に記載されている使用期限を必ず確認し、使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

<貯蔵・保管方法>

高温・多湿・直射日光を避けて保管すること。

* <使用期限>

外箱及び包装に記載

** 【包装】

- 5本 / 袋
- 10本 / 袋
- 50本 / 箱
- 180本 / 箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者:

ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町二丁目13番9号
TEL 03-5651-2861/ FAX 03-3662-2565

外国製造業者:

*ビーバービジテックインターナショナル インク
(Beaver-Visitec International, Inc.)
国名: 米国

**メドソープ ドミニカナ、エス、エイ
(Medsorb Dominicana, S.A.)
国名: ドミニカ共和国