

機械器具 54 医療用捲綿子
一般医療機器 眼アプリケータ 10175000

メロセルアイスパ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 眼科手術において適用対象組織を特定してあるものは特定組織以外の組織には絶対に使用しないこと。
2. 本品の改造・調整などの二次加工は解れの原因になるので絶対にしないこと。
3. 本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。
4. 再使用禁止

- ・開封後はすぐに使用すること。開封し、使用しなかったものは廃棄すること。
- ・使用後は医療廃棄物として適切な処理を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

水ぬれに注意し、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。


〈有効期間〉

外箱及び包装に記載（自己認証による。）

【形状、構造及び原理等】

細い棒（柄）の片端に三角状の吸水スポンジが取り付けられている。

〈形状〉

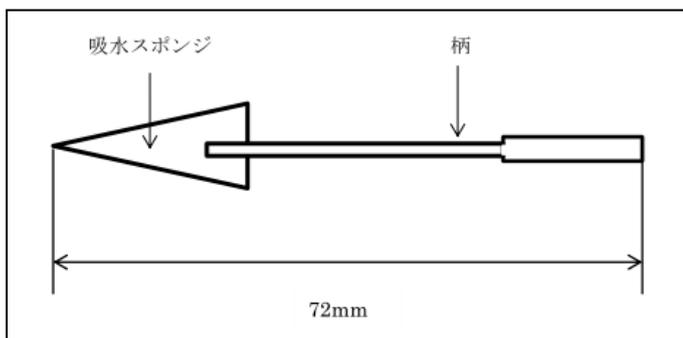

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

ビーバービジテックインターナショナルジャパン株式会社

TEL 03-5651-2861/ FAX 03-3662-2565

外国製造業者：

ビーバービジテックインターナショナル インク

(Beaver-Visitec International, Inc.)

国名：米国

*メドソープ ドミニカナ、エス、エイ

(Medsorb Dominicana, S.A.)

国名：ドミニカ共和国

製品番号	商品名	入数
400101	メロセルアイスパ (180本入)	180本 (10本/袋×18)
405101	メロセルアイスパ (50本入り)	50本 (5本/袋×10)

【使用目的又は効果】

眼科手術・処置時、排出物及び薬液等を吸収・除去し、視認性を確保する。

**【原材料又は構成部品】

吸水部：PVA（ポリビニルアルコール）

【使用方法等】

柄を持ち、吸水スポンジの先端を適用箇所に対して吸収する。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ** ・術中、乾燥状態にある部位で使用しないこと[組織を傷つけるおそれがあるため。]
- * ・使用前に先端部分に埃、異物等が付着していないことを確認すること。