

** 除細動未就学児用パッド 1

再使用禁止

【警告】

** 1. 使用方法

- **・電極パッドの使用法や装着法を誤らないこと。[傷病者が火傷を負ったり、治療効果が得られない恐れがある]
- ・2つの電極パッドが互いに触れないようにすること。
また、ケーブル（除細動電極パッドリード線）などに触れないようにすること。[動作不良や電流が流れる恐れ]
- **・除細動を行う際に、電気ショックに対する保護を備えていない医用電気機器を傷病者から取り外すこと。【高電流が流れる恐れ】
- **・本品は未就学児用であるため、小学生～大人には使用しないこと。【治療効果が得られない恐れ】

【禁忌・禁止】

** 1. 使用方法

再使用禁止

本品は一回限り使用のディスポーザブル品であるので、再使用しないこと。


* ** 2. 併用医療機器

本品は、指定された医療機器以外の機器と組み合わせて使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

** 1. 構成

** (1) 未就学児用電極パッド

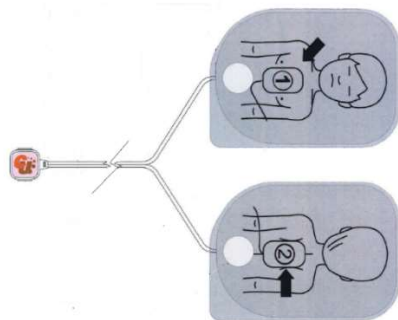

* <外観>

** (2) 組み合わせ可能な医療機器

販売名	製造販売業者	承認番号
シーユー-SP1	株式会社 CU	22500BZX00338000
ジェイパッド CU-SP1	株式会社 CU	22500BZX00338A01
IPAD シーユー-SPR	株式会社 CU	30300BZX00265000

2. 動作原理

- * ** 本品は未就学児（およそ 6 歳未満）傷病者の胸部と背中に一対の電極パッドを貼付し、電極パッドの貼付部ゲル及び電極等の伝導体により、ケーブル及びコネクタを通して除細動器本体に接続され、心電図測定、解析及び傷病者に除細動ショックを実行する。

**【使用目的又は効果】

本品は正常な心拍の回復のため、除細動器から傷病者に制御された電気ショックを伝達するために用いる導体である。

**【使用方法等】

** 1. 保管

- ・本品は、使用時のみ除細動器に接続して下さい。すぐに使えるように除細動器の近くに保管して下さい。

** 2. 使用方法

- **・袋から電極パッドを取り出します。
- **・電極パッドの接続コネクタを除細動器の差込口に差しこんで下さい。
 - ・電極パッドを保護シートからはがします。
- **・電極パッドの伝導ゲルが乾燥していないかを確認します。もし乾燥していたら使用しないで破棄し、新しいものと交換して下さい。
- *・電極パッドに表示されている図を参照し、傷病者の胸部と背中に貼り付けます。
 - ・除細動器を起動して、その音声ガイドにしたがって下さい。

** 3. 使用後

- ・電極パッドは使い捨ての為、すぐに新しい電極パッドと交換する。

【使用上の注意】

** 1. 重要な基本的注意

- **・袋に表示された使用期限を過ぎた電極パッドは、使用しないこと。
- **・袋が破損している場合、又は既に開封されている場合は使用しないこと。
 - ・除細動中は、傷病者、ケーブル、電極パッドに接触しないこと。
 - ・電極パッドは、使用する直前までパッケージを開封しないこと。電極パッドが破損している場合、又はゲルが乾いている場合は使用しないこと。
 - ・電極パッドの装着が悪い場合は、新しい電極パッドと交換すること。
- **・装着した電極パッドを長時間使用する場合は、24 時間毎に交換すること。
- **・電極パッドは滅菌しないこと。
 - ・電極パッドは折り曲げたり、丸めたり、穴など開けないこと。
 - ・一度使用したものは、再使用しないこと。
- * **・本品は、未就学児（およそ 6 歳未満）専用である。小学生～大人には使用しないこと。
- * **・除細動器のモードを必ず未就学児用モードに設定し、使用すること。
- **・予備の電極パッドを備えて置くこと。
- **・電極パッドは根本の部分を持ってシートからはがすこと。電極パッドのケーブルや電極パッドの上部を持ってはがさないこと。
- **・本品は水または液体に浸さないこと。

取扱説明書を必ずご参照ください。

**** 2. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用**

小児（未就学児およそ6歳未満）への適用

・未就学児に使用する場合には、電極パッドを胸部と背中に装着すること。胸部と背中に装着することが出来ない場合に、胸部と胸部への装着を禁止・禁忌とするものではないが、この場合には特に、2枚の電極パッドが互いに触れないようにすること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法

保管温度：0℃～50℃

湿度：湿気のない場所に保管すること。

*使用期限：パッケージに記載

【包装】

一個単位で梱包

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

*製造販売業者名：株式会社 CU

住 所：東京都港区虎ノ門一丁目2番10号

電 話：03-6205-7385

F A X：03-6205-7386

**製造業者名：CU Medical Systems, Inc. (韓国)

住 所：130-1,Dongwhagongdan-ro,Munmak-eup,
Wonju-si,Gangwon-do,Korea