

*2018 年 4 月改訂 (第 2 版)
2018 年 3 月制定 (第 1 版)

医療機器届出番号: 13B1X10163000323

一般医療機器 歯科材料(08) 歯科用石こう及び石こう製品
歯科用樹脂系模型材 34811000

ストローマン 歯科用樹脂系模型材 SHR

【形状・構造及び原理等】

1. 品目の概要

本品は、歯科用模型及び修復物の作製過程で用いる高分子からなる材料である。

*2. 構成品

本体

名称	製品番号	機能等
ジンジャイバ マスク	SD400100	紫外線で硬化する樹脂である。
モデル Plus グレイ UV	SD400382	
モデル Plus サンド UV	SD400383	

付属品

名称	製品番号	機能等
UV照射器	SD104501	作製後、表面硬化を行う。

*3. 形状、構造及び寸法


1) 形状、寸法及び重量(許容誤差: ±10%)

(1) 本体(ジンジャイバ マスク及びモデル Plus サンド UV、モデル Plus グレイ UV)

性状: 液体

容量: 1,000g

(2) 付属品

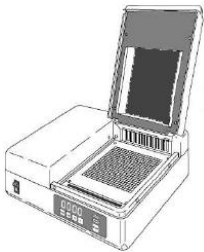

供給波長域: 280～700nm

電源: 交流100～230V、50/60Hz

電力消費: 250W

幅x高さx奥行: 310x140x310 mm

重量: 約7kg

4. 原理

本樹脂は紫外線で硬化する。

【使用方法】

1. 使用環境

温度: 23±2℃

2. 使用方法

1) 加工機で作製を行う。

2) ブラシ、超音波洗浄器等を用いて作成物を洗浄する。

3) 乾燥する。

4) UV照射器を用いて表面硬化を行う。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: ストローマン・ジャパン株式会社

連絡先: 0120-418-320

外国製造業者: SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG

外国製造業者国名: ドイツ