

類別 器 58 整形用機械器具
一般的名称 骨手術用器械 JMDN70962001
一般医療機器

販売名 マーチン ヘッドレスボーンスクリュー専用手術器械

【警告】

本品に傷及び錆などが見られる場合は使用しないこと。術中に破損の危険がある。

【禁忌・禁止】

併用医療機器

マーチン ヘッドレス・ボーンスクリュー システム（医療機器承認番号：21200BZY00180000）による骨接合手術以外に使用しないこと。

＜使用方法＞

本製品を曲げ、切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）することは、折損の原因となるので絶対に行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状

本品はマーチン ヘッドレス・ボーンスクリュー システム（医療機器承認番号：21200BZY00180000）用の手動式手術器械類です。

【使用目的又は効果】

性能

本品は指定したインプラントと組み合わせて使用する目的で設計されたものである。また、本品は再使用でき、高圧蒸気滅菌に耐える設計となっている。

使用目的

骨の手術のために用いる。
本品は以下のインプラントの手動式器械類である。
販売名：マーチン ヘッドレス・ボーンスクリュー システム
申請者：日本マーチン株式会社
承認番号：21200BZY00180000

【使用方法等】

使用方法

骨の手術の際に、マーチンヘッドレスボーンスクリューを使用する場合に使用する。その際には手術手技書を参照すること。

【使用上の注意】

その他の注意

- 1) 使用前に必ず洗浄・滅菌（保守・点検に係る事項参照）すること。
- 2) 使用目的（手術・処置等の医療行為）以外の目的で使用しないこと。また、折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力を加えないこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- 1) 貯蔵・保管に当たっては、洗浄をした後、腐蝕を防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥をすること。
- 2) 滅菌済みのものを貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管をするとともに、有効保管期間の管理をすること。

【取扱い上の注意】

- 1) 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
- 2) 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になるのでできるだけ使用を避けること。使用中に付着した時には水洗いすること。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、職業感染防止のために洗浄・消毒すること。
- 2) 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
- 3) 洗剤の残留がないように十分にすすぎをすること。仕上げすすぎには、浄化水（濾過、蒸留、脱イオン化等をおこなった水）を用いることを推奨する。
- 4) 洗浄後は、腐蝕防止のために、直ちに乾燥すること。
- 5) 可動部のあるものは可動部の動きをスムーズにするために必要に応じて水溶性潤滑剤を塗布することを推奨する。その場合は潤滑剤の取扱説明書を参照の上使用すること。
- 6) 使用（滅菌）前に、汚れ、傷、曲がり、可動部の動き等に異常がないか点検をすること。
- 7) 点検後、セット・包装をし、高圧蒸気滅菌をすること。なお、滅菌のためのセット・包装にあたっては、可動部は開放するなど、確実に滅菌できるよう配慮すること。
- 8) 強アルカリ／強酸性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させるおそれがあるので、使用を避けること。
- 9) 金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、器具の表面が損傷するので汚物除去及び洗浄の時、使用しないこと。

【主要文献及び文献の請求先】

文献請求先

日本マーチン株式会社（下記）

【製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

日本マーチン株式会社
東京都文京区西片 1-15-15
TEL 03-3814-1481

製造業者

Gebrüder Martin GmbH & Co.KG
ゲブリューダー マーチン社
ドイツ