

類別 機械器具 36 医療用ピンセット
一般的名称 ピンセット 35079001
一般医療機器

販売名 マーチン マイクロ鑷子

*【禁忌・禁止】

- ・本品を曲げ、切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）することは、折れなどの原因になるので、絶対に行わないでください。

【形状・構造及び原理等】

形状

本品の形状の代表例として以下のものがある。



作動・動作原理

開いた 2 枚の刃（先端部）を閉じることによって物体を挟み保持する。

*【使用目的又は効果】

使用目的

保持する物体を閉じて挟む。

使用目的又は効果に関連する使用上の注意

本品を目視により観察するとき、ひび、バリ、凹み、錆、汚れなど、使用上支障をきたすような異常がないこと。

【使用方法等】

使用方法

1. 本品は再使用可能な機器であり、未滅菌品です。
2. 本品を使用する前に必ず【保守・点検に係る事項】を参照して、洗浄・滅菌をすること。
3. 一般的な外科手術の手技に従って、適切な組み合わせのもとに操作してください。
4. 使用後は適切な方法により洗浄を行い保管してください。

【使用上の注意】

*その他の注意

- ・器具・器械の寿命低下の原因となりますので、先端を損傷したり、硬いものに接触させたりして変形や損傷をさせないでください。
- ・本品を使用するにあたっては、装置と技術に対する適切な理解が必要です。手技に習熟した方以外は使用しないでください。
- ・誤った使用法は本品の損傷を招く恐れがあります。
- ・本品を取り扱う際は、思わぬ怪我を避けるため先鋭部等に細心の注意を払うとともに、包装から取り出し洗浄・滅菌を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ・高温多湿、直射日光及び水濡れを避け、風通しの良い清

潔な場所に保管すること。

- ・化学薬品の保管場所やガスが発生する場所には保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄方法

- 1) 汚れが落ちにくくなることを防ぐため、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに洗浄し、消毒を行ってください。
- 2) 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、その適正濃度と取扱方法を守ること。
- 3) 超音波洗浄装置・ウォッシャー・ディスインフェクター等の洗浄装置で洗浄する場合、汚れが落ちやすい状態でバスケットなどに収納して処理する。
- 4) 金属タワシ、クレンザー（磨き粉）等は、器具表面を損傷するので使用を避けること。
- 5) 仕上げすぎには、精製水・脱イオン水・濾過水等の使用を推奨する。

2. 滅菌方法

- 1) 滅菌前に、汚れ、傷等異常がないか点検をすること。
- 2) 点検後、セット・包装をし、高圧蒸気滅菌をすること。なお、眼金のためのセット・包装にあたっては、確実に滅菌できるよう配慮すること。
- 3) 高圧蒸気滅菌の滅菌条件は、各施設で定められた基準に従って行うこと。なお、製造元が推奨する滅菌条件の一例を以下に示す。

<推奨滅菌条件>

121℃ 20 分間

126℃ 15 分間

134℃ 5 分間

*【主要文献及び文献の請求先】

文献請求先

日本マーチン株式会社（下記）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

日本マーチン株式会社

東京都文京区西片 1-15-15

TEL03-3814-1431

*外国製造業者

カール ライビンガー メディツィンテックニク有限合資会社

Karl Leibinger Medizintechnik GmbH & Co. KG

ドイツ連邦共和国