

機械器具 42 医療用剥離子

一般医療機器 へら (JMDNコード：13645000)


ILM スパーテル

【禁忌・禁止】

1. 本製品は改造しないこと。
2. 本製品に異常を発見した場合は使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

①ILM スパーテル

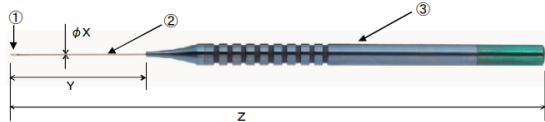


〔先端部形状〕



- ①先端部
- ②シャフト
- ③ハンドル

サイズ	X	Y	Z
2.3 G a	0.63mm	40mm	157mm
2.5 G a	0.5mm	28mm	145mm
2.7 G a	0.4mm	28mm	151mm

②ホリオ氏メンブレンスパーテル

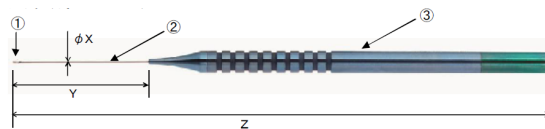


〔先端部形状〕



- ①先端部
- ②シャフト
- ③ハンドル

サイズ	X	Y	Z
2.5 G a	0.5mm	28mm	123mm

③ホリグチ氏ディレクショナル・メンブレンナイフ

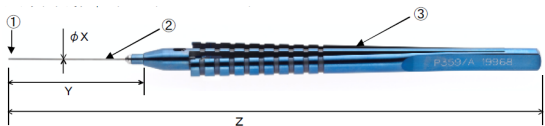

〔先端部形状〕



- ①先端部
- ②シャフト
- ③ハンドル

サイズ	X	Y	Z
2.5 G a	0.5mm	33mm	145mm

【使用目的】

眼科手術において眼組織の処置、物質の除去等を行うために用いる。

【使用方法】

1. 滅菌方法

本製品はエチレンオキサイドガス滅菌器又は高圧蒸気滅菌器（オートクレーブ）を用いて滅菌を行う。

滅菌条件等の詳細は、取扱説明書をご参照下さい。

2. 使用方法

- ・ ハンドルを持ち、先端部により眼組織の処置、物質の除

去等を行う。

- ・ 使用後は速やかに洗浄、消毒、滅菌を行う。

洗浄、消毒、滅菌の手順等の詳細は取扱説明書をご参照下さい。

【使用上の注意】

- ・ 使用目的以外には使用しないこと。

- ・ 使用前には外観上の損傷や動作不良がないことを確認すること。

- ・ 包装から取り出す際、及び使用後、洗浄、消毒、滅菌時には先端部（刃先等）に十分注意して取り扱うこと。

- ・ 使用するために必要な知識、技術に習熟した医師以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 清潔で良好な乾燥状態を保てる場所で保管する。

- ・ 直射日光や水漏れは避けるよう細心の注意を払うこと。

【包装】

1 本

※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名：エレックス株式会社

TEL 03-5859-0470

製造業者名：ASICO LLC（アシコ社）

製造業者住所：アメリカ合衆国

取扱説明書を必ずご参照下さい。