

機械器具 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具 70682000

ミキシングチップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

本品は再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状：以下種類がある。

1. ミキシングチップ

種類	カラー	ミキシング部 直径
ミキシングチップL	グリーン	6.5mm
ミキシングチップS	イエロー	4.2mm

2. DECAミキシングチップ

種類	カラー	先端部 直径
DECAミキシングチップ	ブルー	6.0mm

材質：プラスチック

【使用目的又は効果】

歯科材料（印象材料など）を混和する器具である。

【使用方法等】

- 印象材料等のカートリッジのキャップを取り外し、本品を装着する。
- ディスペンサーのプランジャーを押すと混和された印象材等が本品より押し出される。また、必要に応じて本品先端に口腔内注入用チップ（別売）を装着し、口腔内での注入にも用いる。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

使用前に、本品がカートリッジに確実に装着されていることを確認すること。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 本品は1回の混和操作ごとに使用し、再使用しないこと。
- 本品に破損、変形等の異常があった場合には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

本品は、歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者 デンツプライシロナ株式会社
製造国 スイス
製造業者 ズルツァー ミックスパック社
Sulzer Mixpac AG

[問い合わせ窓口]

カスタマーサービス
電話番号 0120-789-123