

機械器具 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具 70682000

ミキシングチップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

本品は再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状：以下種類がある。

1. ミキシングチップ

種類	カラー	*用途
ミキシングチップ L	グリーン	トレ、ウォッシュ 共用
ミキシングチップ S	イエロー	ウォッシュ用
* ミキシングチップ ブルー	ブルー	トレ用
* ミキシングチップ レッド	レッド	ウォッシュ用

2. DECAミキシングチップ

種類	カラー	用途
DECAミキシングチップ	ブルー	DECA 用
* ダイナミックミキシングチップ	ブルー	DECA 用

材質：プラスチック

【使用目的又は効果】

歯科材料（印象材料など）を混和する器具である。

【使用方法等】

- 印象材料等のカートリッジのキャップを取り外し、本品を装着する。
- ディスペンサーのプランジャーを押すと混和された印象材等が本品より押し出される。また、必要に応じて本品先端に口腔内注入用チップ（別売）を装着し、口腔内での注入にも用いる。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

使用前に、本品がカートリッジに確実に装着されていることを確認すること。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 本品は 1 回の混和操作ごとに使用し、再使用しないこと。
- 本品に破損、変形等の異常があった場合には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

本品は、歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンツプライシロナ株式会社
製造国 スイス
製造業者 ズルツァー ミックスパック社
Sulzer Mixpac AG

*製造国 アメリカ合衆国
*製造業者 デンツプライ社
Dentsply LLC

[問い合わせ窓口]

カスタマーサービス
電話番号 0120-789-123