

機械器具 11 放射線障害防護用器具  
一般医療機器 放射線防護用前掛 38355000

## スーズガードエア

### 【形状・構造及び原理等】

\*タイプ、形状、用途により下記の種類がある。

#### \*タイプ別用途:

レギュラーカラー付き: 患者等の上半身及び頸部を防護する。  
レギュラーカラーなし: 患者等の上半身を防護する。  
カラー: 患者等の頸部を防護する。  
パノケープ: 主にパノラマX線撮影時に、患者等の肩部(背面を含む)を防護する。  
パノデュアル: パノラマX線撮影用に肩から腰部まで、患者等の体の前面及び背面を二重パネルで防護する。

タイプ		** 留め方	†標準寸法 (縦×横、mm)	**色
レギュラー カラー付き	大人用	テープ	615×590	BY, LB
		マグネット	**800×600	LB, RB, S
	子供用	テープ	490×520	BY, LB
		マグネット	**600×450	LB, S
レギュラー カラーなし	大人用	テープ	650×590	BY, LB, NB
	子供用		500×530	
カラー	—	テープ	140×660	BY, LB, NB
パノケープ	—	テープ	190×610	BY
パノデュアル	大人用	テープ	660×595	BY, LB, NB
			**800×600	LB, RB
	子供用		500×520	BY
	**600×450		S	

†縦: 首部から本品下端までの長さ、横: 本品の最大幅

色

BY: バターカップイエロー LB: ライトブルー  
RB: ロイヤルブルー NB: ネイビーブルー  
S: サンド

### 【使用目的又は効果】

患者、術者または他の人員の体の一部を医療又は歯科における放射線被曝から保護するための標準長又は半分の長さの前掛状の衣類である。頸部及び甲状腺を保護するための固定式又は脱着式の衿を備える。

### 【使用方法等】

本品を患者等に着用させ、医療用又は歯科用レントゲン撮影を行う。

#### \*【使用方法等に関連する使用上の注意】

1. 初回使用前は、本品を清潔にすること。
2. 本品に損傷又はその恐れがある場合は使用しないこと。
3. 撮影する前に、本品が適切に着用されていることを確認すること。
4. 本品が強く折り曲げられると、X線防護材が損傷する原因となるので注意すること。

### 【使用注意】

\*\*【使用注意(次の患者には慎重に適用すること)】

1. 心臓ペースメーカーや除細動器等が植え込みされている患者に使用する場合は、本品の使用が可能か確認すること。[心臓ペースメーカー等の不具合の恐れ]

\*\*【その他の注意】

1. アルコールベースの殺菌性、殺ウイルス性、結核菌細菌性消毒剤の使い捨てタイプのワイブで汚れを拭きとり、糸くず等のない布を水道水で湿らせて洗浄すること。消毒剤メーカーの取扱説明書に従うこと。
2. 漂白しないこと。洗濯機で洗浄しないこと。アイロンはかけないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

\*\*【保管方法】

1. 本品をハンガーに掛けるか平らな場所に置いて保管すること。
2. 室温で保管すること。10℃以下、37℃以上の場所に保管しないこと。
3. 本品は、医療及び歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンツプライシロナ株式会社

製造国 アメリカ合衆国  
製造業者 デンツプライ プロフェッショナル社  
DENTSPLY Professional

\*製造国 インド  
製造業者 キランメディカルシステムズ社  
Kiran Medical Systems Limited

[問い合わせ窓口]

カスタマーサービス  
電話番号 0120-789-123